



Qufora® IrriSedo irrigationssystem med rektal ballongkateter

ONEMED

Ett enkelt och tillförlitligt irrigationssystem med hydrofil belagd kateter



Återta kontrollen över tarmen

Problem med tarmen såsom förstoppning eller avföringsinkontinens kan leda till psykiskt och fysiskt lidande för dem som drabbas. Livskvaliteten försämras när toalettbesök och inkontinens blir ett problem. Vid tarmdysfunktion kan anal irrigation – eller enema, rektalsköljning eller transanal irrigation som det också kallas – vara en lösning.

Så här fungerar irrigation

Vid irrigation tillförs 100 - 1000 ml vatten i ändtarmen. Vattnet kommer in i nedre delen av tarmen och den naturliga tömningsreflexen aktiveras. Efter en kort stund stöter tarmen ut vattnet och fekalerna. Vid regelbunden irrigation (dagligen eller varannan dag) kan du återta kontrollen över tarmen samt över var och när tömning sker och förstoppningar kan upplösas.

Irrigation med Qufora® IrriSedo irrigationssystem

Ballongkatetern är tillverkad av silikon och preparerad med en hydrofil beläggning, som aktiveras genom att doppa katetern i vatten före användning.

Satsen innehåller en vattenpåse, en kontrollenhet med pump och en dubbellumenslang och rektalkateter. När rektalkatetern förs in fylls ballongen med vatten för att hålla katetern på plats under sköljningen.

På så sätt fungerar ballongen som en försegling mellan ändtarmens vägg och katetern. Med hjälp av pumpen pumpas vattnet in i tarmen. När vattnet har stimulerat tarmen töms ballongen och katetern tas ut.

Efter en kort stund töms tarmen, och vatten samt fekalier sköljs ut.

Du klarar dig själv, sparar tid och slipper problem med inkontinens

Qufora® IrriSedo irrigationssystem har många fördelar. Det gör det möjligt att tömma tarmen på ett kontrollerat sätt när det passar. Systemet är utformat så att de flesta användare kan använda det utan hjälp. Det är lätt att förstå, enkelt att använda, driftsäkert och hållbart. När sköljningen har blivit en rutin upplever de flesta användare att det är tidsbesparande.

Qufora® IrriSedo irrigationssystem med ballongkateter

Du kan dra nytta av Qufora® IrriSedo irrigationssystem med rektal ballongkateter om du

- lider av en neurologisk sjukdom som påverkar tarmfunktionen
- använder vissa läkemedel som orsakar förstoppning
- lider av ofta återkommande förstoppning.

Följande egenskaper gör Qufora® IrriSedo irrigationssystem med rektal ballongkateter enkelt att använda:

- Ballongen på katetern är tillverkad av slitstarkt silikon och belagd, så den är snabb och lätt att använda, bara genom att doppa i vatten före användning.
- Minimala förberedelser för att påbörja en sköljningsrutin.
- Sköljningen följer en enkel sekvens (1-2-3-4) som är enkel att lära sig.
- Hållbart system i robust och flexibelt material.
- En inbyggd säkerhetsventil i pumpen säkerställer att varken ballong- eller vattentrycket når skadliga nivåer.
- Tack vare en skiva i änden av katetern är den enkel att hålla.
- Kontrollenheten kan enkelt fästas på låret med kardborrbandet.
- Den vattenfyllda ballongen hålls på plats under sköljningen. Vattnet minimerar risken för att ballongkatetern trycks ut av tarmrörelserna.
- Vattenpåsen på 1,5 liter innehåller så mycket vatten att sköljningen kan upprepas.

Rådfråga alltid läkare eller sjukvårdspersonal innan du börjar med sköljning!

Läs mer på www.mbh-international.com.

Den vattenfyllda ballongen håller katetern på plats



Enkelt att följa kontrollenhetens steg från 1 till 4




En styr-/stoppskiva ger gott grepp



Vattenpåsen rymmer 1,5 liter



Qufora® IrriSedo irrigationssystem

| Product | Beskrivning | Innehåll | Artikel nummer |
|---|------------------------------------|--|----------------|
|  | Startset (standard) | En regulator med fixeringsband, en vattenpåse, 2 standard hydrofil rektalkatetrar, en necessär, en slang, STANDARD | 58101-002 |
| | Startset (small) | En regulator med fixeringsband, en vattenpåse, 2 standard hydrofil rektalkatetrar, en necessär, en slang, SMALL | 58102-002 |
| | Månadsset (standard) | En vattenpåse, en slang, 15 hydrofila rektal ballongkatetrar, STANDARD | 58201-015 |
| | Månadsset (small) | En vattenpåse, en slang, 15 hydrofila rektal ballongkatetrar SMALL | 58202-015 |
| | Rektala ballongkatetrar (standard) | 10 hydrofila rektala ballongkatetrar, STANDARD | 58301-010 |
| | Rektala ballongkatetrar (small) | 10 hydrofila rektala ballongkatetrar SMALL | 58302-010 |
| | Fixeringsband | Kardborre fKlick RegularSmall | 54060-002 |
| | Extra slang | 1 st. | 54050-001 |

Qufora® IrriSedo irrigationssystem med ballongkateter

Materialbeskrivning

| Delar | Material | Mjukgörare |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Ballong kateter | | |
| Kateter | Ftalatfri PVC | Hexamoll DINCH |
| Ballong | Silikon | Ingen mjukgörare |
| Stoppskiva | Hård PVC | Ingen mjukgörare |
| Dubbellumen slang | | |
| Slang | PVC, DEHP-fri | Diocetyl isoftalat |
| Koppling | PVC, DEHP-fri | Diocetyl isoftalat |
| Regulator | | |
| Lock | ABS | Ingen mjukgörare |
| Slang | ABS | Ingen mjukgörare |
| O-ring, | Nitril | Ingen mjukgörare |
| Plastfjäder | POM | Ingen mjukgörare |
| Huvudpackning | Silikon | Ingen mjukgörare |
| Stöd | Gummi | Ingen mjukgörare |
| Pump | | |
| Frostat rör | PVC, DEHP-fri | Diocetyl isoftalat |
| Ventil | PP (vita delen)/HDPE (lila delen) | Ingen mjukgörare |
| Vit NRV ventil ut och in | Hård PVC | Ingen mjukgörare |
| Nät för ventil | Hård PVC | Ingen mjukgörare |
| Svarta ventilkulor | Nitril (NBR) | Ingen mjukgörare |
| Pump | PVC, DEHP-fri | TOTM |
| Vattenpåse | | |
| Film | PVC, DEHP-fri | Diocetyl isoftalat |
| Vitt lock / skruvlock | Hård PVC/PE | Ingen mjukgörare |
| Klart frostat rör | PVC, DEHP-fri | Diocetyl isoftalat |

| Dimensioner | Längd | Diameter | Volym |
|------------------|-------|----------|-------|
| Kateter standard | 12 cm | 13 mm | 1,5 l |
| Kateter small | 12 cm | 11 mm | |
| Vattenpåse | | | |
| Slang | 97 cm | | |
| Fixeringsband | 60 cm | | |

Tillverkare:
MBH-International A/S
Gydevang 30
DK-3450 Allerød
Danmark

qufora®

Distribueras av:
OneMed Sverige AB
Dockplatsen 12
211 19 Malmö
E-post
kundservice@onemed.com

ONEMED