



Vitrex Sterilance Press II Safety Lancet

Världen över riskerar medicinsk personal att smittas av blodburna sjukdomar såsom AIDS och Hepatit i samband med stick-skador inom vården.

Användarsäkerhet – nålen är helt skyddad, både före och efter användning

Användarvänlig – förinställd, kontaktaktiverad design

Kontaktaktiverad – ger ett fullgott blodprov varje gång

Patientkomfort – hög kvalitet, extra vass trefasad nål eller tvåfasat blad, höghastighetspenetration

Blodmängd – En serie av nålstorlekar och stickdjup för att passa de flesta kapillärblodprovtagningar


Användningsområden – test av blodglukos och andra in-vitro diagnostiska tester



Vrid och dra försiktigt av skyddslocket



Välj punktionsyta och tryck lansetten mot ytan för att frigöra nålen

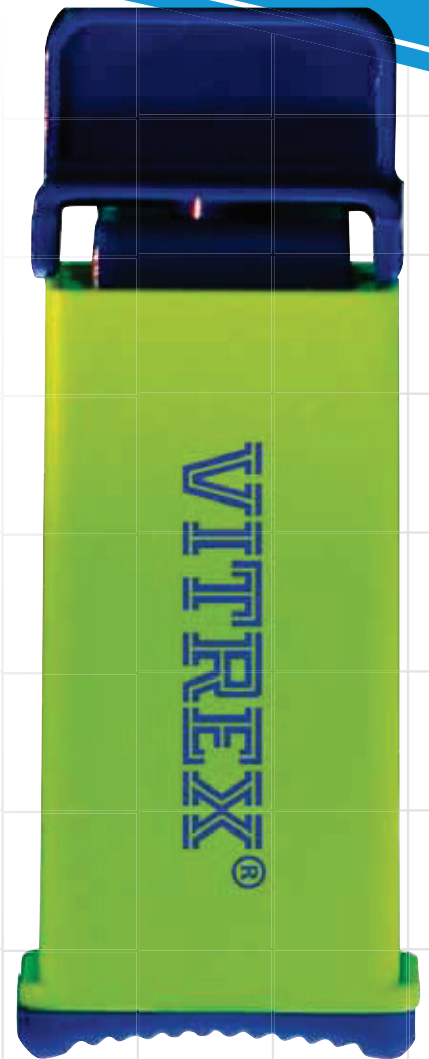

Släng lansetten i en lämplig säkerhetsbehållare

WARNING:
Använd ej om skyddslocket har tagits av vid ett tidigare tillfälle eller om skyddsförpackningen har blivit skadad.

Färgkod	Beskrivning	Stickdjup	Artikelnr.	Användning
Grön ●	18G blad	1,8 mm	393213	För hälpunktion på nyfödda och för tidigt födda barn
Gul ●	26G nål	1,8 mm	394213	För blodglukos
Orange ●	21G nål	2,2 mm	395213	För hemoglobin, kolesterol, blodgas m fl. diagnostiska tester
Rosa ●	21G nål	2,8 mm	396213	Som Orange men för tjockare hud på vuxna.
Blå ●	21G nål	1,8 mm	397213	Som Gul men för tjockare hud på vuxna.
Lila ●	28G nål	1,8 mm	398213	Ny artikel, mindre smärta

Hållbarhet 5 år

Förpackning:

Avdelningsfp: 100 st
Transportfp: 20 x 100 st