

## Tilläggsbeskrivning till Serres sugpåsar förfyllda med pulver



### 1. Avvikelser vid avläsning av volym

Vid avläsning av volymen i förfyllda sugpåsar är det viktigt att komma ihåg att pulvrets volym ska räknas bort vid avläsning enligt nedan:

| Artikelnummer: | Beskrivning   | Volym pulver |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 6057557        | 1 liters påse | 25 ml        | pulver i påse |
| 6057567 -0     | 2 liters påse | 50 ml        | pulver i påse |
| 6057587-0      | 3 liters påse | 85 ml        | pulver i påse |

Pulvret i sig expanderar inte.

### 2. Seriekoppling av förfyllda sugpåsar

Om Serres sugpåsar med pulver seriekopplas är det **mycket** viktigt att vacuumsugen är påslagen under hela den tid som sugen används.

#### Separat Pulver

| Varunummer | Beskrivning                   | Avd./Trsp.fp. |
|------------|-------------------------------|---------------|
| 6057550    | Pulver till sugpåse 25 g/påse | 24/288        |
| 6057553    | Pulver till sugpåse 2 kg/fp   | 1/1           |

