


evercare[®] inLine Förlängningsslang, spiral, PVC-fri

REF: 10539-01, 10540-01, 10541-01, 10542-01

evercare[®] inLine Förlängningsslang är lämplig för förlängning av infusionsaggregat eller anslutning till en spruta. Förlängningsslangarna är sterila engångsprodukter som används för att transportera intravenösa vätskor och/eller läkemedel som en förlängning av infusions- och perfusionsenheten genom att möjliggöra anslutning till en infusionskälla och en vaskulär access.

Egenskaper

- ▶ Klarar ett väsketryck på upp till 55 bar
- ▶ En han- och honkoppling i varje ände
- ▶ Hydrofobt filter förhindrar läckage vid primning
- ▶ Fast luer lock
- ▶ Lämplig vid transport och undersökningar

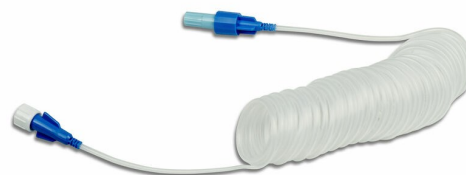


REF	Beskrivning	Storlek-slang, inre/yttre, L (längd)	Priming volume(ml) Ca	Antal dispenser/transport kartong
10539-01	Förlängningsslang, spiral, PVC-fri	Ø 1/2 mm, L 150cm	0,007	25 / 100
10540-01	Förlängningsslang, spiral, PVC-fri	Ø 1/2 mm, L 200cm	0,007	25 / 100
10541-01	Förlängningsslang, spiral, PVC-fri	Ø 1/2 mm, L 300cm	0,007	25 / 100
10542-01	Förlängningsslang, spiral, PVC-fri	Ø 1/2 mm, L 400cm	0,007	25 / 100

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.

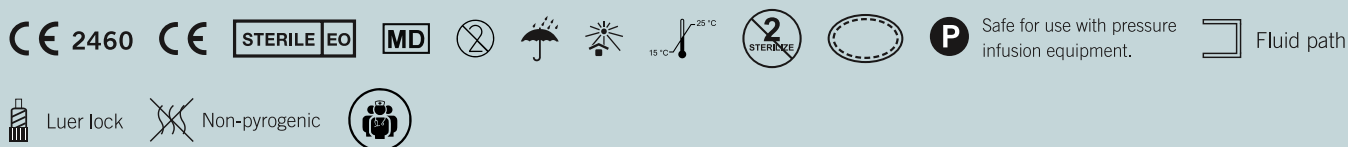

REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN 8536-9, EN ISO 80369-7

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
-----------	---------------------------

Varningar och rekommendationer

Varningar

Användningen av denna produkt är begränsad till utbildade läkare och sjuksköterska. Läs instruktionerna före användning. Enheten ska användas i enlighet med instruktionerna. Produkten är garanterat steril och pyrogenfri om den individuella förpackningen ej är öppnad eller skadad. Får ej användas om förpackningen är skadad eller om skyddspropparna ligger löst eller fattas.

Dra inte åt en luerkoppling utöver friktionspassningen då det kan skada både luerkopplingen och andra kopplingsenheter.

Använd inga instrument för fastklämning av slangen eller åtdragning av luer-kontakten.

Återanvändning kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada.

Undvik att öppna portar/nav exponeras. Byt ut sterila ändlock vid behov.

Förvaringsrekommendationer

Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

Avfallshantering

Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter

Hållbarhetstid

5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	235 x 100
Dispenserförpackning	PP	305 x 460
Transportförpackning	TCF kvalitet, Kartong	400 x 295 x 287
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
10539-01	06438129121582	N/A	06438129521580
10540-01	06438129121599	N/A	06438129521597
10541-01	06438129121605	N/A	06438129521603
10542-01	06438129121612	N/A	06438129521610

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.