

hawotest Seal-Check

Testsystemet för den dagliga kontrollen av Er rullförseglare (-svets)


hawotest Seal-Check gör det möjligt att dagligen kontrollera förseglingen på Era sterila förpackningar. Förseglingen kontrolleras visuellt medels en referensremsa som skapas tillsammans med Ert förpackningsmaterial. hawotest Seal-Check säkerställer Ni att förseglingsutrustningen arbetar optimalt.



Testremsan läggs och används i en pappers- plastfolie (min bredd 200 mm). Skall processas vid en temp av 180°C.



Vid förseglingen måste hela testremsans baksida vara täckt av förpackningens papper.

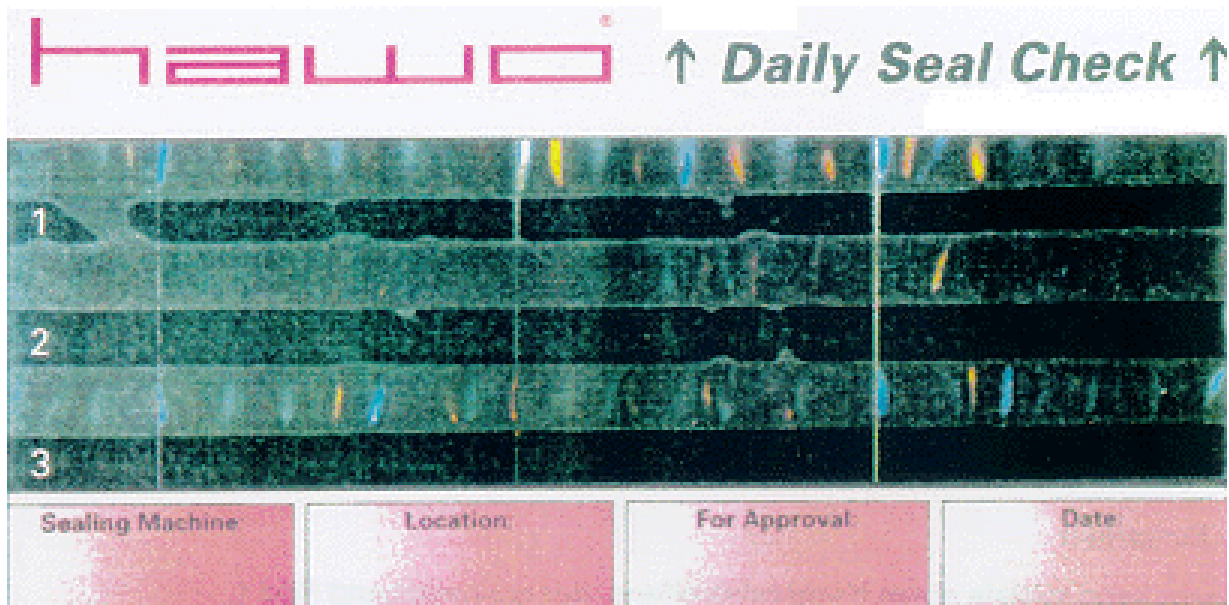

Referensbilden visar 3 olika förseglingar, några med fel. Testremsan kan bara användas vid ett tillfälle!

- | | |
|---|------|
| 1. Bristfälligt förseglingstryck (flera ljusa oförseglade avsnitt) | FEL |
| 2. För hög förseglingstemperatur (pappret och plastfolien smälter samman) | FEL |
| 3. Optimalt resultat med rätt tryck, temperatur och tid (jämn och homogen) | RÄTT |

- hawotest Seal-Check är den bästa lösningen för att kontrollera och säkerställa en perfekt försegling av Era sterilförpackningar
- hawotest Seal-Check kan användas vid kontrollen av Er förseglingsutrustning enligt den SS-EN ISO 11607:2006
- hawotest Seal-Check är ett bra hjälpmedel vid valideringen (Installation Qualification & Performance Qualification) av förseglingsprocessen

Tillverkare:	hawo GmbH Obere Au 2 – 4 DE-74847 OBRIGHEIM	Leveransförpackning:	250 st
		Art nr:	220/6.061.017