

COMPRINET® PRO

ANTITROMBOSSTRUMPA

Längs- och tvärelastisk antitrombosstrumpa i mjuk textil med graderad kompression. En avancerad stickteknik gör att strumpan bibehåller sin graderade kompression och goda passform. Hela strumpan är i ett stycke utan söm.

- För trombosprofylax i samband med operation och längre tids immobilisering
- Kan användas upp till fyra veckor, därefter övergång till en kompressionsstrumpa klass 1
- Inspektionshål vid tårna
- Kompression ankel ca 18mmHg
- Latexfri
- Tvättbar i maskin i 90 grader upp till 10 ggr utan att kompressionen påverkas
- Innehåll: polyamid och elastan. Silikonkanten på lårstrumpan innehåller neopren

Kontraindikationer: Obehandlad arteriell insufficiens, akut hudinflammation, hudinfektioner, immobilisering



KNÄSTRUMPA

BSN art nr	Storlek	Färg	Omfång, ankel	Omfång, vad	Längd, vad	Antal/fp	Antal/trp
77026-00	1 Small	Vit	16-19 cm	23-30 cm	-43 cm	10 par	40 par
77027-00	2 Medium	Vit	16-19 cm	30-38 cm	-43 cm	10 par	40 par
77028-00	3 Large	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	-43 cm	10 par	40 par
77124-00	4 X-Large	Vit	29-32 cm	46-53 cm	-43 cm	10 par	40 par
77133-00	5 XX-Large	Vit	29-32 cm	53-66 cm	-43 cm	10 par	40 par

LÅRSTRUMPA

BSN art nr	Storlek	Färg	Omfång, ankel	Omfång, vad	Omfång, lår	Längd lår till gluteal	Antal/fp	Antal/trp
46335-00	1 Small/Normal	Vit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	64-80 cm	10 par	40 par
46336-00	2 Small/Lång	Vit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	80-97 cm	10 par	40 par
46337-00	3 Medium/Normal	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	64-80 cm	10 par	40 par
46338-00	4 Medium/Lång	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	80-97 cm	10 par	40 par
46388-00	5 Large/Normal	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	64-80 cm	10 par	40 par
46389-00	6 Large/Lång	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	80-97 cm	10 par	40 par
77125-00	7 X-Large/Normal	Vit	29-32 cm	46-53 cm	55-90 cm	64-80 cm	10 par	40 par
77128-00	8 X-Large/Lång	Vit	29-32 cm	46-53 cm	55-90 cm	80-97 cm	10 par	40 par
77130-00	9 XX-Large/Normal	Vit	29-32 cm	53-66 cm	55-90 cm	64-80 cm	10 par	40 par
77131-00	10 XX-Large/Lång	Vit	29-32 cm	53-66 cm	55-90 cm	80-97 cm	10 par	40 par

HÖFTMODELL/LÅRSTRUMPA

BSN art nr	Storlek	Färg	Omfång, ankel	Omfång, vad	Omfång, lår	Längd lår till gluteal	Antal/fp	Antal/trp
79611-02	1 Small/Normal	Vit	16-19 cm	23-30 cm	41-81 cm	74-84 cm	10 par	40 par
79612-02	2 Small/Lång	Vit	16-19 cm	23-30 cm	41-81 cm	84-97 cm	10 par	40 par
79613-02	3 Medium/Normal	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	41-81 cm	74-84 cm	10 par	40 par
79614-02	4 Medium/Lång	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	41-81 cm	84-97 cm	10 par	40 par
79615-02	5 Large/Normal	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	41-81 cm	74-84 cm	10 par	40 par
79616-02	6 Large/Lång	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	41-81 cm	84-97 cm	10 par	40 par

COMPRINET® PRO

ANTITROMBOSSTRUMPA



1
Stoppa in handen i strumpan och ta tag i hälen.



2
Vänd strumpan ut och in hela vägen ner till hälen. Håll kvar i hälen.



3
Sätt på strumpan fram till hälen. Inspektionshålet ska vara på ovasidan av foten.



4
Dra försiktig upp strumpan på vaden, precis som på en vanlig strumpa.



5
För den överlappande delen över hälen.



6
Vik strumpan neråt och dra sedan uppåt utan kraft.



7
Kontrollera att hälen sitter på rätt plats och utan veck.



8
Kontrollera att inspektionshålet är på rätt ställe och helt öppet.



9
Dra upp strumpan. Vid lårstrumpa: Dra upp strumpan över hela låret.



10
Se till att lårbandet sitter korrekt och utan veck.



11

BSN medical AB

Uggledalsvägen 15
SE-427 40 Billdal

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se
Tel: 031 727 98 00
Fax: 031 727 98 10

