

Delta-Dry®

Vattentåligt tubbandage och polster



Delta-Cast®



Den nya standarden inom behandling av frakturer


Vilken patient skulle inte föredra ett vattentåligt gips? Ett som du kan duscha eller bada med! Det nya produktsortimentet Delta-Dry® erbjuder överlägset, vattentåligt material för applicering under gips som gör det möjligt för patienten att utföra sin dagliga hygien utan begränsningar. Bättre hygien, ökad patientkomfort och färre oplanerade gipsbyten som resultat. Det är dags att byta till den nya standarden inom behandling av frakturer!

Vattentåligt med snabbtorkande system

Det patenterade Delta-Dry®-materialet är vattentåligt. Fibrernas öppna stickade struktur påskyndar dräneringen när materialet doppats i vatten. Patientens kroppstemperatur torkar sedan snabbt den återstående fukten genom de luftiga maskorna (hög MVTR*). Gips och hud torkar på så sätt snabbt och huden känns torr inom cirka 90 minuter efter daglig hygien.

* Fukttångans överföringshastighet

(MVTR, Moisture Vapour Transmission Rate) Vattnets vikt som kan passera genom 1, 2 eller 3 vadderingslager

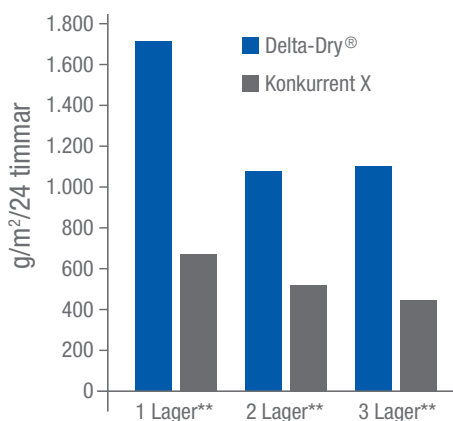

Slutsats: Tre lager av Delta-Dry® överträffade ett lager av Konkurrent X med 60 %

** Laboratorietestresultaten är avsedda att illustrera en produkts prestanda under kontrollerade förhållanden. De faktiska användningsresultaten kan variera.



Kostnadseffektiv

Delta-Dry®-produkter bidrar till en kostnadseffektiv behandlingslösning. De minskar sannolikheten för oplanerade gipsbyten. Genom att tillåta patienterna att upprätthålla sin hygien och fortsätta vara aktiva till ett rimligt pris blir både kliniker och patienter nöjda.

Standardapplicering av gipsförband

Delta-Dry®-produkter appliceras på samma sätt som konventionella produkter som appliceras under gips. Du behöver inte lära dig nya appliceringstekniker eller genomgå specialutbildning. Materialet som är mycket bekvämt och töjbart underlättar en skrynkelfri och snabb applicering. Delta-Dry®-produkter står dessutom emot en gipssåg för enkel gipsborttagning med standardutrustning.

Patientvårdsstandard

Delta-Dry®-produkternas polypropylen-nylon-polyesterväv skapar en mjuk, bekväm yta mot patientens hud. Dess höga andningsförmåga håller huden torr och vällyftad och hjälper till att minska hudbesvär som macerationer, klåda och dålig lukt. Detta resulterar i ökad patientföljsamhet och belåtenhet.

Delta-Dry® Stockinette

Vattentåligt tubbandage

Rekommenderad användning i kombination med Delta-Dry®. Standardlösning.

Art. nr	Storlek	Antal/fp
74564-00	2,5 cm x 10 m	1
74564-01	5 cm x 10 m	1
74564-02	7,5 cm x 10 m	1
74564-03	10 cm x 10 m	1
74564-04	12,5 cm x 10 m	1



Delta-Dry® Softliner

Vattentåligt vadderat tubbandage

Kan användas utan ytterligare vaddering. Snabb enstegslösning.

Art. nr	Storlek	Antal/fp
72779-01	2,5 cm x 10 m	1
72779-02	5 cm x 10 m	1
72779-03	7,5 cm x 10 m	1
72779-04	10 cm x 10 m	1
72779-05	12,5 cm x 10 m	1



Delta-Dry®

Vattentåligt polster

Rekommenderad användning i kombination med Delta-Dry® Stockinette eller som vaddering runt benförhöjningar.

Art. nr	Storlek	Antal/fp
73443-00	5 cm x 2,4 m	12
73443-01	7,5 cm x 2,4 m	12
73443-02	10 cm x 2,4 m	12



Se förpackning och/eller bipacksedeln för fullständiga anvisningar om säker användning av dessa produkter.