



## Bruksanvisning

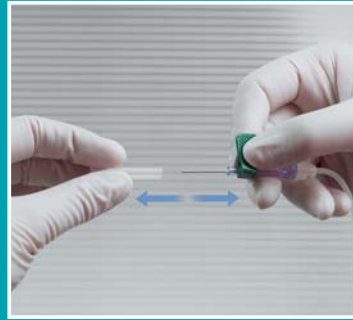


1 Ta bort skyddshylsan

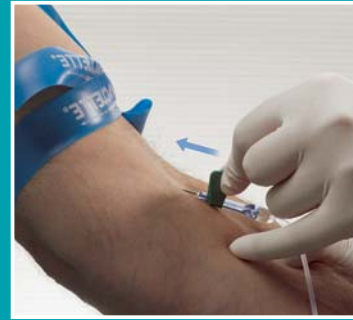


2 Venprovtagning



3 Sätt i röret

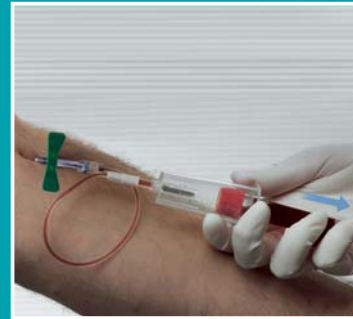


4 Ta bort det sista röret

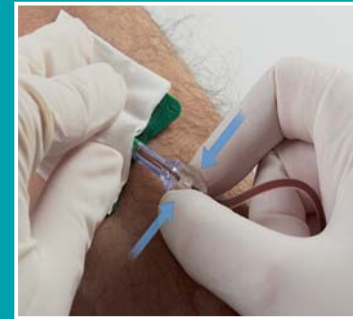

5 Aktivera säkerhetsmekanismen



6 Ta bort säkerhetssetet för blodprovtagning

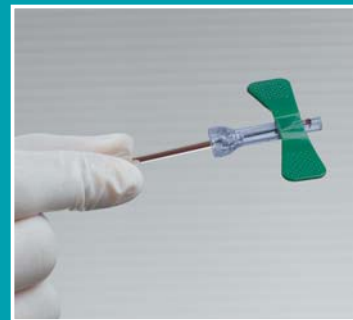

7 Aktiverat säkerhetsset för blodprovtagning



8 Avfallshantering



Kuskvägen 8 | SE-191 62 Sollentuna, Sweden  
Telefon +46 (0)8 752 00 30 | Fax +46 (0)8 752 03 90  
info@hettichlabinstrument.se

[www.hettichlabinstrument.se](http://www.hettichlabinstrument.se)

Your **Power** for Health

  
greiner bio-one



**VACUETTE®**  
Säkerhetsset  
för blodprovtagning

Våra innovationer  
för din säkerhet

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)

## VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning

Särskilt utvecklade för blodprovtagning av svårstuckna patienter. Skydda dig och dina medarbetare mot risken för skador genom nålstick. Varje stickskada är en för mycket.



### Aktivering

Ett hörbart "klick" är ett tecken på att säkerhetsmekanismen har aktiverats helt.

### Säkerhetsmekanism

Enkel aktivering av säkerhetsmekanismen genom att lätt pressa ihop båda sidorna av mekanismen.

### Ett genomskinligt visningsfönster

Det genomskinliga visningsfönstret gör det möjligt att visuellt kontrollera korrekt införing i venen.

### Extra säkerhet

Den extra säkerheten beror på att säkerhetsmekanismen aktiveras medan kanylen fortfarande är kvar i venen.

### Större flexibilitet

Flera olika slanglängder ger större flexibilitet vid blodprovtagning.

### Alternativ

användning som ett infusionsset.

## VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning, kombinationsprodukter

En praktisk kombinationsprodukt VACUETTE® säkerhetsset för blodprovtagning finns förmonterat med:

### VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning + Lueradapter

- ☞ Säkerhetsset med Lueradapter i steril blisterförpackning.
- ☞ Hanteringen är optimerad.



### VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning + hållare

- ☞ Förmonterat set med hållare i steril blisterförpackning.
- ☞ Ingenting behöver skruvas ihop.
- ☞ En praktisk färdig lösning som sparar tid.



### VACUETTE® Säkerhetsset för blodprovtagning + blododlingshållare

- ☞ Förmonterat set med blododlingshållare i steril blisterförpackning.
- ☞ Är avsett att användas tillsammans med de vanligaste blododlingsflaskorna och VACUETTE® blodprovtagningsrör.
- ☞ Setet är sterilt och förmonterat för högsta bekvämlighet och kostnadseffektivitet samt säkerställer att din patient bara behöver utsättas för en enda venprovtagning för alla förfaranden.

