

GETINGE CLEAN

Produktspecifikation

Enzymatic Detergent

PRODUKTBESKRIVNING

Neutralt enzymatiskt diskmedel för användning i diskdesinfektorer, ultraljudsbad och vid manuell rengöring av medicinsk utrustning. Lämpligt för användning på vattenresistenta ytor som rostfritt stål, keramik, glas, plast och mjuka metaller.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Dosering 2–10 ml/l.

Rengöringstemperatur (maskin) 35–60 °C.

Rengöringstemperatur (manuell/ultraljud) 30–50 °C.

Använd inte på polykarbonatmaterial.

Kontrollera materialkompatibilitet före användning.

Ska sköljas av fullständigt efter användning.

Blanda inte med andra kemikalier.

INGREDIENSER

Proteas, lipas, amylaszymer, tensider, komplexbildare och korrosionsinhibitorer.

TEKNISKA DATA

Specifik vikt (20 °C): 1,047 (typisk)

pH vid leverans (typiskt): 7,9

pH vid 5 ml/vatten (typiskt): 7,7

Viskositet: 3,8 cSt

FÖRVARINGSINFORMATION

Förvara på en sval, torr plats som är skyddad mot frost samt på avstånd från syror och starka oxidationsmedel.

Förvara i upprätt läge i originalbehållare.

Optimal förvaringstemperatur är 5–25 °C.

SÄKERHET OCH HANTERING

Läs mer i materialsäkerhetsdatabladet.

CE-MÄRKNING

Det enzymatiska diskmedlet uppfyller kraven i EU-direktiv 93/42/EC, bilaga 1 angående medicintekniska produkter.

MILJÖMEDVETENHET

Biologiskt nedbrytbar sammansättning och återvinningsbar förpackning.



Alla produkter



Medel



Getinges utbud av diskmedel har utvecklats, testats och provats på Getinges tvättanordningar för att följa standarden i ISO 15883 för rengöring av medicintekniska produkter.




GETINGE CLEAN

Produktspecifikation

Enzymatic Detergent

VATTNETS HÅRDHET OCH DOSERING AV RENGÖRINGSMEDEL

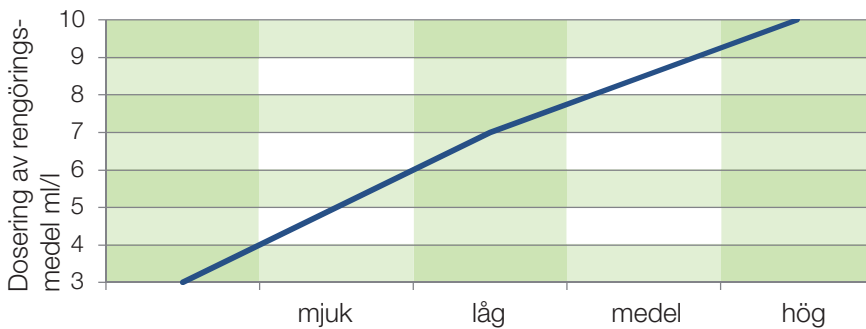

OBS!

Vattnets hårdhet är endast en av flera faktorer som påverkar mängden rengöringsmedel.

Andra faktorer som påverkar är:

- längden på rengöringscykeln
- temperatur
- nedsmutsningstyp, mängd och skick, t.ex. torr
- materialkompatibilitet

SERVICE

Kontakta din Getingerepresentant om du vill veta mer om dosering av rengöringsmedel och optimering av rengöringsprocesser.

GETINGE DISKMEDELSSORTIMENT FÖR MANUELL OCH AUTOMATISK RENGÖRING



	Aluminium	Anodiserad aluminium	Titan	Icke-järnmetaller	Matt krom	Rostfritt	Glas	Keramik	Gummi	Plast
■ GETINGE CLEAN HEAVY SOIL DETERGENT			M		●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN UNIVERSAL DETERGENT	M	M	M	M	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN ENZYMATIC DETERGENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE MIS DETERGENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ GETINGE CLEAN NEUTRALIZER	M	M	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN NEUTRALIZER PLUS			M	M	M	●	●	M	M	M
■ GETINGE CLEAN RINSE AID	●	●	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN INSTRUMENT LUBRICANT	●	●	●	●	●	●				
■ GETINGE CLEAN PRE TREATMENT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Detta diagram är enbart en vägledning.

Information gällande sterilisering av medicinteknisk utrustning från tillverkaren ska alltid följas, enligt ISO 17664.

M = Följ alltid instrumenttillverkarens anvisningar.

ORDERNUMMER

5 l	10 l	25 l	205 l
503437001	503437101	503437201	503437301

GETINGE

GETINGE GROUP

Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11

Box 1505, 351 15 Växjö

Telefon: +46 (0)10 335 98 00

Webbplats: <http://www.getinge.com>

E-post: info@getinge.com