

GETINGE CLEAN

Produktspecifikation

Rinse Aid

PRODUKTBESKRIVNING

Ett sköljmedel baserat på ett ytaktivt ämne för användning i diskdesinfektorer för att underlätta torkning och optimalt skölja medicinsk utrustning. Lämpligt för användning med rostfritt stål, keramik, glas, plast och resistent mjuka metallytor. Rinse Aid påverkar inte ång- eller etylenoxidpenetreringen.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Dosering 0,2–1,0 ml/l i sista sköljvattnet.

Temperatur: > 50 °C

Använd inte på polykarbonatmaterial.

Kontrollera att polysulfon (PSU, PPSU) och andra liknande material är kompatibla före användning.

Blanda inte med andra kemikalier.

INGREDIENSER

En blandning av komplexbildare och pH-regulator.

TEKNISKA DATA

Specifik vikt (20 °C): 1,00 (typiskt)

pH vid leverans (typiskt): 2,2

pH vid 1 ml/l i vatten (typiskt): 6,5-7,5

Viskositet (koncentrat, 20 °C): 6,9 cSt

FÖRVARINGSINFORMATION

Förvara på en sval, torr plats som är skyddad mot frost och på avstånd från alkalier och starka oxidationsmedel.

Förvara i upprätt läge i originalbehållare.

Optimal förvaringstemperatur är 5–25 °C.

SÄKERHET OCH HANTERING

Läs mer i materialsäkerhetsdatabladet.

CE-MÄRKNING

Rinse Aid uppfyller kraven i EU-direktiv 93/42/EC, bilaga 1 angående medicintekniska produkter.

MILJÖMEDVETENHET

Biologiskt nedbrytbar sammansättning och återvinningsbar förpackning.



Alla produkter



Rinse Aid



Getinges utbud av diskmedel har utvecklats, testats och provats på Getinges tvättanordningar för att följa standarden i ISO 15883 för rengöring av medicintekniska produkter.



GETINGE CLEAN

Produktspecifikation

Rinse Aid

SERVICE

Kontakta din Getingerepresentant om du vill veta mer om dosering av rengöringsmedel och optimering av rengöringsprocesser.

GETINGE DISKMEDELSSORTIMENT FÖR MANUELL OCH AUTOMATISK RENGÖRING



	Aluminium	Anodiserad aluminium	Titan	Icke-järnmetaller	Matt krom	Rostfritt	Glas	Keramik	Gummi	Plast
■ GETINGE CLEAN HEAVY SOIL DETERGENT			M		●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN UNIVERSAL DETERGENT	M	M	M	M	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN ENZYMATIC DETERGENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE MIS DETERGENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ GETINGE CLEAN NEUTRALIZER	M	M	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN NEUTRALIZER PLUS			M	M	M	●	●	M	M	M
■ GETINGE CLEAN RINSE AID	●	●	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN INSTRUMENT LUBRICANT	●	●	●	●	●	●				
■ GETINGE CLEAN PRE TREATMENT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Detta diagram är enbart en vägledning.

Information gällande sterilisering av medicinteknisk utrustning från tillverkaren ska alltid följas, enligt ISO 17664.

M = Följ alltid instrumenttillverkarens anvisningar.

ORDERNUMMER

5 l	10 l	25 l	205 l
503435401	503435501	503435601	503435701

GETINGE

GETINGE GROUP

Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11,
Box 1505, SE-351 15 Växjö, Sweden
Telefon: +46 (0)10 335 98 00
Web: <http://www.getinge.com>
E-mail: info.disinfection@getinge.com

+44 (0) 1235 239 670