

För information eller prover kontakta:



M Care AB

Nöbbelevsvägen 100

226 60 Lund

Telefon: 046-29 24 00

E-post: [kundservice@mcare.se](mailto:kundservice@mcare.se)

**[www.mcare.se](http://www.mcare.se)**



A SMALL PART  
OF A BIGGER LIFE .

# produktguide



eakin® ™

# Innehåll

---

Introduktion	1
Eakin Cohesive® Ringar & Slims®	2-3
Eakin Cohesive® Pasta	2-3
Pelican Barn & Neonatalpåsar	5-9
Release™ Häftborttagning	10
Protect™ Hudskyddsfilm	11
Perform™ Superabsorbent	12
Stödbälten	13
Surround™ Hudskydd	14
Sår & Fistelpåsar (Wound Pouches™)	15-17



# Introduktion

---

## En personlig touch

"Eakin är annorlunda.

Vi må vara världsledande inom vårt område, men vi är också ett irländskt, familjeägt företag med en historia som ligger oss varmt om hjärtat.

På grund av sin personliga erfarenhet med en familjemedlem som har urostomi, beslöt min far, Tom Eakin, att hitta en lösning för att förbättra livskvaliteten för alla personer med stomi.

## Eakin's filosofi

Ända sedan början av 1974 då vi utvecklade banbrytande Eakin Cohesive ringar för att stoppa läckage och bidra till läkning av irriterad och skadad hud, har vår inspiration till att utveckla och tillverka produkter som hjälper stomiopererade att leva livet så enkelt, glädjefyllt och så rikligt som möjligt.

Idag finns vårt breda sortiment - vetenskapligt bevisat att vara det bästa i världen - i över 40 länder i världen.

M Care har i Sverige tillhandahållit våra användbara och kostnadseffektiva produkter sedan 1999.

Vi är inte magiker..... men om det finns ett sätt för oss att förbättra något - göra det enklare , mindre besvärande, mindre begränsande och mindre irriterande - så kommer vi att göra det.

Vi anser inte att en stomi ska bestämma vad du är.

Vi tror att det bara är en liten del av ett större liv."



## Eakin Cohesive® Hudskydd: Säg farväl

Alla Eakin Hudskydd levererar dessa 5 fördelar:

- 1 Förebygger läckage genom att bilda en fuktät barriär runt stomin
- 2 Förhindrar läckage samtidigt som sårig och irriterad hud läker

Förutom de gemensamma fördelar alla Eakin Hudskydd har, så besitter varje enskild

Vilket Eakin Hudskydd för vilken situation?

### Ditt dagliga skydd



#### Eakin Cohesive SLIMS®

- För dagligt skydd och säkerhet för huden
- Vid täta bandagebyten
- För lindrig hudirritation
- Idealisk för användning med konvexa bandage
- För barn med stomi

### Extra skydd



#### Eakin Liten Cohesive® Ring

- Ger maximalt skydd
- För stomier med höga flöden
- Förebygger och/eller löser läckageproblem
- Längre användningstid av hela bandaget
- Fyller ut som "mjuk" konvexitet

### Störst täckning för huden



#### Eakin Stor Cohesive® Ring

- Lämplig för urostomier
- För att täcka ett större område av hud kring stomin
- Utmärkt vid djup konvexitet
- Förebygger irritation som kan uppstå av stomiplatta
- Användbar som hudskydd runt sår och öppna bukar

# till läckage och välkommen till frisk hud.

- 3 Förlänger användningstiden av stomibandage. Vetenskapliga bevis finns på att hudskyddet absorberar mer fukt än liknande produkter\*
- 4 Obegränsad formbarhet för att fylla ut alla ojämnheter, vilket skapar en slät yta för att fästa stomibandage
- 5 Det hudskydd som mest effektivt reducerar skadliga enzymers aktivitet\*\*

## produkt dessutom specifika egenskaper

### Utfyllnad



## Eakin Cohesive® Pasta

- **ALKOHOLFRI**  
- vilket innebär NO STING även när den används på sårig eller skadad hud
- Absorberar mer vätska än andra stomipastor\*\*  
Lätt att applicera och lätt att ta bort – torkar aldrig ut
- Formbar och mångsidig – fyller ut gropar, veck och ojämnheter  
Den pasta som mest effektivt reducerar aktivitet av enzymet lipas\*\*

## Cohesive® Seals & Cohesive Slims®

Produktkod	Beskrivning	Diameter	Tjocklek	Antal/ förp	Apotekens Varunr
839001	Eakin Stor Cohesive® Ring	98 mm	2,1 mm	10	280776
839002	Extra skydd	48 mm	4,2 mm	30	204550
839005	Eakin Cohesive SLIMS®	48 mm	3,0 mm	30	203282

## Cohesive® Paste

Produktkod	Beskrivning	Antal/ förp	Apotekens Varunr
839010	Eakin Cohesive® Pasta	60g tub	220028

\* 'Effect of a long life ostomy seal on faecal enzyme activity', Dr Grace McGroggan, TG Eakin Ltd and Dr Lorraine Marlin, Queen's University Belfast, Northern Ireland

\*\* 'Effect of a long life ostomy paste on faecal enzyme activity', Dr Grace McGroggan, TG Eakin Ltd in conjunction with Queen's University Belfast, Northern Ireland

# Eakin Pelican Stomipåsar för barn



Eakin Pelican Stomipåsar för barn har designats för att passa barns ömtåliga hud

## Fördelar:

- Hudskyddsplattan på stomibandagen är skonsam och mild för ung hud
- Non-woven överdrag med tryck av teddybjörnar har delad framsida som underlättar festsättning och ger möjlighet till inspektion av stomin
- Säker vidhäftning som kan leda till förlängd användningstid
- Mjukt, silkeslent överdrag som innebär att påsen kan bäras tyst och med komfort
- Vattentätt filtersystem innebär kontrollerat luftflöde. Filterskydd i form av teddybjörnar används vid dusch och bad
- Påsarna har en tömningskanal som enkelt stängs med kardborrefäste. Enkelt att tömma och rengöra
- Neonatal påse (839703) har inget starthål, vilket underlättar vård av loop-ileostomier och mucösa fistlar



## Pelican stomipåsar för barn

		Storlek	Produktkod	Antal/förp	Apotekens Varunr
Pelican Barn. Delad framsida		Uppklippbar 10-50mm	839701	30	220245
Pelican Neonatal. Delad framsida		Uppklippbar 0-40mm	839703	30	220246

# Eakin Release™ Häftborttagning

Release™ Häftborttagning lossar bandaget och eventuella häftrester snabbt och effektivt samt viktigast av allt – utan någon smärta. Precis som alla Eakin produkter, är Release häftborttagning helt alkoholfri och hudvänlig.

## Fördelar

- Ger enkel och smärtfri borttagning av plattor, som annars eventuellt kan orsaka smärta och skada på huden
- En fräsch doft av mynta maskerar dålig lukt
- Tillsats av Vitamin E, en effektiv antioxidant som mjukgör och återfuktar huden och bidrar till att behålla frisk hud runt stomin
- Ingen sveda vid applicering av Release
- Snabbtorkande formula som torkar på sekunder och som inte påverkar vidhäftningen av nästa stomibandage
- Kan sprayas ur all olika vinklar, även upp och ner, vilket underlättar i svåråtkomliga vinklar
- Release™ spray teknik töms till 100% till skillnad från traditionella sprayer



## Användningsområden

- Stomivård – för att enkelt och smidigt ta bort stomibandage
- Sårvård – för att enkelt och smidigt ta bort bandage och tejprester
- Inkontinensvård – borttagning av hjälpmedel som hålls på plats av häftor

Produktkod	Beskrivning	Antal/ förp	Apotekens Varunr
839023	Release™ Spray	50 ml	730969
839024	Release™ Våtservetter	30	730970



# Eakin Protect™

Precis som namnet säger erbjuder Protect skydd mot skadliga uttömningsvätskor och kraftiga häftämnen. No-Sting formula innebär applicering utan smärta.

## Fördelar:

- Innebär en hållbar och bekväm barriär
- No-Sting formula innebär ingen smärta vid applicering
- Avancerad silikonteknologi som är fullständigt hudvänlig och kan användas på känslig hud och barn
- Fräsch doft av mynta
- Tillsats av Vitamin E, en effektiv antioxidant som mjukgör och återfuktar huden och bidrar till att behålla frisk hud runt stomin
- Protect™ har en snabbtorkade formula som torkar på sekunder
- Våtservetter enskilt förpackade för enkel och diskret användning



## Användningsområden

- Stomivård – skapar en hållbar barriär mellan huden och stomiplattan
- Sårvård – skyddar huden från uttömningar och häftämnen
- Inkontinensvård – skyddar mot att urin och/eller avföring kommer i kontakt med huden

Produktkod	Beskrivning	Antal/ förp	Apotekens Varunr
839025	Protect™ Våtservetter	30	730971

# Eakin Perform™

Perform™ Superabsorbent ger ökad kontroll genom att förvandla tunt innehåll till en lätthanterad gel. Läckage kan förebyggas och säkerhet kan skapas. Lämpligt för stomier med lös avföring. Portionspåsen läggs hel i stomipåsen.

## Fördelar:

- Minimerar risken för läckage, särskilt nattetid
- Reducerar dålig lukt
- Genomskinliga Perform påverkar inte avföringens färg och fläckar inte stomipåsen. Det innebär att avföringen kan granskas utan att den förändrats i färg samt att varken påse eller toalett missfärgas
- Minskar prassel
- Påsen buktar inte ut lika mycket
- Filtret fungerar mer effektivt
- Gör att det är lättare att tömma och rengöra
- En portionspåse är tillräckligt vid varje påsbyte



Produktkod	Beskrivning	Antal/ förp	Apotekens Varunr
839020	Eakin Perform™	60	220248

# Eakin Stödbälte™

Olika studier visar att en stor procent av stomiopererade utvecklar bräck efter en stomioperation, beroende på svaghet i muskelväggen\*.

Användning av ett bekvämt och anpassat stödbälte kan med framgång reducera risken för stomibräck. Eakin Stödbälte har designats för att ge ett fullständigt och komplett stöd för parastomala bräck, utan att hindra stomins funktion.

## Fördelar:

- Tillverkat av det unika materialet 'Isoflex' som följer kroppens former, andas och är lättviktigt. Ger fullständigt stöd utan att förhindra stomins funktion
- Designat för att inte ha eller låta tillverka ett hål, eftersom "inget hål" ger bästa stöd åt bräcket
- Reglerbart kardborrefäste ger enkel och korrekt passform
- Neutral, beige färg för ökad bekvämlighet
- Tvättbar
- Finns i två bredder och fyra längder



## Användningsområden

- Ger stöd åt buken vid alla former av fysisk aktivitet, som till exempel lyft, sport, hushållsarbete, trädgårdsarbete med mera.
- Behandling av parastomala bräck när fysisk aktivitet krävs
- Förebyggande av parastomala bräck, särskilt under de närmaste månaderna efter stomioperation
- Observera att stomibälten inte bör användas liggande, särskilt nattetid

## Applicering

- Ligg på stadigt underlag och låt bräcket sjunka, låt magen bli så platt som möjligt
- Använd ett måttband och mät runt magen över stomin och bräcket. Håll måttbandet så tätt intill kroppen som möjligt
- Notera längden och jämför i listan över tillgängliga storlekar
- Om tveksamhet eller måttet är mellan storlekar, välj den mindre storleken
- Välj mellan 20 cm eller 26 cm brett stödbälte beroende på behov av stöd
- Det 15 cm breda kardborrefästet ger möjlighet att justera längden

Storlek	Längd	Bredd	Produktkod	Apotekens Varunr
<b>Small</b>	75 - 90cm	20 cm	<b>839051</b>	202114
		26 cm	<b>839061</b>	202118
<b>Medium</b>	90 - 105cm	20 cm	<b>839052</b>	202115
		26 cm	<b>839062</b>	202120
<b>Large</b>	105 - 120cm	20 cm	<b>839053</b>	202116
		26 cm	<b>839063</b>	202121
<b>Extra Large</b>	120 - 135cm	20 cm	<b>839054</b>	202117
		26 cm	<b>839064</b>	202122

\* Your Guide to Stoma Support, Hernia Prevention and Management (Julia Thompson, RN, PhD)


# Eakin Surround™

Baserad på samma princip som övriga Eakin Hudskydd, ger Surround ett komplett skydd genom att skapa en barriär mot bakterier och ett fuktätt skikt för huden.

Surround™ kan användas för att skydda huden tillsammans med olika hjälpmedel som PEG, suprapubis katetrar, dränageslangar, trakeostomier med mera.

## Fördelar

- Ger fullständigt skydd genom att reducera enzymaktivitet och genom att blockera biologiska och kemiska irritationsämnen
- Ger ökad bekvämlighet för brukaren
- Absorberar effektivt läckage som följaktligen innebär skydd för huden mot kroppsvätskor, något som påskyndar läkningsprocessen
- Ett flexibelt hudskydd med en 3 mm bred skåra som kan vidgas och tånjas för att ge fullständig formbarhet och följsamhet till kroppens konturer
- Perfekt form för att passa runt drän och tuber. Inga komplement i form av kompresser eller annat behövs. Hudskyddet förebygger att tuber, katetrar eller dränager rör på sig eller dras bort av misstag
- Skyddspapperet har en "V"-form för enkel borttagning
- Den vattentäta filmen på ovasidan kan enkelt torkas av och hållas ren
- Varje hudskydd är individuellt förpackat för ökad hygien och enklare användning

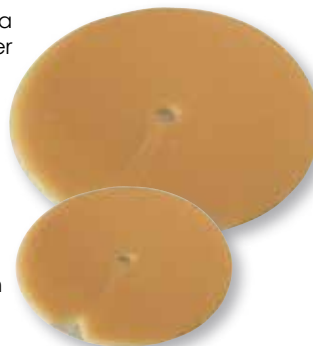

Produktkod	Beskrivning	Storlek	Antal/förp	Apotekens Varur
839011	Surround™ Stor	98 mm	10	730301
839012	Surround™ Liten	58 mm	20	730300

# Wound Pouches™ - Sår & Fistelpåsar

Eakin Sår & Fistelpåsar™ är skapade för att samla upp sårvätskor, samtidigt som plattan bestående av Eakin Cohesive Hudskydd ger komplett skydd för huden och en säker passform. Påsarna finns med två olika stängningsmetoder och en mängd olika storlekar.

## Fördelar

- Plattan av Eakin Cohesive Hudskydd ger fullständigt skydd för huden mot alla typer av utfömningsvätskor och genom sin följksamhet och vidhäftningsförmåga ger påsen en säker, flexibel och bekväm passform
- Förser sårvården med en omfattande helhetslösning som är både kostnadseffektiv och tidsbesparande samtidigt som komforten och friheten för patienten ökar
- Ett stort sortiment av storlekar tillmötesgår alla olika behov, från små påsar till barn och dränläckage till stora påsar för öppna bukar samt en specifik storlek för medellinjesnitt. Eakin MAXI påse är den största sår & fistelpåsen på marknaden
- 2 stängningsmetoder finns tillgängliga:
  - 1 - Vikbar avtappning med ficka innebär inga klämmor eller kranar som kan skava och ge obehag.
  - 2 - Kateterkoppling med stängningskran som kan kopplas till uppsamlingspåse
- Transparent plast ger möjlighet att enkelt inspektera såret utan att påsen behöver tas bort, vilket också innebär att lukt reduceras
- Eakin Lucka kan fästas på alla storlekar utom de minsta. Luckan ger möjlighet till åtkomst av såret för att se bättre, spola eller eventuellt behandla såret.
- Transparenta klippmallar följer med varje Eakin Sår & Fistelpåse, något som underlättar när man ritar av såret och sedan vänder för att rita av på plattans baksida
- Kompletterande produkter för behandling med Eakin Sår & Fistelpåsar kan vara Eakin Pasta för att fylla ut veck, gropar eller ärr. Eakin ringar och Eakin plattor är användbara för att "rama in" sårkanterna och därmed få bandaget att sitta längre



## Användningsområden

- Behandling av öppna bukar och fistlar
- Behandling av alla typer av vätskande sår
- Bandagering av komplicerade eller oregelbundna stomier
- Bandagering av sår eller fistlar med höga flöden

Det riktiga sortimentet innebär att påsar finns för alla typer av sår och behandling, från de allra minsta till de allra största.





## Hur gör man?

Besök M Care's hemsida [www.mcare.se](http://www.mcare.se) för att se enkel instruktionsfilm om hur påsarna ska appliceras.

## Kateterkoppling

	Produktkod	Beskrivning	Antal/förp	Apotekens Varunr
	<b>839260</b>	Small Oval platta, 45 x 30 mm	10	204980
	<b>839267</b>	Small + Oval platta, 86 x 60 mm	10	732128
	<b>839261</b>	Medium Oval platta, 110 x 75 mm	10	204981
	<b>839270</b>	Midi För medellinjesnitt, 250 x 80 mm	5	736500
	<b>839262</b>	Large Oval platta, 175 x 110 mm	10	204983
	<b>839263</b>	XL Horisontell platta, 245 x 160 mm	5	204984
	<b>839264</b>	XL Horisontell 245 x 160 mm Öppningsbar lucka, Lucköppning:126 x 77 mm	5	204985
	<b>839265</b>	XL Vertikal, 245 x 160 mm	5	204986
	<b>839268</b>	XL Vertikal 245 x 160 mm Öppningsbar lucka, Lucköppning:126 x 77 mm	5	732129
	<b>839266</b>	XL Vertikal, oregelbunden 290 x 130 mm	5	204987
	<b>839269</b>	Maxi Två tömningskanaler, Båda kateterkoppling, 250 x 385 mm	1	733400

## Vikbar avtappning

	Produktkod	Beskrivning	Antal/förp	Apotekens Varunr
	<b>839250</b>	Small Oval platta, 45 x 30 mm	10	204976
	<b>839251</b>	Medium Oval platta, 110 x 75 mm	10	204977
	<b>839252</b>	Large Oval platta, 175 x 110 mm	10	204978
	<b>839253</b>	XL Horisontell platta, 245 x 160 mm	5	204979

## Accessories

	Produktkod	Beskrivning	Antal/förp	Apotekens Varunr
	<b>839280</b>	Eakin Lucka Självhäftande, Transparent Öppning 126 x 77 mm	5	204988
	<b>839003</b>	Eakin Hudskydd Platta 100 x 200 mm 2,1 mm tjock	5	280792
	<b>839004</b>	Eakin Hudskydd Platta 100 x 100 mm 2,1 mm tjock	5	280800

## Maxvolym Eakin Sår & Fistelpåsar

Produktkod	Volym (ml)
839250/ 839260	190
839267	180
839251/ 839261	670
839270	1100
839252/ 839262	1190
839253/ 839263/ 839264	3240
839265/ 839268	3260
839266	1780
839269	8250

# Följ oss online

---

## Följ M Care på Facebook



"Gilla" vår sida och få uppdateringar

**Facebook/mcare**



VÄLKOMMEN till M Care´s hemsida

**www.mcare.se**

## Follow eakin online



**Facebook/TGEakin**



**@TGEakin**



**tgeakinltd15**



*Sign up for our monthly e-newsletter*