

Navina Classic Produktinformation

Navina™ Systems från Wellspect HealthCare har utvecklats för att hjälpa vuxna och barn över 3 år som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmskötsel.

Användaren kan vara rullstolsburen och/eller ha nedsatt motorisk funktion i händerna. Genom att tillföra vatten till nedre delen av tjocktarmen (kolon) kan man stimulera de peristaltiska musklerna i tarmen till att tömma tjocktarmen och ändtarmen (rektum). Barn ska utföra TAI i vuxens sällskap, tills dess sjukvårdspersonal bedömer att barnet klarar att genomföra TAI på egen hand.

- Rådgör alltid med sjukvårdspersonal som är specialiserade på TAI innan du använder Navina Systems.
- Navina Systems ska endast användas så som det beskrivs i bruksanvisningen
- Navina Systems ska endast användas av en och samma person.
- Navina rektalkateter regular, är endast för vuxna.
- Navina rektalkateter small, ska endast användas tillsammans med helvita Navina Systems..

Kontraindikationer

Använd inte Navina™ Classic om du har något av följande:

- Anal eller rektal stenosis
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.
- Akut divertikulit.
- Kolorektal cancer.
- Ischemisk kolit.
- Genomgått rektal operation för mindre än 3 månader sedan.
- Genomgått endoskopisk polypetomi för mindre än 4 veckor sedan

Listan över kontraindikationer är inte fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till individuella omständigheter.

Navina Classic

Art. nr	Produkt	Innehåll
6900510	Navina Classic Regular* Endast för vuxna	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Rektalkatetrar Regular* 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset
6900710	Navina Classic Small Från 3 år	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Rektalkatetrar Small 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset
6901710	Navina Classic Kona Från 3 år	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Konor 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset

NÄR TARMEN FUNGERAR, FUNGERAR TILLVARON

Wellspect®
A REAL DIFFERENCE



Navina Classic Förbrukningsartiklar

Art. nr	Produkt	Innehåll	Tekniska detaljer
6900610	Navina Classic Regular refill	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Navina rektalkatetrar Regular*	100 användningstillfällen 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala. 100 användningstillfällen Hydrofila, engångskatetrar.
6900810	Navina Classic Small refill	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Navina rektalkatetrar Small	100 användningstillfällen 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala 100 användningstillfällen Hydrofila, engångskatetrar.
6901810	Navina Classic Kona refill	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Konor	100 användningstillfällen 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala 100 användningstillfällen Hydrofila, engångskonor.
6900310	Förbrukningsset Regular	1 Vattenbehållare 15 rektalkatetrar Regular*	1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala Hydrofila, engångskatetrar.
6900410	Förbrukningsset Small	1 Vattenbehållare 15 Navina rektalkatetrar Small	1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala Hydrofila, engångskatetrar.
6901610	Förbrukningsset Kona	1 Vattenbehållare 15 Konor	1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala Hydrofila, engångskonor.
6894010	Rektalkateterset Regular*	10 katetrar	Hydrofila, engångskatetrar.
6894310	Rektalkateterset Small	10 katetrar	Hydrofila, engångskatetrar.
6901110	Slangset	1 Slang till kateter/kona 1 slang till Vattenbehållare	100 användningstillfällen 100 användningstillfällen
6901200	Tillbehörssset	2 greppringar(1 vertikal, 1 horisontell) 1 nackband 1 fästrem 1 fästklämma till Navina Classic kontrollenheten	
6901310	Navina Classic kontrollenhet	1 Navina Classic kontrollenhet	100 användningstillfällen

* Endast för vuxna
Alla Navina Classic-komponenter skall kasseras som hushållsavfall.

wellspect.se

