

Cutimed®

Closing wounds. Together.

Multibegåvad
sårhäkning

Cutimed®
HydroControl



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

CUTIMED® HYDROCONTROL ETT NYTT SÄTT ATT HANTERA SÅR

FYRA FUNKTIONER


Cutimed HydroControl är resultatet av ett nyskapande sätt att kombinera fyra olika funktioner för att få fram ett förband som kan hantera kroniska/stagnerade sår som gått i "lås".

4
FYRA FUNKTIONER



MYCKET GOD HANTERING AV VÄTSKA

Säker behandlingslösning eftersom sårvätskan absorberas vertikalt och hålls kvar inne i förbandet.

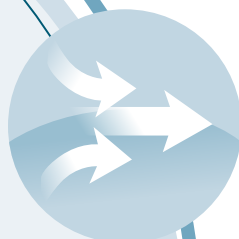


MYCKET GOD POTENTIAL FÖR SÅRSTIMULERING

Stimulerar och främjar autolytisk debridering genom osmos.




OPTIMAL FUKTBALANS

Kombinationen av Flexipore-tekniken, polyuretanfilmen och den hydropolymerbaserade gelmatrisen skapar en optimal miljö för sårhäkning.

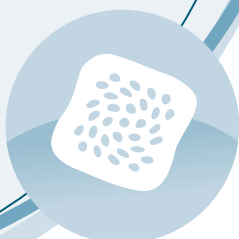

INNOVATIV DESIGN

Förbandet är tunt, klippbart och enkelt att applicera. Kombinerar hög användarkomfort med unika egenskaper.

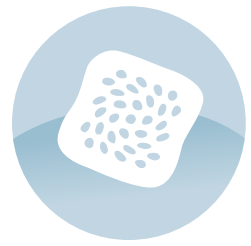


DET UNIKA FINNS I DETALJERNA

Hemligheten bakom **Cutimed® HydroControl** är en innovativ kombination av en polyuretanfilm med mycket goda andningsegenskaper och en hydroaktiv gelmatris av hydropolymer. Interaktionen mellan dessa två komponenter och Flexipores-tekniken resulterar i en utmärkt vätskehantering och skapar förutsättningar för en optimal sårmiljö.

• GELMATRIS AV
HYDROPOLYMER

• EXTRA TUNN
POLYURETANFILM

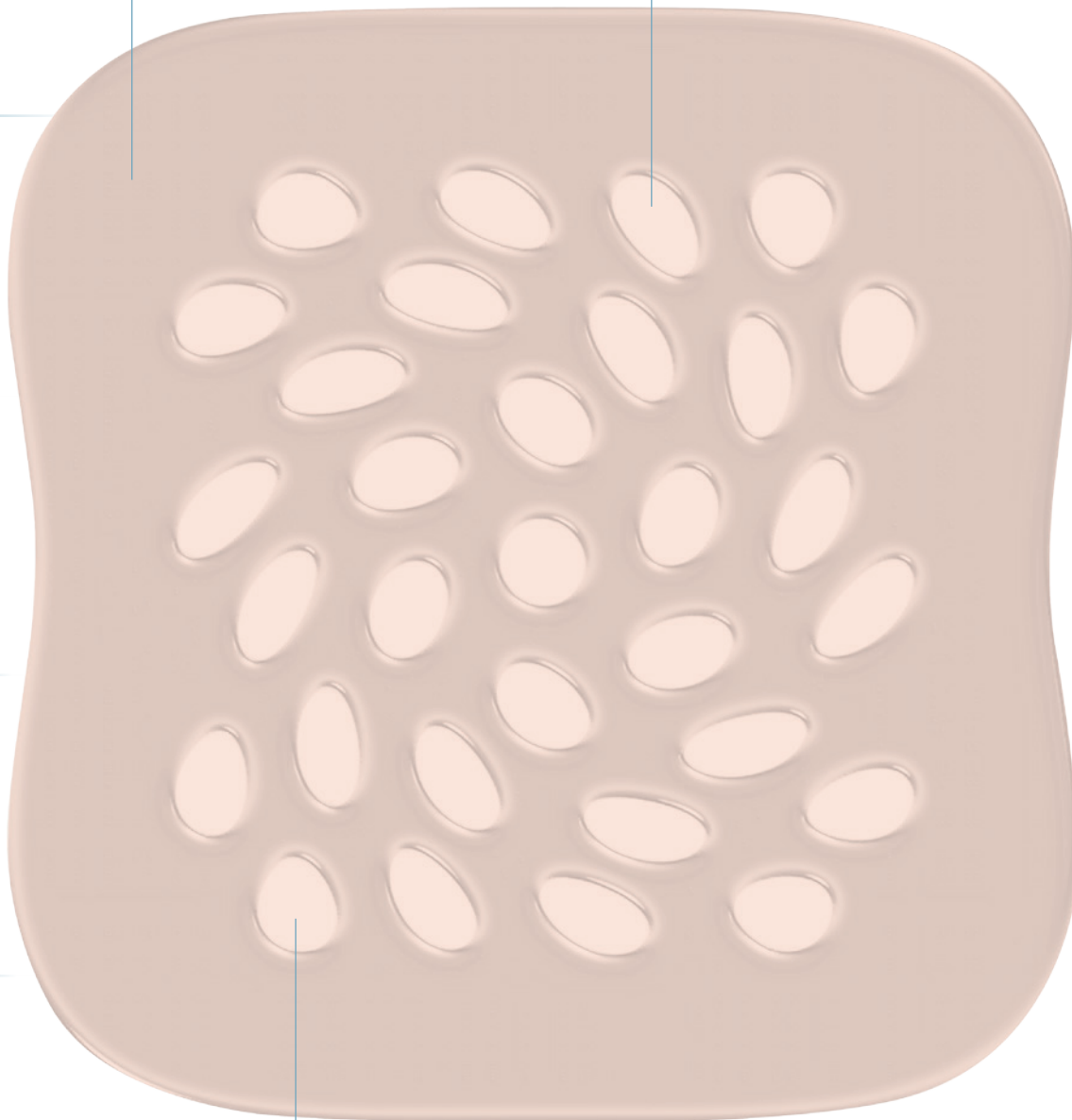

• FLEXIPORES


SÅRSTIMULERING – NYCKELN TILL EN LYCKAD SÅRLÄKNING

SKAPA IDEALA LÄKNINGSFÖRHÅLLANDEN

Cutimed® HydroControl verkar genom den fysiska principen osmos. När förbandet absorberar sårvätska ökar osmolaliteten i sårbädden. Detta stimulerar tillströmningen av ny vätska från den omgivande vävnaden till sårbädden vilket främjar autolytisk debridering. Förbandets fyra funktioner skapar optimala förutsättningar för vävnadstillväxt. Därmed lämpar sig **Cutimed® HydroControl** för många olika sårtyper, i synnerhet för stagnerande sår.


Principen: Osmos – skapa balans

Vattenmolekyler förflyttas automatiskt från områden med låg partikelkoncentration till områden med hög partikelkoncentration för att skapa balans. Precis som honung använder sig **Cutimed® HydroControl** av den här principen genom den hydropolymerbaserade gelmatrisens unika sammansättning.

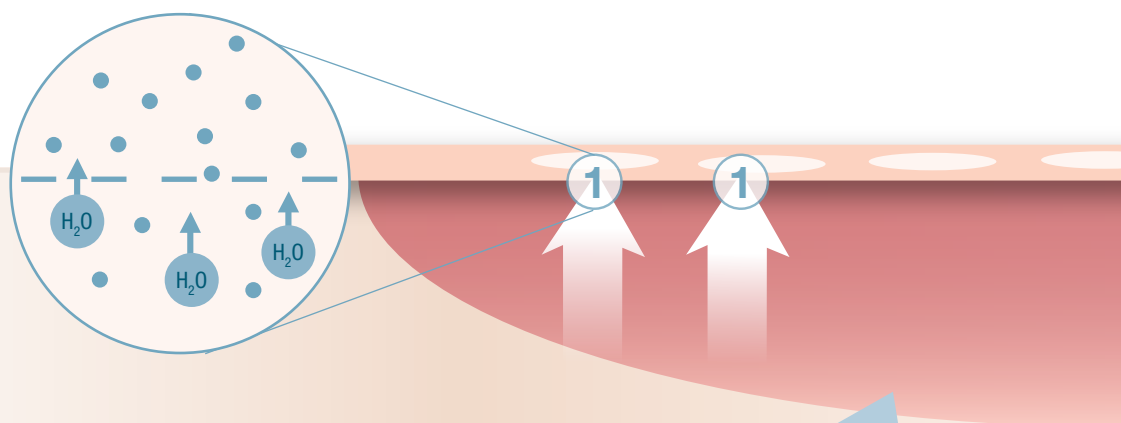



1. ABSORBERING AV SÅRVÄTSKA

Vätska från sårbädden sugs upp av den hydropolymerbaserade gelmatrisen.

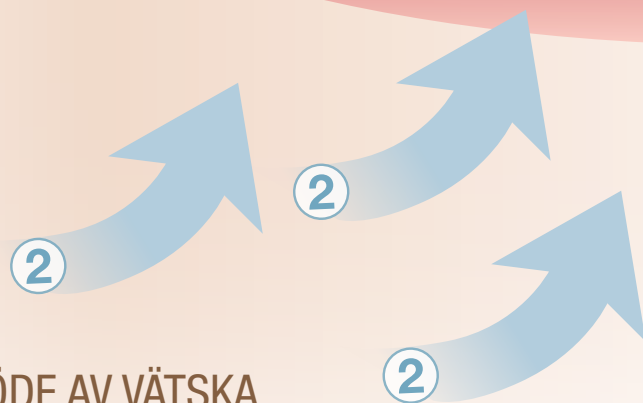

2. TILLFLÖDE AV VÄTSKA TILL SÅRET

Genom osmos flödar vätska från den interstitiella vävnaden in i såret.

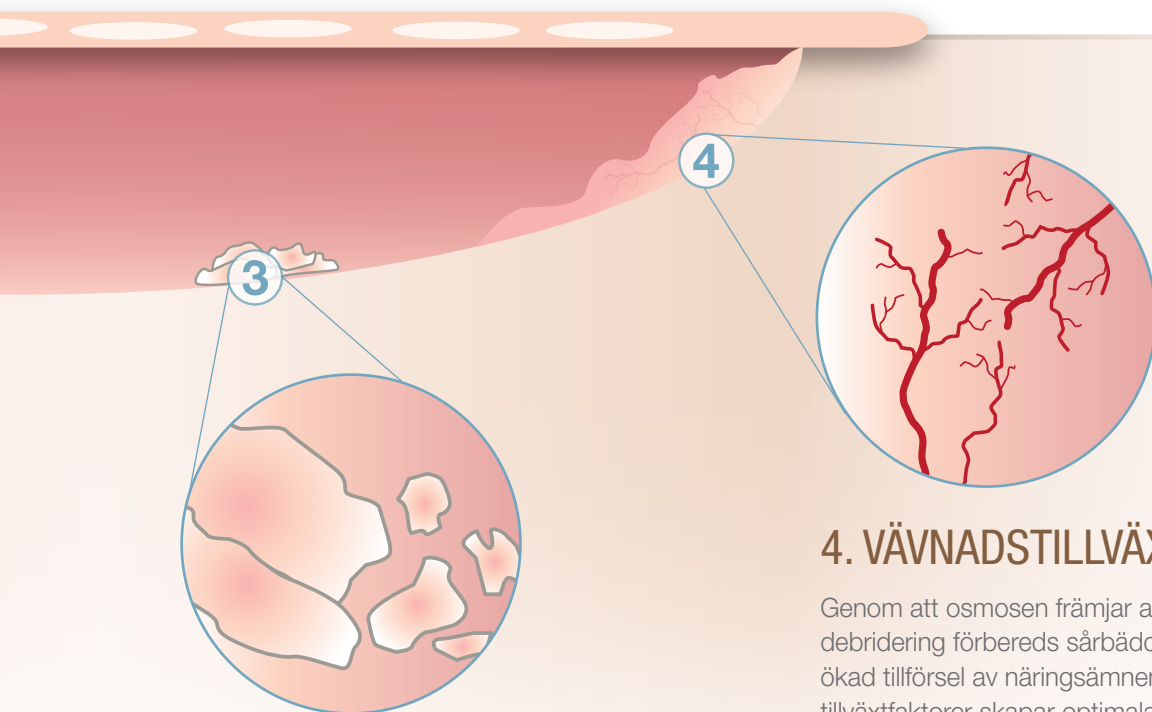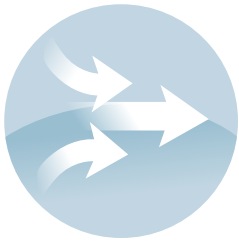

3. AUTOLYTISK DEBRIDERING

Den nya sårvätskan för också med sig enzymer till såret som bidrar till att avlägsna fibrin.

4. VÄVNADSTILLVÄXT


Genom att osmosen främjar autolytisk debridering förbereds sårbädden för läkning. En ökad tillförsel av näringsämnen, enzymer och tillväxtfaktorer skapar optimala förutsättningar för bildandet av ny vävnad.

OPTIMAL FUKTHANTERING

Inget annat förband har samma fina kombination av vätskehantering och fukttilförsel som **Cutimed® HydroControl**. Jämfört med sårforband för lätt till måttligt vätskande sår har **Cutimed® HydroControl** en överlägsen vätskehanteringsförmåga tack vare den innovativa sammansättningen.



Cutimed HydroControl*

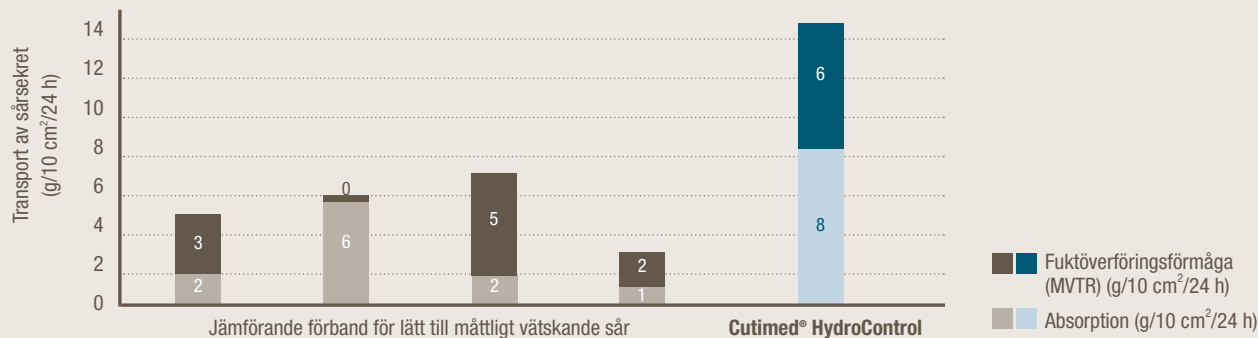

SÄKERT, BÄTTRE, VERTIKALT

Cutimed® HydroControl absorberar vätska vertikalt in i den hydropolymerbaserade gelmatrisen, där den stängs in. Därmed hålls fukten borta från sårkanterna vilket minskar risken för maceration.



Källa: BSN medical data on File. JB4 40022569 - vätskehantering; JB4 40022570 -vertikal absorption.

DEN PERFEKTA FUKTBALANSEN


FRÄMJAR EN FUKTIG SÅRLÄKNING

Kombinationen av den absorberande gelmatrisen av hydropolymer och filmens höga fuktöverföringsförmåga skapar en perfekt fuktbalans i såret. Beroende på de specifika förhållandena tillförs antingen fukt till såret, eller så förångas överskottsvätska genom **Cutimed® HydroControl**-förbandets Flexipores och den översta filmen. En fuktbalans som skapas på det här sättet har en direkt, positiv inverkan på sårläkningen.



KOMFORT PÅ EN HELT NY NIVÅ

Förbandets struktur bidrar till hög komfort, som säkerställer en god patienttillfredsställelse.

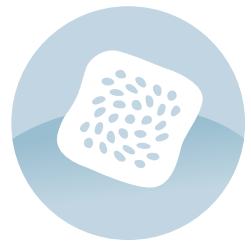

Hög användarkomfort

- Diskret beigefärgat
- Den effektiva och hudvänliga hydropolymer-matrixen säkerställer att förbandet sitter på plats

Förbandet kan klippas till lämplig storlek

- Färre storlekar behövs och förbandet kan anpassas perfekt efter såret

Tunt, formbart och självhäftande

- Enkelt att applicera och säkerställer god vidhäftning, även på besvärliga områden

Fastnar inte i sårbedden

- Skyddar ny granulations- och epitelvävnad

God vätskehanteringsförmåga*

- Säker behandling vid upp till 7 dagars användning

Lämpar sig för användning under kompression

- Kan användas under kompression

*Jämfört med andra sårförband för lätt till måttligt vätskande sår.

CUTIMED® HYDROCONTROL – INNOVATION OCH EFFEKT

Ett fuktbalanserande, absorberande sårförband som bygger på fyra funktioner.

- Mycket god hantering av sårvätska
- Hög potential för sårstimulering
- Optimal fuktbalans
- Innovativ produktdesign



Användningsområden

Cutimed® HydroControl indikeras för torra till måttligt vätskande, ytliga, kroniska och sekundärläkande sår, t.ex.

- Venösa eller arteriella bensår
- Trycksår
- Diabetiska fotsår

Cutimed® HydroControl kan användas under kompression.



Cutimed® HydroControl

Art nr	Storlek	Antal avdfp	Antal avdfp/trp
73231-00	4,5 x 4,5 cm	10	30
73231-01	7,5 x 7,5 cm	10	30
73231-02	10 x 10 cm	10	10
73231-03	15 x 15 cm	5	10

Experttips

Fråga: Kan patienten duscha med **Cutimed® HydroControl**?

Svar: Om patienten vill duscha medan **Cutimed® HydroControl** används rekommenderar vi att man fönstertejpar med en vattentät, självhäftande film (t.ex. **Fixomull® transparent**) som förseglar förbandets kanter.

Fixomull® transparent

Ref nr	Storlek	Antal per förpackning	Rullar per fpk/trp
72217-02	10 cm x 2 m	1	1/12
72216-00	5 cm x 10 m	1	1/12
72216-01	10 cm x 10 m	1	1/12
72216-02	15 cm x 10 m	1	1/12

INTEGRERADE BEHANDLINGSLÖSNINGAR

BSN medical förenar ett brett produktsortiment inom lymfologi, ortopedi och sårvård/kompressionsbehandling med ett starkt tekniskt kunnande som uppfyller marknadens krav på minskad komplexitet och mer effektiva behandlingar. Genom att ständigt vidareutveckla våra heltäckande **integrerade behandlingslösningar**, tillhandahåller BSN medical produkter för en **sammanhängande vårdkedja**.

SÅRVÅRD/KOMPRESSION

LYMFÖDEM

KRONISK VENÖS SJUKDOM

POSTOPERATIV SÅRBEHANDLING

ORTOPEDI

FOTLESDISTORSION

FOT- OCH HANDELSFRAKTURER

BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · 427 40 Billdal
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se

