

# Produktfaktablad TENA Slip

## Användningsområde

TENA Slip är ett mycket läckagesäkert och komfortabelt allt-i-ett skydd för medelstora till mycket stora urinläckage. Skyddet finns i fyra absorptionsnivåer (Plus, Super, Maxi och Ultima) och tillåter individanpassning tack vare ett stort antal storlekar.



### Enkel att hantera

Med kombinerad tejp och kardborre som underlättar fixering och gör att skyddet enkelt kan justeras och återförslutas

Midjeelastik för en säker passform

Spridningskiktet FeelDry™ kapslar snabbt in urin och håller huden torr

Stabil och mjuk benelastik för god och säker passform

Läckagebarriär för hög säkerhet

Diskret våtindikator

Mjuka, textilliknande andningsbara material i hela produkten

Odour Neutralizer för neutraliserande effekt på oönskad lukt



Anpassad för användning tillsammans med TENA SmartCare Change Indicator

# Produktfaktablad TENA Slip

## Produktegenskaper

TENA Slip är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Vätskeavvisande läckagebarriärer, midjeelastik bak och hög elasticitet runt benen hjälper till att förhindra läckage.

TENA Slip är ett mycket komfortabelt och hudvänligt skydd. Textilliknande material runt hela produkten och sidopaneler helt i non-woven.

Skyddet har Odour Neutralizer, d v s är försett med superabsorbenter som kapslar in urin och har en neutraliserande effekt på oönskad lukt. Det textilliknande materialet gör skyddet prasselritt.


Enkel hantering med kombinerad tejp och kardborre underlättar fixering och gör att skyddet enkelt att justera och återförsluta. Våtindikator och tydlig färgmarkering (visar absorptionsnivå) finns för hjälp vid val av rätt produkt.



## TENA Slip

Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Midja/höft cm	Längd cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal/kart pall	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Praktisk absorption	Essity Art.nr
<b>Plus</b>										
X-small		50-75	62	66	30	90	20	1390	463	71 04 30
Small	✓	55-85	71	71	30	90	16	1460	487	71 21 31
Medium	✓	70-120	82	93	30	90	16	2026	675	71 21 34
Large	✓	90-145	100	110	30	90	12	2487	829	71 21 38
X-Large		120-160	98	125	30	90	12	2468	823	71 10 21
<b>Super</b>										
Small	✓	55-85	71	75	30	90	16	1789	596	71 21 32
Medium	✓	70-120	82	110	28	84	16	2475	825	71 21 35
Large	✓	90-145	100	125	28	84	12	2711	904	71 21 39
X-Large		120-160	98	148	28	84	12	2950	983	71 10 23
<b>Maxi</b>										
Small	✓	55-85	71	90	24	72	16	2036	679	71 21 33
Medium	✓	70-120	82	133	24	72	16	3181	1060	71 21 36
Large	✓	90-145	100	164	24	66	12	3696	1232	71 21 40
X-Large		120-160	98	168	24	72	12	3926	1309	71 10 26
<b>Ultima</b>										
Medium	✓	70-120	82	155	21	63	16	3472	1157	71 21 37
Large	✓	90-145	100	186	21	63	12	4353	1451	71 21 41
X-Large		120-160	98	194	18	54	12	4488	1496	71 06 22

## Användarinstruktion

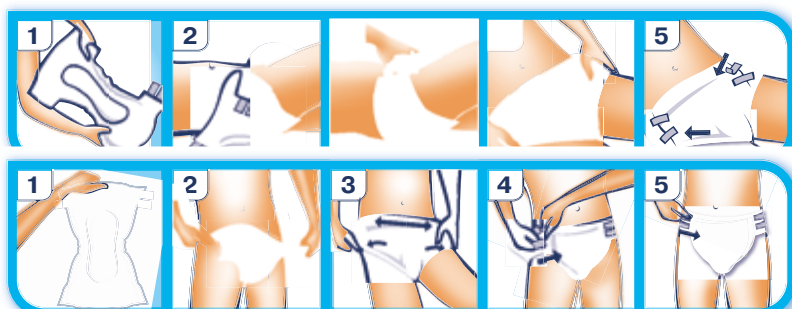

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshantering.

# Produktfaktablad TENA Slip

## Ingående material

### YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

### YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

### INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: Polyethylene

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

### ABSORPTIONSKÄRNA, övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

### ABSORPTIONSKÄRNA, undre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

### SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvättning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

### MIDJEELASTIK

Material: Polyuretan

Funktion: Passform, komfort, läckagesäkerhet

### BENELASTIK

Material: Polyeter och polyuretan

Funktion: Passform och läckagesäkerhet

### BARRIÄRELASTIK

Material: Polyeter och polyuretan

Funktion: Bidra till läckagesäkerhet

För samtliga TENA Slip skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

## Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 [www.tena.nu](http://www.tena.nu)

✉ [tena.nu@essity.com](mailto:tena.nu@essity.com)

📘 [facebook.com/TENASverige](https://facebook.com/TENASverige)