



# DES Special 50

## Ytdesinfektion & rengöring med korrosionsskydd

### Användningsområde

DES Special 50 är en isopropanol (ca 40%) – och etanolbaserad (ca 10%) ytdesinfektion med rengörande verkan och korrosionsskydd, avsedd för kontaminerade ytor och instrument. Används inom tand- och sjukvård, veterinärkliniker, laboratorieverksamhet eller motsvarande områden. Används främst där mikrobiologisk smittspridning skall förhindras. Innehåller rostskydd för känsliga metaller som tex borr mm. Fri från Castor Oil.

### Produktfakta

DES Special 50 är ett ytdesinfektionsmedel med en tillsats av tensid för att få en rengörande effekt samt korrosionsskydd för att undvika rost. Produkten är effektiv mot såväl bakterier som svamp och vissa virus. Innehåller 50 volym% alkohol. Produkten uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel EN13727 och EN13624.

### Art.nr:

Art.nr 17220001

Antal per kartong 12\* 1L

Flaska med sprutkapsyl

### Bruksanvisning

*Ytor:* Spruta ut desinfektionsmedlet på ytan som ska desinficeras och stryk noggrant ut medlet med en torkduk eller luddfritt papper. Produkten avlägsnar mindre mängder spill av blod och saliv. Låt desinfektionsmedlet verka minst 5min. Ytan ska självtorka.

*Metallföremål/instrument:* Föroreningar torkas av och föremålet sänks ner under vätskeytan och blötläggs i 5min. Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden

### Dosering

*Ytor:* Rikligt med produkt så att hela ytan täcks och hålls fuktig under hela inverknings tiden.

*Metallföremål/Instrument:* Så mycket desinfektionsmedel så att hela föremålet täcks.  
Verknings tid ytor / föremål: 5 min

## Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i öppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

## Miljö

Tomma emballage ska sorteras som "förpackning av plast"  
Ej helt tomma emballage ska sorteras som "farligt avfall"

