

## Qorpus Vita Glidlakan -med vätskespär

Glidlakan med låg friktion, vilket underlättar för patienterna att själva röra sig i sängen. Det underlättar också för vårdpersonalen vid vändning eller förflyttning av sängliggande patienter och sparar vårdpersonalens axlar och ryggar.

Glidlakanet har ett vätsketätt spärrskikt som skyddar madrassen vid eventuellt läckage.

Mångårig erfarenhet från vården visar att användning av glidlakan minskar risken för trycksador.

**Bruksanvisning:** Glidlakanet bäddas in med hjälp av bäddflikar.

Bäddflikarna håller glidet på plats. Glidytan bäddas uppåt. Det glider

bra i sidled men bromsas upp av ett strävare material på sidorna,

glidstopp så att patienten inte riskerar att glida ur sängen. Glidstopp är

att glidytan bäddas in med minst 10-12cm från sängens vardera

yterkant. Därmed förhindras att brukaren sätter sig på sängkanten och glider ner på golvet.

1009042



|  |  |         |
|--|--|---------|
| Benämning  | Qorpus Vita Glidlakan -med vätskespär  |         |
| Varumärke  | Qorpus Vita  |         |
| Sanicare art nr                                  | 1009010  | 1009042 |
| Antal produkter/förpackning, st                  | 1  |         |
| Totalyta, cm                                     | 100x200  | 140x200 |
| Liggytan, cm                                     | 100x58   | 140x58  |
| Material liggyta/glidyta                         | 100% Polyester   |         |
| Bäddflikar                                       | 50 % Bomull, 50 % Polyester  |         |
| Spärrskikt                                       | Polyuretan   |         |
| Tvättråd   | 90°C torktumlas på låg värme. Vid avförings- eller blodfläckar bör glidlakanet snarast sköljas i kallt vatten. |         |
| Antal tvättar (hushållstvätt – ej industritvätt) | Ca 200   |         |
| Kasseras   | Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning   |         |
| Förvaring  | Rumstemperatur   |         |
| Övriga information                               | Produkt innehåller inte PVC  |         |



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:  
Sanicare Hjälpmedel AB  
Skreavägen 15  
311 44 Falkenberg



OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med.




sanicare 

## Bruksanvisning och råd vid användning


Glidlakan är ett ergonomiskt hjälpmedel för personer med smärta eller nedsatt rörelseförmåga. Glidlakanet har ett blankt mittparti med mycket låg friktion. Denna glidyta gör det lättare att ändra ställning i sängen – på egen hand eller hjälp av vårdare. Friktionen minskas vid förflyttning i sidled. I den andra riktningen ger glidytans material och utformning en högre friktion. När man använder glidlakan underlättas minsta lägesförändring och det medför att blodförsörjningen ökar till utsatta kroppsdelar.

Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av glidlakan minskar risken för trycksador. Glidlakanet är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal. Belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidytans låga friktion gör att vändning av patient kan utföras på ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten. Glidlakanet lämpar sig mycket väl inom t.ex. sjukhusvård, äldreomsorg, gruppboende och hemvård. Även gravida kvinnor och personer med rygg- eller höftproblem har stor nytta av glidlakan.

## Placering i säng vid olika längder på glidlakanet

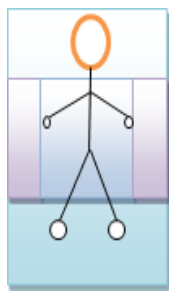

100x200cm  
1009010

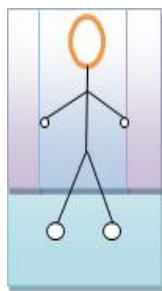

140x200 cm  
1009042

