

# medi 2in1

Glidsockor tillverkas i material med väldigt låg friktion. Detta innebär att kompressionsstrumpan kan tas på med väldigt lite motstånd. Glidsockor är lätta att ta med sig eftersom de kan vikas ihop och tar lite plats.

**medi 2in1** är ett unikt hjälpmedel som fungerar lika bra för både på- och avtagning av såväl arm- som benstrumpor med öppen eller slutna tå. Materialet är mycket slitstarkt med väldigt låg friktion för att underlätta både på- och avtagning av kompressionsstrumpor.

Art.nr.

6900013



## Påtagning av benstrumpa



1. Vik medi 2in1 dubbelt enligt den streckade linjen. Lägg sedan medi 2in1 på golvet med illustrationen av foten uppåt.




2. Placera foten på illustrationen av foten.



3. Stoppa in lite av glidsockans material mellan stortån och pektån. Nyp ihop materialet med tårna.



5. Ta på kompressionsstrumpan. Den låga friktionen gör att strumpan lätt glider över foten.

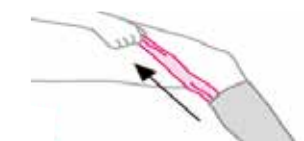

6. När kompressionsstrumpan tagits på fattar du tag i änden på glidsockan. Du drar sedan lätt ut hela hjälpmedlet via kompressionsstrumpans avslut.

## Avtagning av benstrumpa



1. Stoppa in foten med kompressionsstrumpan i fickan som är placerad i hjälpmedlets ena ände.



2. Vik över kompressionsstrumpans avslut över hjälpmedlet.

Hjälpmedlets låga friktion gör att du väldigt lätt kan fortsätta dra av kompressionsstrumpan.