


medi butler off

Med det långa skaftet och det ergonomiskt utformade handtaget krävs mycket lite rörlighet för att ta av kompressionsstrumporna. medi butler off förs ned mellan strumpan och benet och när skaftet på hjälpmedlet trycks ned följer strumpan med.

medi butler off har utvecklats i samarbete med doktorer och ergoterapeuter och passar lika bra för kompressionsstrumpor med öppen och sluten tå i alla storlekar och längder. medi butler off fungerar även utmärkt som skohorn.

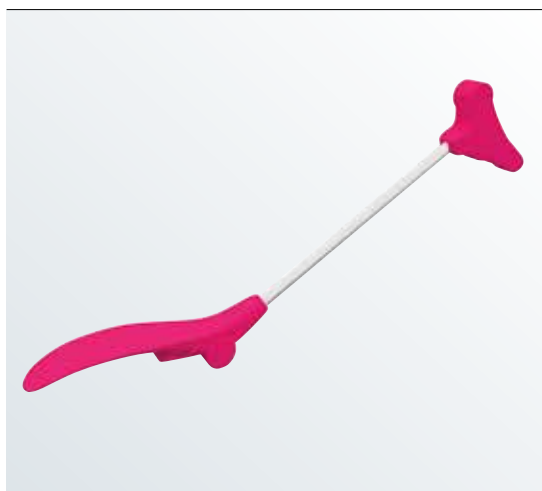

| Storlek | Längd | Art.nr. |
|-----------|-------|---------|
| Universal | 53 cm | 6900362 |



1.
För försiktigt ned
hjälpmedlet mellan
strumpan och benet.



2.
Tryck sedan ned
handtaget. På baksidan
av hornet finns en liten
hake där strumpan
fastnar. När hornet
trycks ned följer
strumpan med.



3.
Fortsätt att trycka ned
hjälpmedlet tills ni når
hälen. Vinkla sedan
hornet lätt nedåt för att
kunna fortsätta längs
med foten.



4.
När ni passerat hälen är
det bara att fortsätta
till strumpan tagits av
helt.