

# Produktfaktablad TENA Men Premium Fit Maxi

## Användningsområde

TENA Men Premium Fit Maxi är en absorberande engångskalsong som ser ut, känns och används som vanliga kalsonger. Skyddet är speciellt framtaget för män med medelstora urinläckage.



## Produktegenskaper

TENA Men Premium Fit Maxi har dubbla kärnor med superabsorbenter som snabbt absorberar, sprider och lagrar urin inne i skyddet. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Absorptionskärnorna är anpassade för att ge maximal säkerhet för män genom extra uppsugning i frontzonen där den bäst behövs. Ben- och grenelastik sluter tätt i ljumskarna och ger ytterligare säkerhet.

Skyddet är gjort av ett mjukt bomullsliknande elastiskt material som ger en unik bekväm passform då det följer kroppens form och rörelser. Designen är maskulin, vit med grå ränder och grå linning.

TENA Men Premium Fit Maxi har Odour Control™ som hjälper till att förhindra oönskad lukt. Produkten finns i storlekarna Small/Medium och Large/X-Large. Skyddet tas på och av som vanliga underkläder. Sidosömmarna går att riva.




**TENA. HÅLLBAR INDIVIDUELL INKONTINENSVÅRD.**

# Produktfaktablad TENA Men Premium Fit Maxi

TENA Men Premium Fit Maxi									
Uppsugningsnivå/ storlek	Höftmått cm	Ben- öppning cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal kart/ halvpall	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Small/Medium	75-100	45-70	67	12	48	24	470	1409	79 83 12
Large/Extra Large	95-125	55-80	70	10	40	32	463	1388	79 83 10




Säker absorptionszon som effektivt läser in läckage

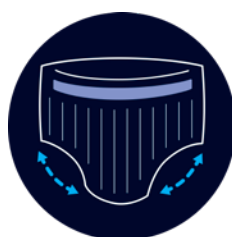

Maskulin och diskret



Skyddar mot läckage, lukt och fukt

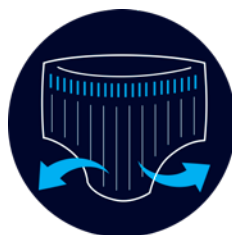

Säker passform med stretchmaterial

## Användarinstruktion

TENA Men Premium Fit Maxi tas på och av som vanliga kalsonger. Sidosömmarna är rivbara. Rulla ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.



# Produktfaktablad TENA Men Premium Fit Maxi

## Ingående material

### YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Håller huden torr, mjukhet

### INSLÄPPSMATERIAL

Material: Polypropylen/polyester

Funktion: Snabbt insläpp av urin och motverka att vätska tränger tillbaka upp till ytan

### ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska

### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

### MIDJEELASTIK

Material: Polyuretan-trådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och kropps nära passform

### GRENELASTIK

Material: Syntetiska elastiktrådar

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

### BARRIÄRELASTIK

Material: Hydrofob non-woven med Spandex-trådar

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

### SPÄRRSKIKT

Material: Polyetenfilm

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning

För samtliga TENA Men skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsatts produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

## Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 [www.tena.nu](http://www.tena.nu)

✉ [tena.nu@essity.com](mailto:tena.nu@essity.com)

📘 [facebook.com/TENASverige](https://facebook.com/TENASverige)



TENA  
an Essity brand