

# Cutimed® Siltec®

Perfekt balans för olika nivåer

**Exsudat-  
hantering**  
kräver stark  
support



**Cutimed®**

# Cutimed Siltec

## Perfekt samarbete mellan olika komponenter

En väl avvägd kombination av olika material gör Cutimed Siltec till ett polyuretanskumförband med hög kapacitet som ger en prestanda du kan lita på.

Förbandet är utformat för att ge utmärkt vätskehantering, samtidigt som den innovativa designen erbjuder patienterna viktiga fördelar för ökad livskvalitet och följsamhet till behandlingen.



Effektiv hantering av sårvätska tack vare vertikal absorption av olika typer och mängder sårvätska.



Tillförlitlig vidhäftning tack vare den heltäckande silikonbeläggningen.



Anatomisk form som anpassar sig efter kroppens konturer och för bästa komfort.

## Indikationer\*

Cutimed Siltec är utformad för att anpassa sig till sår med liten, måttlig eller riklig mängd sårvätska med varierande grad av viskositet, inklusive mycket hög.



Venösa eller arteriella sår



Trycksår



Fotsår hos diabetiker



Hudtransplantat



Tagställen för hudtransplantation

\* För ytterligare indikationer, se bruksanvisning

# Polyuretanfilm

## Hög förmåga att andas



Cutimed Siltec ger tillförlitliga resultat oberoende av mängden sårvätska eller grad av viskositet. Polyuretanfilmen anpassar avdunstningen i takt med mättnadsgraden. Detta skyddar sårbädden från överskottsfukt samt säkerställer en optimal läkningsmiljö, även då vätskenivåerna ändras eller om vätskan har hög viskositet.



Säkerställer en relevant avdunstning oberoende av förbandets mättnadsgrad.

- Anpassar MVTR\* i takt med förändrade vätskenivåer
- Förhindrar läckage
- Underlättar att se mättnadsgraden
- Förhindrar onödiga förbandsbyten
- Duschbart<sup>1</sup> och vattenavvisande<sup>1, 2</sup>

1 Cutimed Siltec med häftkant  
2 Cutimed Siltec utan häftkant


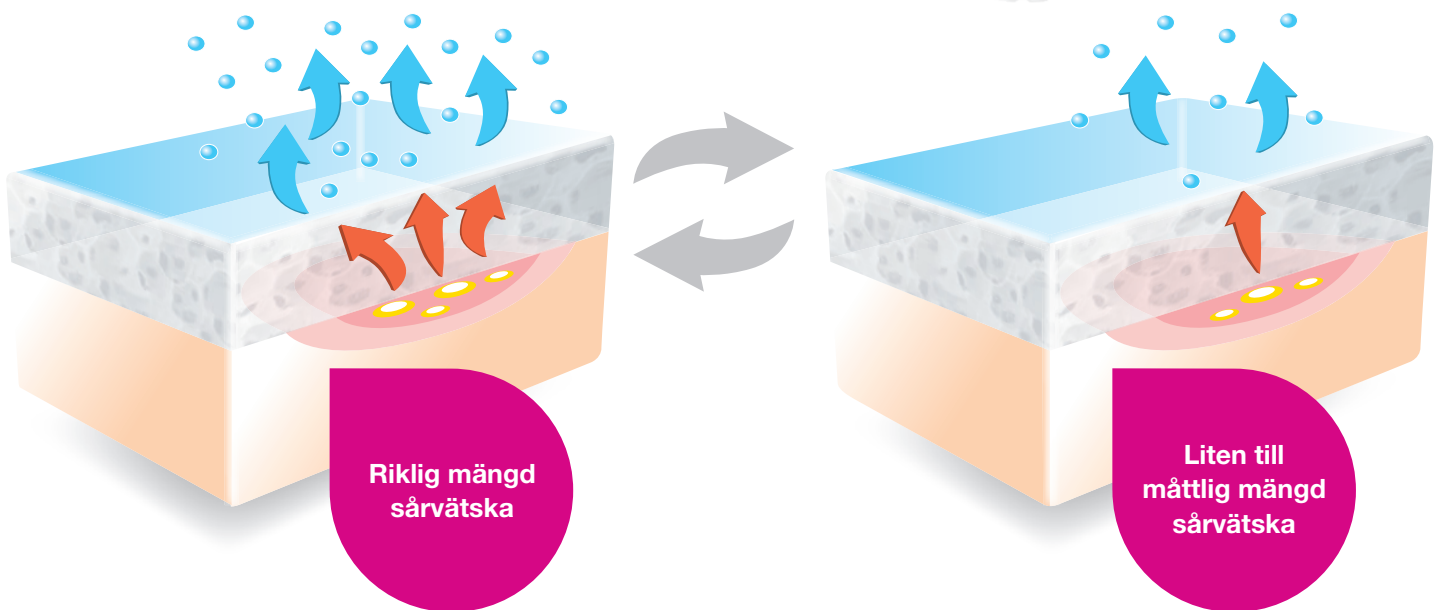
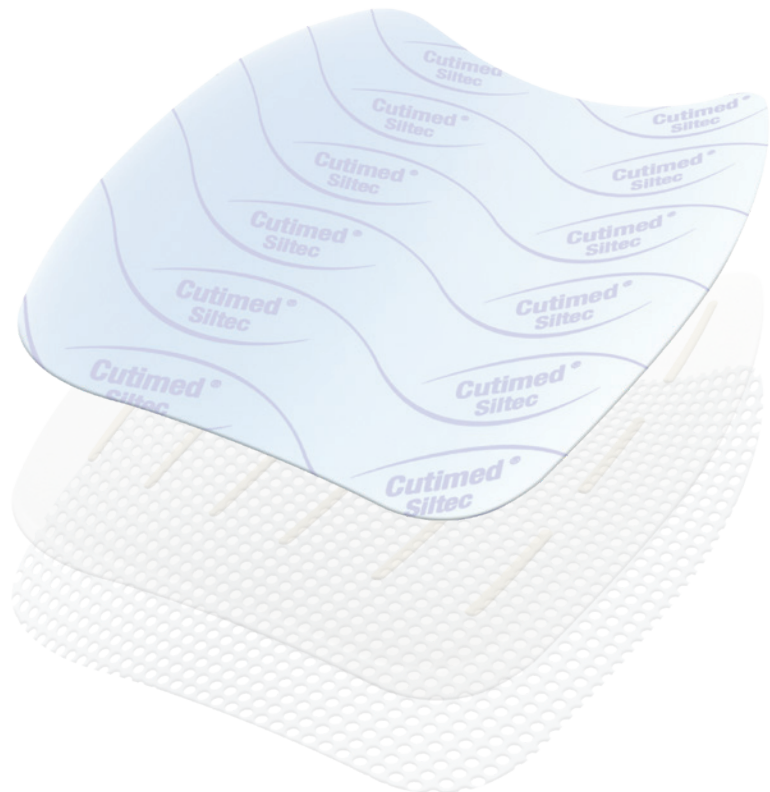


# Superabsorbenter


## Absorberar och binder sårvätska

Tack vare teknologin med superabsorbenter binds sårvätskan på ett säkert sätt även under kompression vilket minskar risken för läckage och maceration.

- Tillförlitlig absorption vid lite, måttlig och riklig mängd sårvätska
- Binder sårvätskan effektivt, även under kompression
- Anpassar sig till förändrade vätskenivåer
- Superabsorbenterna är sammansmälta med polyuretanskummet vilket gör förbandet klippbart
- Färre förbandsbyten

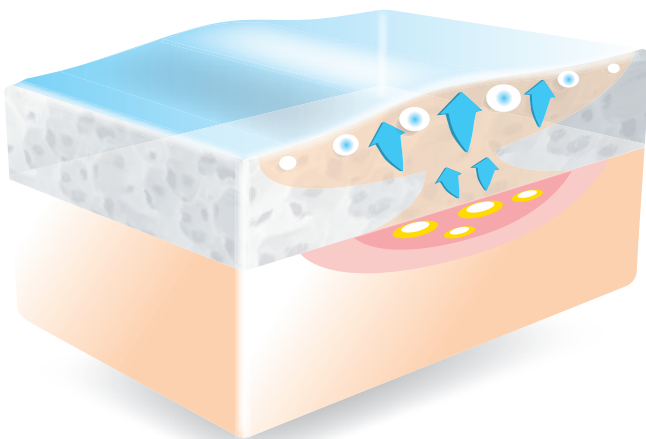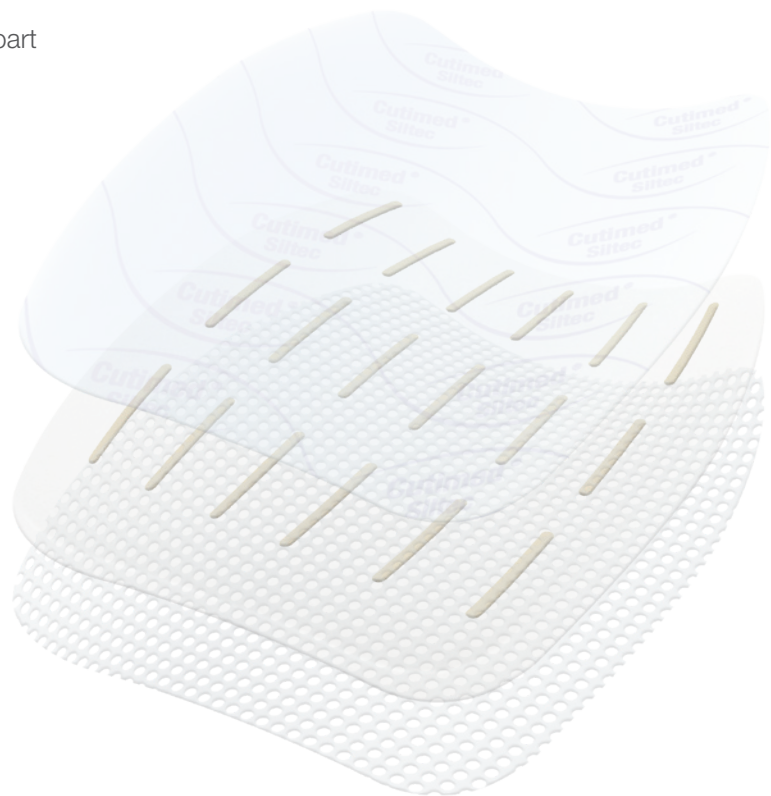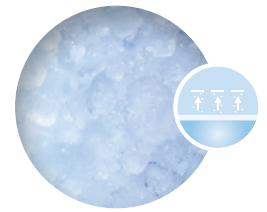



# Intelligent skum

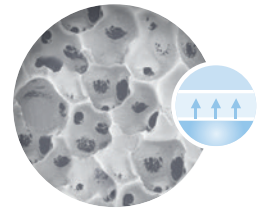


## Drar snabbt upp vätskan till skumkärnans övre del

Skummets struktur hos Cutimed Siltec säkerställer effektiv, vertikal absorption utan att såret torkar ut, vilket resulterar i en säker behandling. Förbandet har en mycket god egenskap att absorbera sårvätska med hög viskositet. Det är resultatet av silikonlagrets perforering samt skumkärnans stora porer.

- Säkerställer effektiv, vertikal absorption och skyddar huden mot maceration
- Absorberar vätska från låg till mycket hög viskositet

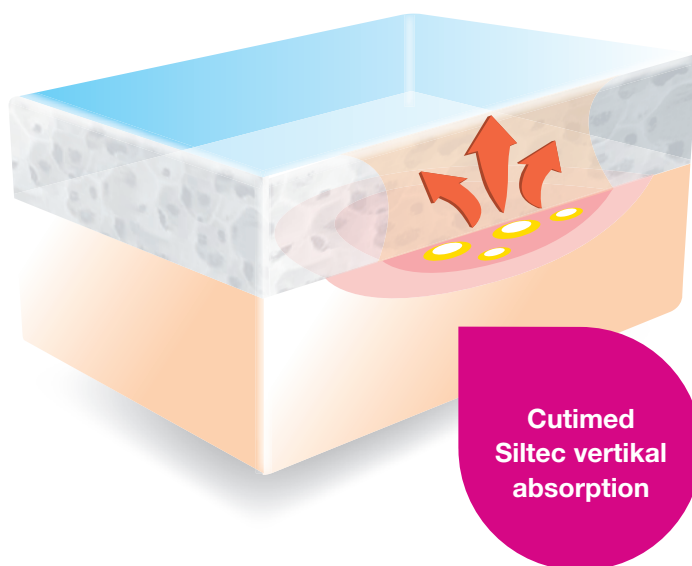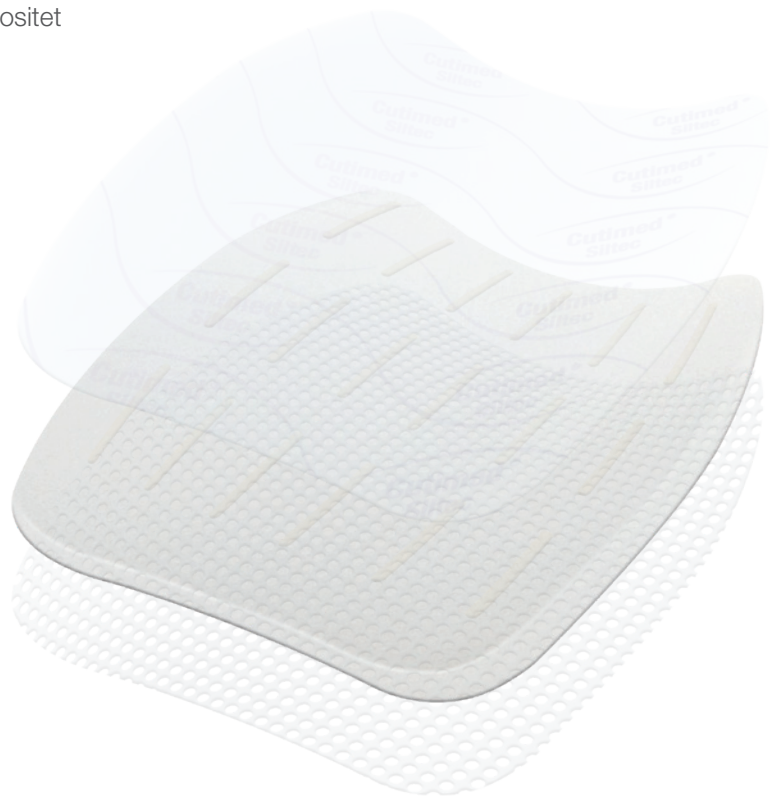



# Perforerat sårkontakt-lager av silikon

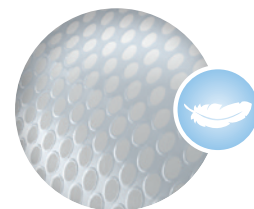

## Skonsam vidhäftning

Det perforerade vidhäftande silikonlagret tillåter vätskeöverföring samtidigt som det utgör en effektiv barriär mot vävnadsinväxt i skumkärnan vilket skyddar den nybildade, epiteliserade vävnaden.

- Sårvätskan passerar enkelt igenom, oberoende av grad av viskositet
- Skonsam vidhäftning
- Atraumatiska och mindre smärtsamma förbandsbyten för patienten

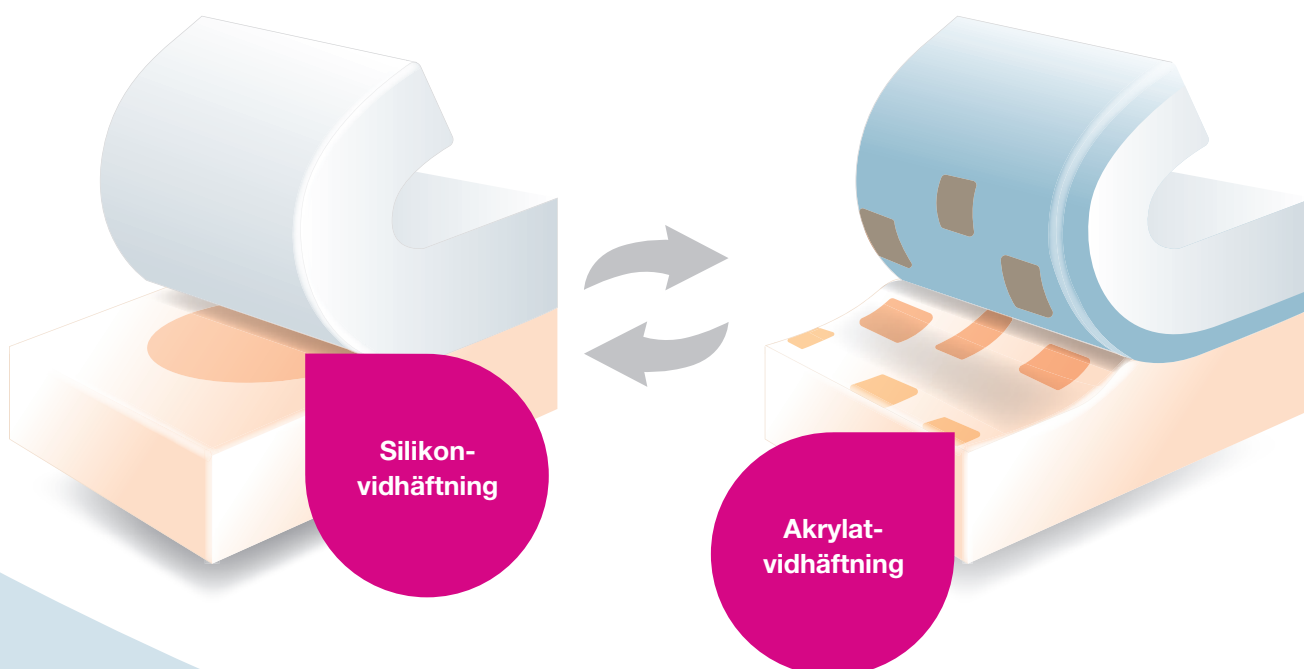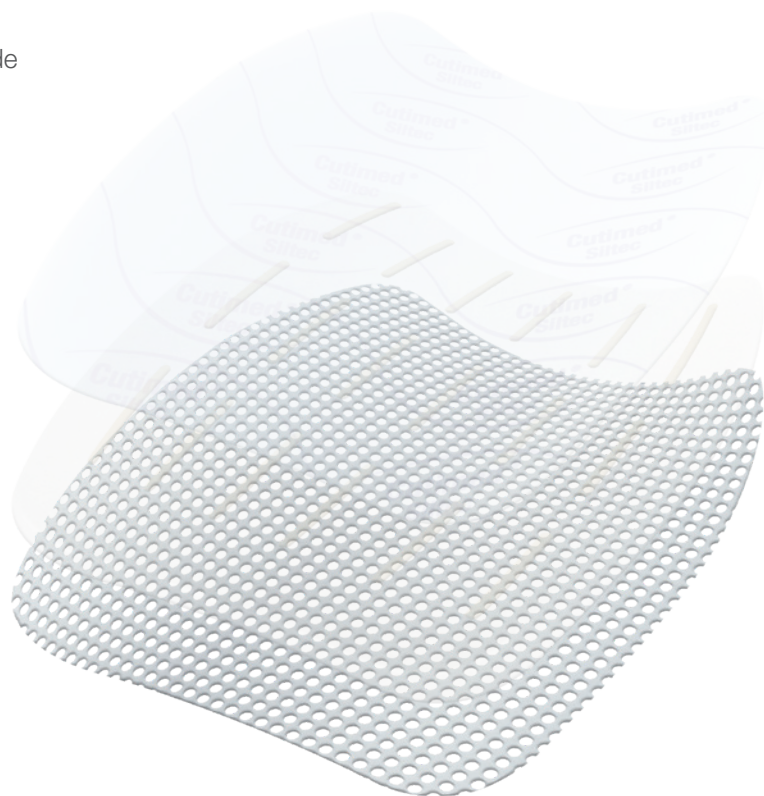

# Perfekt samarbete mellan olika komponenter



## Polyuretanfilm med hög förmåga att andas

- Dynamisk exsudathantering, perfekt kombination av absorption och vaporisering
- Barriär mot bakterier





## Anatomisk design

- Anatomisk form som anpassar sig efter kroppens konturer och för bästa komfort



## Klippbar

- Patientanpassad användning

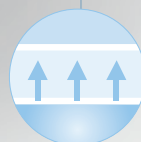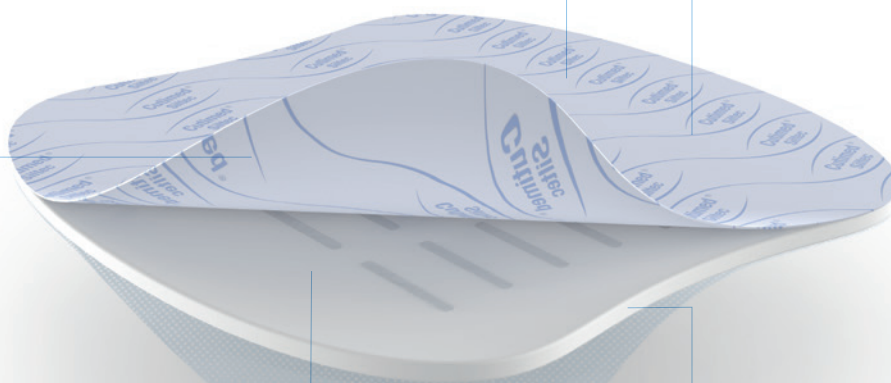

## Intelligent skum

- Säkerställer effektiv, vertikal absorption och skyddar huden mot maceration
- Hög absorption av olika typer av sårvätska



## Teknologi med superabsorbenter

- Binder sårvätskan tack vare extra absorption och förmåga att hålla kvar vätskan
- Lämpar sig mycket väl för användning under kompression



## Skonsamt sårkontakt-lager av silikon

- Skyddar nybildad vävnad
- Säkerställer atraumatiska förbandsbyten



# Flexibel applicering

## Anatomiskt anpassade former

Förband måste passa de unika, vanligtvis oregelbundna formerna på olika sår, följa kroppens konturer och tillåta en viss grad av kroppsrörelse. Samtidigt måste förbandet ha en nära kontakt med sårbädden för att skapa en optimal läkningsmiljö.


Den mjuka och smidiga följsamheten säkerställer att förbandet anpassar sig till olika kroppskonturer. Den anatomiska formen och rundade hörn gör att förbandet sitter bra oavsett var det appliceras.





# Cutimed Siltec

Olika sår kräver olika lösningar

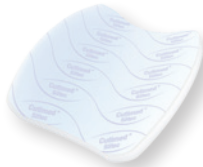


## Cutimed Siltec

### Skonsam

Superabsorberande skumförband i silikon med lätt vidhäftning.

- Perfekt för känslig hud, exempelvis tunn eller kortisonbehandlad hud

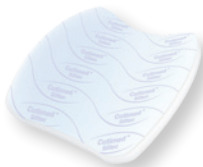


## Cutimed Siltec PLUS

### Supporterande

Superabsorberande skumförband med silikon och starkare initial vidhäftning.

- Enkel applicering tack vare starkare vidhäftning

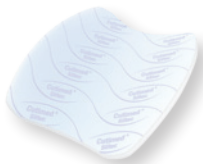

## Cutimed Siltec L

### Tunn

Tunt, superabsorberande skumförband med silikon och skonsam vidhäftning.

- Lämpligt för lätt till måttligt vätskande sår på ställen som är lite svårare att lägga om, exempelvis i hudveck under bröstet eller i ljumsken



## Cutimed Siltec B

### Pålitlig

Superabsorberande skumförband med silikon och häftkant.

- Säker vidhäftning
- Enkel, kan omplaceras
- Duschbar



# Cutimed Siltec

## Specialformer



### Cutimed Siltec B Oval

Superabsorberande skumförband med silikon och häftkant, oval.

- Säker vidhäftning
- Oval form anpassar sig perfekt till ojämna kroppskonturer
- Duschbar



### Cutimed Siltec PLUS Heel 2D

Superabsorberande skumförband med silikon och starkare initial vidhäftning, för hälsår.

- Enklare applicering tack vare starkare initial vidhäftning
- Särskilt lämpligt för svåråtkomliga sår
- Extra tjockt skum (7 mm) ger tryckdämpande effekt



### Cutimed Siltec Heel 3D

Superabsorberande skumförband med silikon, anatomiskt utformad för hälsår.

- Anatomiskt utformad för snabb och enkel applicering
- Extra tjockt skum (7 mm) ger tryckdämpande effekt
- Två extra fästremmar medföljer



### Cutimed Siltec Sacrum

Superabsorberande skumförband med silikon och häftkant, för sår i sacrumområdet.

- Anatomiskt format förband med extra bred vidhäftande silikonkant
- Tryckdämpande effekt
- Duschbar



# Cutimed Siltec – Översikt

	Storlek sårdyna	Storlek	Art nr.	Antal/fp	Antal/trp	
<b>Cutimed Siltec</b> Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och mycket skonsam vidhäftning 		5 x 6 cm	73285-00	10	100	
		10 x 10 cm	73285-01	10	100	
		10 x 20 cm	73285-02	10	100	
		15 x 15 cm	73285-03	10	100	
		20 x 20 cm	73285-04	5	50	
<b>Cutimed Siltec Plus</b> Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon med starkare initial vidhäftning 		5 x 6 cm	73288-00	10	100	
		10 x 10 cm	73288-01	10	100	
		10 x 20 cm	73288-02	10	100	
		15 x 15 cm	73288-03	10	100	
		20 x 20 cm	73288-04	5	50	
<b>Cutimed Siltec L (Light)</b> Superabsorberande skumförband i polyuretan med låg profil och sårkontaktlager i silikon. Mycket skonsam vidhäftning 		5 x 6 cm	73283-00	10	100	
		10 x 10 cm	73283-01	10	100	
		15 x 15 cm	73283-02	10	100	
<b>Cutimed Siltec B (Border)</b> Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och häftkant med silikon 		4 x 4 cm	7,5 x 7,5 cm	73284-00	10	100
		6 x 6 cm	10 x 10 cm	73284-05	10	100
		5 x 16,5 cm	10 x 22,5 cm	73284-06	10	100
		8,2 x 8,2 cm	12,5 x 12,5 cm	73284-01	10	100
		10 x 10 cm	15 x 15 cm	73284-02	10	100
		12,3 x 12,3 cm	17,5 x 17,5 cm	73284-03	5	50
		16,5 x 16,5 cm	22,5 x 22,5 cm	73284-04	5	50
<b>Specialformer</b>						
<b>Cutimed Siltec B Oval</b> Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och häftkant med silikon, oval 		6,0 x 3,0 cm	10 x 7 cm	73284-14	10	100
		11,6 x 8,6 cm	16 x 13 cm	73284-21	5	50
<b>Cutimed Siltec Plus Heel 2D</b> Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon med starkare initial vidhäftning, för hälsår 			16 x 24 cm	73288-05	5	50
<b>Cutimed Siltec Heel 3D</b> Anatomiskt utformat, superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon med mycket skonsam vidhäftning. För hälsår. Två extra fästremor medföljer 			16 x 24 cm	73286-01	5	50
<b>Cutimed Siltec Sacrum</b> Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och häftkant med silikon, för sår i sakrumområdet 		11,6 x 9,7 cm	17,5 x 17,5 cm	73287-00	5	50
		16,6 x 14 cm	23 x 23 cm	73287-01	5	50

Cutimed Siltec lämpar sig för:

#### Sårfaser

-  Fibrinbelagt (smetigt)
-  Granulation
-  Epitelisering

#### Sårvätska

-  Liten till måttlig mängd
-  Måttlig till riklig mängd

#### Sår djup

-  Ytligt

Se bruksanvisning för fullständiga anvisningar om säker användning av denna produkt.

# Cutimed® EXSUDATteam: Tre spelare för optimal sårhäkning

Ett bra behandlingsval banar väg för en framgångsrik sårhäkning. Med **Cutimed®** har du tillförlitliga sårvårdsprodukter till hands för att hantera varje sårfas och olika nivåer av sårvätska.

Hitta en passande produkt för icke-infekterade, vätskande sår:

## EXSUDATNIVÅ

SÅRSTADIER




Fibrinbelagt



Granulerande



Epiteliserande

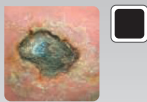

Nekrotiskt

- Autolytisk debridering ger en effektiv upprensning av fibrinbeläggning från såret

- Optimalt fuktigt sårklimat tack vare osmoseffekt
- Hög sårstimuleringspotential stödjer tillväxt av ny vävnad

- Skydd av epitelvävnad

- Autolytisk debridering ger en effektiv upprensning av nekrotisk vävnad



Den aktiva  
Cutimed® HydroControl

- Perfekt balans mellan absorption och fuktigt sårklimat

- Optimalt fuktigt sårklimat stödjer sårhäkningen
- Vertikal absorption minskar risken för maceration

- Skonsam och mindre smärtsam omläggning tack vare silikonlager



Den mjuka  
Cutimed® Siltec®


- Skonsam debridering minskar fibrinbeläggning på sårytan
- Binder bakterier, inflammationsfaktorer och sårsekret säkert i förbandet

### Cutimed® Sorbion® Sana:

- Optimalt fuktigt sårklimat stödjer sårhäkningen
- Skonsam omläggning



Den starka  
Cutimed® Sorbion®

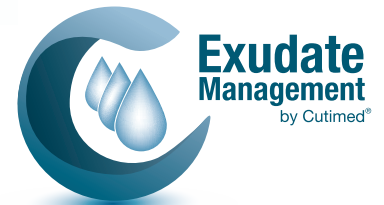

Cutimed® exsudatteam är indicerat för kroniska sår såsom exempelvis:\*

- Venösa eller arteriella bensår
- Trycksår
- Fotsår hos diabetiker

\* Ytterligare information finns i produkternas bruksanvisning.