

Medihoney™

Manukahonung för naturlig sår- och hudvård

100%
Manukahonung



Ingen användnings- eller tidsbegränsning

Lämplig för barn och vuxna

Säker och naturlig sårvård

Dödar bakterier och minskar lukt

Lämplig för diabetiker och getingallergiker

Effektivt testat även mot biofilm



when outcomes matter

Steripolar

Tel. 018-430 0980

info@steripolar.se

www.steripolar.se

Medihoney™ antibakteriell medicinsk honung och antibakteriell sårgel

Medihoney enpatients tuber är kliniskt effektiva för att skapa en antibakteriell miljö som är effektiv mot ett brett spektrum av bakterier, inklusive antibiotika resistent organismer. Medihoney innehåller 100% antibakteriell medicinsk honung. Den höga osmotiska sammansättningen gör att bakterier, endotoxiner och nekrotiska partiklar dras ur såret och stannar i förbandet.

Antibakteriell medicinsk sårgel

Medihoney sårgel innehåller 80% antibakteriell honung med 20% naturliga vaxer för att ge hög viskositet som är lätt att applicera och att tvätta bort.

100%
Manukahonung

80%
Manukahonung



Natriumalginat

80%
Manukahonung



Medihoney™ Gel Sheet Antibakteriellt gelförband med medicinsk honung

Medihoney Gel Sheet skyddar såret genom att skapa en barriär mot sårpatogener, där antibiotikaresistenta stammar bildas, och minskar risken för infektion. Den osmotiska verkan ger en miljö där sårvätskan stannar i förbandet och minskar bakterier, endotoxiner och smuts vilket ger ett renare sår. Ett gelförband med Manukahonung ger mindre odör, minskad inflammationsrisk, ödem och sårsekret. Granulering och epithelialisation förbättras genom en optimal sårhelingsmiljö. Rekommenderas inte för torra sår.

Kalciumalginat

Medihoney Apinate™ Antibakteriellt alginatförband med medicinsk honung

Medihoney alginatförband är ett icke självhäftande sårförband. Förbandet absorberar sårvätska och bildar en mjuk gel som ger en effektiv antibakteriell barriär och hämmar bakterietillväxt. Användningen av Medihoney alginatförband kan markant minska sårytans pH-värde. Skapandet av en sur miljö kan bidra till att minska proteasaktivitet, öka fibroblasteffekten och öka syrefrigivningen, varvid sårhelningen påskyndas.

95%
Manukahonung





Medihoney™ tulleförband Antibakteriellt 3-lager förband med medicinsk honung

Ett kraftigt 3-lager tulleförband impregnerat med Manukahonung kan användas på både djupa och ytliga sår. Placera förbandet på sårytan och se till att förbandet är i kontakt med såret. Förbandet kan placeras sida vid sida för att täcka stora områden. Förbandet ska vid behov klippas med steril sax eller vikas så att den passar till formen på såret. Såret kan fyllas med Medihoney antibakteriell medicinsk honung innan tulleförbandet.

Medihoney™ HCS hydrogelförband

Den superabsorberande polymeren i förbandet omvandlas från ett sekret till en gel, vilket gör borttagningen av förbandet smärtfritt. Förbandet lämnar heller inga rester på såret. Det tunna förbandet är bekvämt att bära och är även duschtåligt. Sårsläkning är lätt att följa genom förbandet.



Medihoney™ HCS kirurgisk hydrogelförband

Den antiinflammatoriska effekten av Manukahonung i förbandet minskar postoperativ infektion. Även lämplig till för tidigt födda barn och pediatrika patienter.

Kirurgiskt förband

Medihoney™ barriärkräm

Medihoney barriärkräm hjälper till att behålla hudens barriäregenskaper och upprätthålla hudens fuktighet och pH-värde. Barriärkräm används på intakt och utsatt hud för att skydda mot vätska och fukt. Kan appliceras runt sår, hudveck och under inkontinensskydd där en skyddande barriär förhindrar hudskador.

Medihoney™ dermakräm

Medihoney dermakräm hjälper till att upprätthålla hudens fuktighet och pH-värde. Krämen kan användas på stora hudområden och under kompression eller sårförband för att skydda intakt hud från nedbrytning och irritation på grund av torr hud eller friktion. Applicera på ren och torr hud tre gånger om dagen eller vid behov. Lämplig för användning på barn.



VAD ÄR MANUKAHONUNG?

Honung har använts för sårhäkning i tusentals år och studier¹ av växten Rose Myrtle i Nya Zeeland, dvs manukaväxtens blomma (*Leptospermum* sp.) är det som visats sig producera den unika antibakteriella honungen som är optimal för sårvård.

MEDIHONEY™ -SÅRVÅRDSKIT

Den 100% manukahonungen som används i Medihoneys sårvårdsprodukter renas genom gammasterilisering, som också tar bort eventuella allergiframkallande föroreningar från manukahonungen. Det finns inga dokumenterade allergiska reaktioner på användningen av Medihoney. Medihoneys sårvårdsserie stöds av mer än 200 kliniska studier som bevisar effektiviteten av Manukahonung i sårvård.

ANTIMIKROBIELLA NIVÅER I MEDIHONEY-PRODUKSORTIMENT

MGO
> 355

UMF
12+

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning	Manukahonung (<i>Leptospermum</i> sp.) innehåll
391	Antibakteriell sårgel 10g/tub	20	Manukahonung 8 g
395	Antibakteriell sårgel 20g/tub	5	Manukahonung 16 g
398	Antibakteriell medicinsk honung 20g/tub	5	Manukahonung 20 g
405MH	Antibakteriell medicinsk honung 50g/tub	1	Manukahonung 50 g
582	Barriärkräm tub 50 g	1	Manukahonung 15 g
800	Barriärkräm tub 2 g	20	Manukahonung 0,6 g
795	Antibakteriell Apinateförband 10 x 10 cm	5	Bindande 28,3–31,7g, Manukahonung 27–29,9 g
793	Antibakteriellt Apinateförband 1,9 x 30 cm	5	Bindande 9,6–14,4 g, Manukahonung 9–13,5 g
797	Tulleförband 5 x 5 cm (öppen 5 x 15 cm)	5	Bindande 12-13,5 g, Manukahonung 10,85 g
796	Tulleförband 10 x 10 cm (öppen 10 x 30 cm)	5	Bindande 24,05–27 g, Manukahonung 21,70 g
780	HCS hydrogelförband, 6 x 6 cm	10	Bindande 4,6 g, Manukahonung 2,9 g
781	HCS hydrogelförband, 11 x 11 cm	10	Bindande 16,9 g, Manukahonung 10,7 g
784	HCS hydrogelförband, 20 x 20 cm	5	Bindande 57,0 g, Manukahonung 35,9 g
785	HCS hydrogelförband, 20 x 30 cm	2	Bindande 82 g, Manukahonung 51,7 g
782	HCS hydrogelförband Kant, bindning 11 x 11 cm, sårdyna 7,2 x 7,2 cm	10	Bindande 7,5 g, Manukahonung 4,7 g
783	HCS hydrogelförband Kant, bindning 15 x 15 cm, sårdyna 11,5 x 11,5 cm	10	Bindande 19,6 g, Manukahonung 12,3 g
787	HCS kirurgisk förband, 7,5 x 20 cm, sårdyna 4,5 x 16,5 cm	10	Bindande 8,8 g, Manukahonung 5,5 g
597	Dermakräm tub 50g	1	Manukahonung 15 g

1. Medihoney- Du kan hitta den internationella referenslistan på Medihoneys produktsidor från [//www.integralife.com](http://www.integralife.com)

when outcomes matter

Steripolar

Tel. 018-430 0980

info@steripolar.se

www.steripolar.se