

Celltork/spartork torr



Ingående delar/material

Tork: Cellulosa 5 x 5 cm (12 lager)
Utvikt mått: 2 ark á 10 x 16 cm

Vikt

28g/m²

Färg

Vit, utan optiskt blekmedel

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

ask med lock
kartong

Avfallshantering*

kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/AFP	St/TFP	MBA
6060001	300	40 x 300 = 12 000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Rengöring och desinfektion av intakt hud, tillsammans med desinfektionsmedel, inför injektion.
Efter injektion för att stoppa eventuellt blodflöde.

Bruksanvisning




Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att lyfta avdelningsförpackningens lock och ta ur en tork.
2. Använd pincett för att lyfta ut torken.
3. Rengör huden och kassera tork och förpackning enligt instruktion.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745, klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium