

## Oxivir Excel™ CE

Bredspektrigt väteperoxidbaserat Rengörings- & Desinfektionsmedel för icke invasiva medicinska instrument och för ej porösa hårda ytor.

### Produktbeskrivning

Diversey Care Oxivir Excel™ CE är ett högkoncentrerat rengörings- och desinfektionsmedel som har ett brett spektrum mot sjukdomsalstrande bakterier och virus. Produktens sammansättning ger en kort kontakttid. Baserad på Diversey Cares patenterade Accelerated Hydrogen Peroxide (AHP) formulering kan Oxivir Excel™ CE användas på icke invasiva medicinska instrument, hårda, ej porösa ytor och vissa textila möbler.

### Produktegenskaper

- Bakterie-, virus- och jästdödande
- Desinficerar på en så kort tid som 1 minut
- Säker för både användare och ytor
- Effektiv rengöring
- Parfymfri
- Bryts aktivt ner till vatten och syre
- Ingen eftersköljning behövs

### Produktfördelar

Produkten avdödar ett brett spektrum av virus och bakterier och ger den högsta möjliga säkerheten för patienter och personal. Oxivir Excel är testad enligt Europeiska normer och är effektiv mot ett flertal sjukdomsframkallande organismer inklusive *Poliovirus*, *Adenovirus* och *Murin norovirus*. Produkten anses vara effektiv mot alla höljeförsedda virus såsom: HIV, HBV, HVC, *Influenta*, *Vaccinia*- och *Coronavirus*.

- Kort kontakttid som säkerställer att ytan är fuktig under verkningstiden. Utmärkta rengöringsegenskaper, inklusive avkalkning och avlägsnande av kalk, innebär att i de flesta fall utförs rengöring och desinfektion i ett steg.
- Ingen farlig miljöklassificering och inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd produkt, vilket ger en hög säkerhet för användaren. Innehåller inga irriterande ämnen vid inandning av produkten.
- AHP formuleringen är skonsam mot ytmaterial och förlänger därmed materialets livstid.
- Utmärkt att använda för alla högriskområden inom sjukvård såsom operationssal, Intensivvårds- Neonantalintensivvårdsavdelning och patientrum.

### Bruksanvisning

#### Applikation/produkt

Sprayrengöring och desinfektion (brukslösning):



1. Avlägsna lös smuts.
2. Spraya på torkduken och torka ytan eller spraya direkt på ytan som ska rengöras.
3. Säkerställ att ytan förblir fuktad under kontakttiden, låt ytan lufttorka.

Hinkmetod, rengöring och desinfektion (brukslösning):

1. Avlägsna lös smuts.
2. Applicera på ytor med mopp/trasa.
3. Säkerställ att ytan förblir fuktad under kontakttiden, låt ytan lufttorka
4. Byt brukslösning om den är synbart nedsmutsad eller minst var åttonde timme.

**Viktigt:** Använd inte varmt vatten. Blanda inte med andra produkter. Använd inte produkten på ytor känsliga för vatten eller syra.

CE  
0088

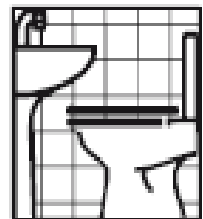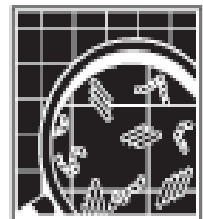

## Teknisk information

Utseende:	Klar, svagt gul vätska
Relativ densitet [20° C]:	1.065
pH brukslösning:	1.9
pH koncentrat:	0.55
Hållbarhet:	2 år i oöppnad behållare
Doft:	Neutral

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om användning och hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvaras i sluten originalförpackning. Undvik extrema temperaturer. Reagerar med oxiderbara ämnen.

## Att beakta

Oxivir Excel™ CE är lämplig att använda på alla tänkbara ytor förutsatt att man följer rekommenderade anvisningar.

## Miljöinformation

Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, EC 648/2004

## Mikrobiologisk information

Oxivir Excel™ CE är godkänd enligt: EN13727, EN13624, EN14476, EN16615

Krav	EN Test	Kontakt tid	Spädning / lösning	ml / 1L vatten
<i>Bakterieavdödande</i>	EN13727	30 sek	2%	20 ml
	EN13697	5 min	1.5%	15 ml
	EN16615	1 min	1%	10 ml
<i>Fungicida-/ jästavdödande</i>	EN13624	5 min	4%	40 ml
	EN13697	5 min	3,5%	35 ml
	EN16616	1 min	1%	10 ml
<i>Virusavdödande</i>	EN1476	5 min	2%	20 ml
		30 sek	4%	40ml

## Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
100941436 Oxivir Excel™ CE	2x5 Liter	Plastdunk