

BRUKSANVISNING

3-delad mjukfiber madrass



Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd.

CE-Märkning

Den 3-delade mjukfiber madrassen är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras ca 1-3 h i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

Introduktion & Användning

COMCO's 3-delade mjukfiber madrass hålls samman av ett fodral och placeras ovanpå en befintlig madrass. Den är lämplig att använda i så väl vård- och omsorgsmiljö som hemmiljö. Varje del i madrassen är fylld med silikoniserad polyesterhålfiber. De glatta fibrernas egenskaper ger en skön känsla, motverkar risken för skjuv och bidrar till att lindra värk och smärta.

Fakta 3-delad mjukfiber madrass

Fyllning: Silikoniserad polyesterhålfiber

Förpackning: Rullpackad i klar plast

Rekommenderad brukarvikt: 0-95 kg

Färg: Vit

Etikett med anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer, storlek, och tillverkningsdatum är placerad på madrassens alla delar.

Storlekar

90x200 cm, artikelnr 3COM090200L

105x200 cm, artikelnr 3COM105200L

120x200 cm, artikelnr 3COM120200L

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål.

Tillbehör

Madrasskydd/Hygienöverdrag finns att beställa som tillbehör till den 3-delade mjukfiber madrassen. Överdraget är ångpermeabelt, men släpper inte igenom fukt/kroppsvätskor. Överdraget tvättas i 90 °C och kan även torktumlas.

Madrasskydd/Hygienöverdrag finns i följande storlekar:

80x200cm, artikelnummer HM-080200

90x200cm, artikelnummer HM-090200

105x200cm, artikelnummer HM-105200

120x200cm, artikelnummer HM-120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål.

Rengöring

Madrasen tvättas i 60°C och kan även torktumlas på låg värme till stryktorr.

Destruering

Såväl madrass som emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelserna är rapporterade till oss. Returering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Garanti

Garanti: 2 år

Övrig information

Madrasen förvaras plant, vikt eller rullpackad. Ska madrassen förvaras under en längre tid rekommenderar vi att madrassen förvaras plant.

Tillverkare

Kontakt

Telefon: 040 45 47 87

E-post: info@comco.se

Webbplats: www.comco.se

Support

Helgfria vardagar 8.00-17.00

Postadress

COMCO AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken

Godsadress

COMCO AB
Radiatorvägen, Port 5-8
283 43 Osby