

COMPAT ELLA® UNIVERSAL SET, COMPAT ELLA® SPIKE SET, COMPAT ELLA® DUAL SPIKE SET

Compat Ella®-aggregaten är avsedda för administrering av enteral näringslösning, vätska eller läkemedel och passar för användning med Compat Ella® sondmatningspump. Aggregaten har en pumpkassett med integrerad, patenterad, säkerhetsfunktion (Auto-Anti-Free-Flow, AAFF) för att garantera patientsäkerheten.

FUNKTIONER I KORTHET

Alla Compat Ella®-aggregat är försedda med EN-Plus-koppling till nutritionsbehållare, ENFit® 3-vägs läkemedelsport samt ENFit® distal ände (för anslutning på patientsidan).

INBYGGD SÄKERHET

Alla Compat Ella®-aggregat är försedda med den patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). AAFF finns inbyggt i kassetten och aktiveras alltid automatiskt för att garantera patientsäkerheten.

SÄKRARE ANSLUTNINGAR

Alla Compat Ella®-aggregat är försedda med ENFit-kopplingar enligt ISO 80369-3. Kopplingarna är utformade för att vara inkompatibla med IV-system för att främja patientsäkerheten.

LIVSMEDELSGODKÄNDA MATERIAL


Alla Compat Ella®-aggregat är DEHP-, BPA- och latexfria*.

Compat Ella Universal Set

Försedd med skruvlock av universaltyp med luftfilter.

KOMPATIBILITET

- Näringsbehållare: ENPlus, vidhalsade glas- och plastbehållare, glasflaskor med kronkork/kapsyl
- Matningsslangar: ENFit™
- För läkemedelstillförsel: ENFit™

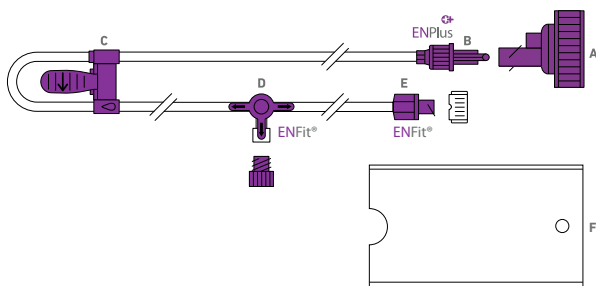


KOMPONENTER

- A** Skruvlock av universaltyp med luftfilter och ENPlus-port för användning med vidhalsade glas- och plastbehållare (DIN 168-1) eller glasflaskor med kronkork/kapsyl (EN 14634 och EN 14635)
- B** Proximal ände (för anslutning till näringsbehållare) av typen ENPlus ("endast enteral") med vridbart lås
- C** Compat Ella® pumpkassett med den inbyggda patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- D** 3-vägs läkemedelsport med ENFit™-koppling och hatt
- E** Distal ände (slanganslutning på patientsidan) av typen ENFit™
- F** Hållare för 500 ml-flaska, LDPE (Low Density Polyeten)

Compat Ella Spike Set

KOMPATIBILITET

- Näringsbehållare: ENPlus
- Matningsslangar: ENFit™
- För läkemedelstillförsel: ENFit™

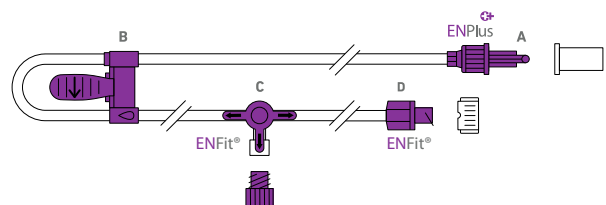

KOMPONENTER


- A** Proximal ände (för anslutning till näringsbehållare) av typen ENPlus ("endast enteral") med vridbart lås och hatt
- B** Compat Ella® pumpkassett med den inbyggda patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- C** 3-vägs läkemedelsport med ENFit™-koppling och hatt
- D** Distal ände (slanganslutning på patientsidan) av typen ENFit™

Compat Ella Dual Spike Set

Avsett för samtidig administrering av enteral nutrition och/eller hydrering via två separata behållare.

KOMPATIBILITET

- Näringsbehållare: ENPlus
- Matningsslangar: ENFit™
- För läkemedelstillförsel: ENFit™

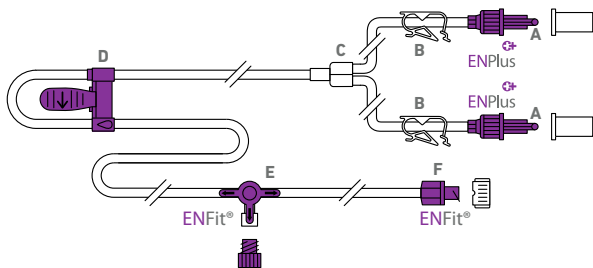

KOMPONENTER

- A** Proximal ände (för koppling till näringsbehållare) av typen ENPlus ("endast enteral") med skruvkork och hatt
- B** Slangklämma för att manuellt stänga av vätskeflödet
- C** Y-valv
- D** Compat Ella® pumpkassett med den inbyggda, patenterade säkerhetsfunktionen AAFF (Auto-Anti-Free-Flow)
- E** 3-vägs läkemedelsport med ENFit™-koppling och hatt
- F** Distal ände (slanganslutning på patientsidan) av typen ENFit™

SPECIFIKATIONER

Sterila: Steriliserade med etylenoxid.

Förpackning: Individuellt förpackade i askar med 30 enheter.

Compat Ella Universal Set (39.5 x 29.5 x 14 cm)

Compat Ella Spike Set (29.5 x 26 x 19 cm)

Compat Ella Dual Spike Set (29.5 x 26 x 19 cm)

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur.

Skyddas från direkt solljus och fukt.

Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum.

Utgångsdatum finns på förpackningen.

Användningstid: 24 timmar. För engångsbruk.

Slangens längd: Avståndet från nutritionskopplingen till sondkopplingen på patientsidan: 230 cm

Avstånd från nutritionskopplingen till pumpen, alla aggregat: 50 cm

Avstånd från nutritionskopplingen till Y-ventilen Compat Ella Dual Spike Set: 30 cm

Slangdiameter: Nominell innerdiameter: 3,0 mm
Nominell ytterdiameter: 4,15 mm

CE-märkning: Följer EU-direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).

Miljöavtryck: "Grüne Punkt"-symbolen visar att Nestlé Health Science tar sitt tillverkaransvar och bidrar till finansieringen av återvinningen.

Material: Slang: PVC och silikon. Alla material är DEHP-, BPA- och latexfria.* Närmare information på begäran.

BESTÄLLNINGAR

Produkterna kan beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

E-post: order@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00

Webbshop:

www.nestlehealthscience.se/webbshop

PRODUKTNAMN	BEST.NR.	ANTAL/ KARTONG
Compat Ella Universal Set	90 04 49	30
Compat Ella Spike Set	90 04 50	30
Compat Ella Dual Spike Set	90 06 03	30

För närmare information, kontakta din representant för Nestlé Health Science eller gå till www.compatella.com

* Delarna innehåller högst 0,1 % totalt DEHP (Di (2-etylhexyl)ftalat). Ingen latex har tillsatts avsiktligt under tillverkningsprocessen.

® Registrerat varumärke som tillhör Société des Produits Nestlé S.A.

För mer information om ENFit® besök www.stayconnected.org