

## MiniMuffs® NEONATALA HÖRSELKYDD

### Använda säkerhetssymboler

Endast för övervakad korttidsanvändning i sjukhusmiljö på prematurfödda spädbarn. Receptbelagt.

#### Symbol

#### Innebörd



Läs medföljande dokumentation



Endast för engångsförbrukning



Satskod/partinummer



Datum för sista användning/förfallodatum

### BRUKSANVISNING:

**Obs!** Följ institutionspraxis för infektionskontroll och hudvård vid rengöring av hud, vid användning av hydrogelhäftplåster på prematurfödda spädbarns hud, samt vid fastställelse av lämplig tidslängd för användning och lämpligt avyttrande.

1. Avlägsna MiniMuffs hörselskydd från skyddspapperet och placera dem på spädbarnet ett i taget. Det spelar ingen roll i vilken riktning de placeras.




**Varning!** Undvik att ytterörat viks eller böjs. Tvinga aldrig in stora öron i hörselskydden. Placera inte hörselskydden på sprucken hud.

2. Tryck försiktigt men stadigt ned hörselskyddens kanter på plats för att säkerställa bra förslutning. Undvik att placera hörselskydden på håriga områden. Tryck inte på hörselskyddets upphöjda mittpunkt.

**Obs!** Ljuddämpningen är beroende av bra förslutning. Kontrollera hörselskyddens förslutning när spädbarnet förflyttas.

3. Minska hydrogelens vidhäftning på känslig hud genom att lätt torka av hydrogelytan med en ren bomullstuss eller kompress innan hörselskyddet placeras på spädbarnet.

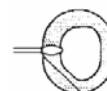

**Varning!** Undersök huden i enlighet med institutionspraxis för hudvård. Ta bort hörselskydden om irritation, skavsår eller ödem uppstår.

4. Var försiktig då hörselskydden avlägsnas. Badda en blöt bomullstuss eller kompress under kanterna på hörselskyddet så att hydrogelen släpper. Håll emot den underliggande huden och lyft försiktigt upp hörselskyddet i kanterna.



Avyttra hörselskydden, som endast är avsedda för engångsbruk, på lämpligt sätt.

### EU-representant:

Natus U.K.  
Hampden House  
Monument Business Park  
Warpsgrove Lane  
Chalgrove, Oxford OX44 7RW