


# Qufora® IrriSedo Mini

För transanal irrigation med låg volym

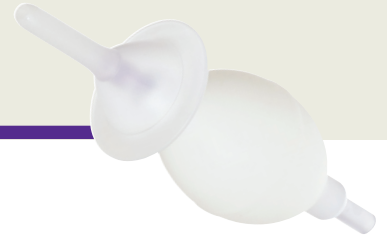

## Användning

Qufora IrriSedo Mini är ett transanalt irrigationssystem avsett för tömning av innehållet i den nedre delen av tjocktarmen. Transanal irrigation (TAI) utförs genom att tillföra vatten i tarmen via ändtarmen med hjälp av en konen.

Konsystem med handpump

## Indikationer

Qufora IrriSedo Mini är indikerad för vuxna samt barn från tre år som lider av avföringsinkontinens, och/eller förstoppning. Till exempel:

- Passiv fekal inkontinens
- Läckage efter defekation
- Ändtarmsbräck
- Ofullständig tömning
- Tömningssvårigheter
- Främre resektionssyndrom (Low anterior resection syndrome, LARS)

I dessa grupper kan vissa personer behöva hjälp av en vårdare för att utföra proceduren.

## Kontraindikationer

Transanal irrigation ska inte användas under följande omständigheter (absoluta kontraindikationer):


- Känd anal eller kolorektal stenosis
- Kolorektal cancer/bäckenmalignitet före kirurgiskt avlägsnande
- Akut inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit
- Inom 3 månader från en anal eller kolorektal operation
- Inom 4 veckor från endoskopisk polypektomi
- Ischemisk kolit

Eftersom listan inte är uttömmande ska sjukvårdspersonal alltid beakta även individuella patientfaktorer.

## Produktkonfigurationer

Typ av irrigationssystem	Beställningskod	Produkt	Innehåll
<b>Qufora® IrriSedo Mini</b> Konsystem med handpump	53601-005	Mini 5 set	1 x handpump, 5 x konor
	53601-015	Mini 15 set	1 x handpump, 15 x konor
	53601-030	Mini 30 set	1 x handpump, 30 x konor
Tillbehör eller förbruksartiklar	52601-015	Rektalkonor	15 x konor
	52715-015	Förlängningsslang	15 x förlängningsslangar

## Qufora IrriSedo Mini

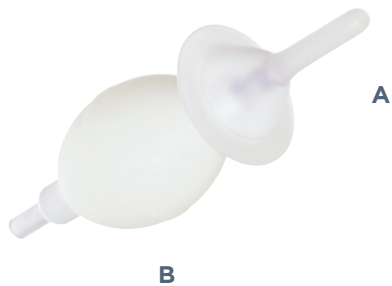

### Produktbeskrivning

- A. Kon för engångsbruk med hydrofil beläggning som aktiveras när den doppas i vatten
- B. Pump

### Produktegenskaper

Den mjuka engångskonen är belagd så att när den doppas i vatten blir ytan smord och konen kan användas direkt

- Konen är enkelförpackad i en påse som kan användas för att fästa och lossa konen hygieniskt, och kan användas som en avfallspåse för den använda konen
- Proceduren kan utföras med bara en hand
- Den manuella pumpen har en backventil som förhindrar återflöde vatten rinner tillbaka i pumpen
- Om lite extra vatten behövs, eller om du föredrar att använda båda händerna, finns ett förlängningsslang för engångsbruk tillgänglig

### Tillbehör

- Koner för engångsbruk
- Förlängningsslang

Kon med hydrofil beläggning  
Engångskonerna är klar att användas när den doppas i vatten



Pump  
Innehåller 90 ml vatten



Förlängningsslang  
Tillbehör för att leverera en ökad vattenvolym (ca 120 ml) och kan underlätta fingerfärdighet



## Materialbeskrivning

Delar	Material	Mjukgörare
Kon		
Genomskinlig kon/belagd	TPE	Inget mjukgörare
Beläggning	PVP	Inget mjukgörare
Pump		
Pump	PVC, ftalatfri	DINCH
Vit NRV-ventil ut och in	Hård PVC	Inget mjukgörare
Nät för ventil	Hård PVC	Inget mjukgörare
Svarta ventilkulor	Nitril	Inget mjukgörare
Slang	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Lila koppling	Hård PVC	Inget mjukgörare
Förlängningsslang		
Förlängningsslang	PVC, phthalate-free	DEHT/DOTP
Lila koppling	Hård PVC	Inget mjukgörare

## Mått och vikt

Mått	Längd	Diameter	Volym
Kon	75 mm	Spetsen har Ø 8 mm	
Pump	170 mm	59 mm	90 ml
Förlängningsslang	60 cm	9,2 mm	

## Rekommenderad användningstid

- Konen är för engångsbruk.
- Pumpen och förlängningsslang kan användas upp till 1 månad.

Om missfärgning skulle uppstå på någon del av systemet inom den rekommenderade användningstiden, ska delen bytas ut.

## Hållbarhet

5 år från produktion.

## Kassering

Qufora IrriSedo Mini kräver inga särskilda avfallsprotokoll och kan kasseras i hushållsavfall.

## Klassificering och sterilisering

Qufora IrriSedo Mini är en produkt av klass I, icke-steril.

## Standarder och föreskrifter

- MDR (Regulation 2017/745) - CE
- UK MDR 2002 - UKCA
- ISO 13485:2016 (certified)