

DryMax Soft

DryMax Soft är ett sterilt, följsamt och superabsorberande förband för vätskande sår. DryMax Soft absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration samtidigt som en fuktig sårhämningsmiljö bibehålls.

Den sömlösa designen förenklar positionering av förbandet på såret. Förbandet har en enkel design med absorption från båda sidor vilket möjliggör felanvändning. Denna egenskap gör även förbandet staplingsbart, så att flera förband kan placeras ovanpå varandra om extra hög absorptionskapacitet skulle krävas.


Förbandet känns torrt och behagligt för patienteten samtidigt som det bidrar till en fuktig sårhämningsmiljö. Den hydrofila kontaktytan transporterar effektivt vätskan bort från såret och fördelar den jämnt in i förbandets kärna, som bygger på DryMax technology.

Förbandets supertunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla platser på kroppen. DryMax Soft är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.


Applikationsguide



Förbandet placeras i nära kontakt med såret eller i kontakt med ett annat förband.

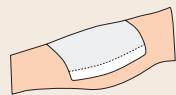

Fixera förbandet på lämpligt sätt med bandagelinda, film eller tejp.

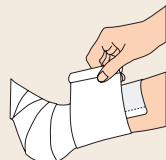

DryMax Soft kan användas tillsammans med kompressionsbehandling.

Artikel	Förbandsstl i cm	REF	Ant/fp	Absorptionskapacitet*
DryMax Soft	7.5x7.5	F60011/10	10	60 ml
DryMax Soft	10x10	F60013/10	10	130 ml
DryMax Soft	10x15	F60012/10	10	230 ml
DryMax Soft	12,5x12,5	F60123/10	10	220 ml
DryMax Soft	10x20	F60015/10	10	330 ml
DryMax Soft	15x20	F60014/10	10	400 ml
DryMax Soft	20x20	F60016/10	10	600 ml
DryMax Soft	20x25	F60018/10	10	780 ml
DryMax Soft	20x30	F60017/10	10	960 ml
DryMax Soft	37x56	F60019/10	10	3000 ml

Medelvärde för free swell absorptionskapacitet* för DryMax Soft är 1.8 ml per cm² av produktkärnan.

*Enligt internationell standard EN 13726



- **Kostnadseffektiv**
- **Användarvänlig**
- **Ökad patientkomfort**
- **Förbättrad sårhäkning***

*Jämfört med konventionella sårförband



DryMax® technology