

SILENT KNIGHT® Tablettkrossare



Den populära tablettkrossaren SILENT KNIGHT® är nu tillgänglig i Skandinavien.

Fördelar med SILENT KNIGHT®

- Tyst och snabb tablettkrossare
- Ergonomiskt handtag som passar alla handstorlekar
- Effektiv och kraftfull – krossar tabletter på några sekunder
- Minimal risk för korskontaminering av läkemedel tack vare **SILENT KNIGHT®** tablettpåsar
- Maximalt resultat med minimal ansträngning

Tre enkla steg för att börja använda SILENT KNIGHT®



1. Placera tablett(er) i Silent Knight Tablettpåse. Lyft handtaget och placera tablettpåsen mellan tablettkrossarens plattor för att börja krossa. Tablettpåsen ska vara längst ner.



2. Tryck ner handtaget för att krossa tabletterna. Lyft sedan upp handtaget helt och tablettpåsen halvvägs.



3. Tryck därefter ner handtaget för att aktivera finmalning av tabletter. Tryck ner handtaget flera gånger för att mala tabletterna till pulver. Ta sedan upp tablettpåsen när önskat resultat är uppfyllt.

Art.nr	Beskrivning	Förpackning
MF1000242	SILENT KNIGHT® Tablettkrossare	st
MF1000243	SILENT KNIGHT® Tablettpåsar	50/1000st