

Runda kanter och en ergonomisk form för god överensstämmelse med såret.

Bredare kanter för hög bärkomfort.

Blått spärrskikt skyddar kläder och lakan.

Absorberande kärna med fördelningsskikt (ny Superabsorber) för effektiv exsudathantering.

Vitt, smidigt sårkontaktlager av polyeten för bekväma och atraumatiska förbandsbyten.

Vliwasorb® Pro

Effektivt exsudathantering med hög grad av komfort och flexibilitet

Egenskaper:

- ✓ Mjukt, **elastiskt** och mycket flexibelt superabsorberande sårförband med superabsorbenten inkapslad i cellulosa.
- ✓ Förbandet har en mycket god retentionsförmåga även under kompressionsbehandling.
- ✓ Binder höga volymer vätska inklusive bakterier vid behandling av kraftigt vätskande sår, vilket minskar risken för maceration.
- ✓ Glesare förbandsbyten leder till längre vilofaser.
- ✓ Har ett spärrskikt för att förhindra läckage mot kläder, sänglinne
- ✓ Förbandet är lätt att applicera.
- ✓ Har en mycket hög absorptionsförmåga och kan hantera stora mängder sårexsudat.
- ✓ Mycket hög patientkomfort

Indikationer:

Vliwasorb® Pro används för vård av akuta och kroniska sår som är måttligt till kraftigt vätskande, såsom:

- ✓ Trycksår, arteriella sår, venösa bensår, diabetessår.
- ✓ Postoperativa och sekundärläkande sår.
- ✓ Post-traumatiska sår
- ✓ Tagställen för delhud
- ✓ Onkologiska sår
- ✓ Ulcererande sår
- ✓ Sår som löper risk att infekteras
- ✓ Ytliga andra gradens brännskador
- ✓ Som ytterförband t.ex. på laparotomisår och på fistlar
- ✓ Används som superabsorberande kompress att lägga som primärförband.
- ✓ Används också som sekundärförband för kraftigt vätskande sår i kombination med en lämplig sårutfyllare t.ex. alginaatförband Suprasorb A eller fiberförband Suprasorb Liquacel, för att täcka djupa sår.
- ✓ Kan användas vid kompressionsbehandling.

Kontraindikationer:

Känd överkänslighet mot produkten eller dess beståndsdelar. Används inte i tunnelbildande sår fickor eftersom produkten kan tänjas ut mycket när den tar upp exsudat från såret. Får ej användas på torra sår.

Omlägningsfrekvens:


- ✓ Omlägningsfrekvens av Vliwasorb® Pro högabsorberande sårförband avgörs av ansvarig läkare, sköterska, beroende på sårets tillstånd (mängden exsudat m m). Intervallet mellan förbandsbytena får inte överskrida 7 dagar.

Material:


- ✓ Polyeten, polypropen, cellulosa, polyetentereftalat, etylen-vinylacetat-kopolymer, polyakrylat.

Försiktighetsåtgärd:

Vliwasorb® Pro får inte klippas eller rivs av.

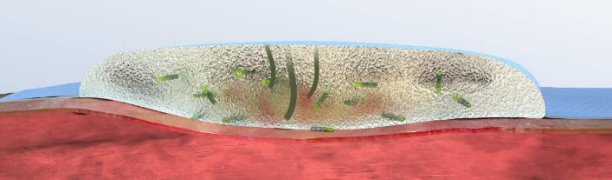

Binder höga volymer vätska inklusive bakterier vid behandling av kraftigt vätskande sår och har på så sätt en sårrenande effekt.



Mjukt, **elastiskt** och mycket flexibelt superabsorberande sårförband

Bruksanvisning:

1) Förberedning av såret:

Före applicering av nytt förband, rengör såret enligt gängse rutiner och torka sårkanterna.

2) Applicering av sårförbandet:

Storleken av förbandet avgörs av sårstorleken – sårdynan bör överlappa såret med ungefär 3cm. Förbandet skall appliceras med den vita sidan mot såret. Stryk ut förbandet försiktigt över såret och pressa ner kanterna. För djupa sår använd lämplig sårutfyllare (Suprasorb A, Suprasorb Liquacel). Fixera förbandet med fixerbinda alternativt med kompressionsbinda (Rosidal K) om detta har ordinerats.

3) Förbandsbyte:

Intervallerna för byte av Vliwasorb högabsorberande sårförband avgörs av ansvarig läkare, sköterska, beroende på sårets tillstånd (mängden exsudat m m) Intervallet mellan förbandsbytena får inte överskrida 7 dagar.

Att beakta:

- ✓Vliwasorb ska inte rivas av eller klippas.
- ✓När maximal absorptionskapacitet har uppnåtts kan ytterligare fastsättning av förbandet behövas för att undvika skjuvkrafter i den adhesiva ytan.
- ✓Produkten är steril om inte förpackningen är öppnad eller skadad.



För ytterligare information, var god se bipacksedel.

| Storlek | Sårdyna | Lev art nr | Avdfp | Trpfp |
|---------------|------------|------------|-------|-------|
| 10x10cm S | 6x6cm | 32 640 | 10 | 300 |
| 12,5x12,5cm S | 8,5x8,5cm | 32 641 | 10 | 300 |
| 12,5x22,5cm S | 8,5x18,5cm | 32 642 | 10 | 350 |
| 22x22cm S | 18x18cm | 32 643 | 10 | 260 |
| 22x32cm S | 18x28cm | 32 644 | 10 | 90 |