



## Vitrex® Sterilance Lite III Sterile Safety lancet

För din säkerhet och patientens bekvämlighet

### KNAPPAKTIVERING

**ANVÄNDARSÄKERHET** Nålen är helt skyddad, både före och efter användning.

**ANVÄNDARVÄNLIG** Förinställd, knappaktiverad design.

**PATIENTKOMFORT** Hög kvalitet, extra vass trefasad nål, höghastighetspenetration.

**BLODMÄNGD** En serie av nålstorlekar och stickdjup för att passa de flesta kapillärblodprovtagningar.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN** Test av blodglukos och andra in-vitro diagnostiska tester.


**PATIENTSÄKERHET** För engångsbruk, sterila, kan ej återanvändas.



1



2

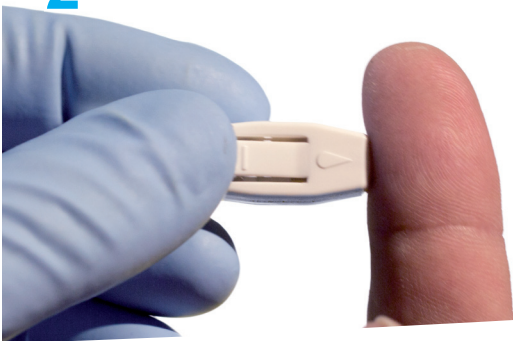

3



4



## Rekommenderad användning

1. Vrid av skyddslocket
2. Välj en punktionsyta vid sidan av fingertoppen för att minimera smärta vid provtagning och för att öka blodflödet.  
Tryck lansetten mot punktion sytan och tryck på knappen för att aktivera nålen.
3. Massera försiktigt fingret i punktionsytans riktning för att få fram den tillräckliga mängden blod.
4. Släng lansetten i en lämplig säkerhetsbehållare.

**WARNING: Använd ej om skyddslocket har tagits av vid ett tidigare tillfälle**

## Teknisk specifikation

Färgkod	Beskrivning	Stickdjup	Artikelnr.	Användning
Grön	18G blad	1,8 mm	373213	För hälpunktion på nyfödda och för tidigt födda barn
Lila	28G nål	1,8 mm	374213	Diabetes för blodglukos
Gul	26G nål	1,8 mm	375213	Diabetes för blodglukos
Blå	26G nål	2,4 mm	376213	Som Gul men för tjockare hud på vuxna.
Orange	21G nål	1,8 mm	377213	För hemoglobin, kolesterol, blodgas m fl. diagnostiska tester. För pediatrik samt normal hud på vuxna.
Rosa	21G nål	2,4 mm	378213	Som Orange men för tjockare hud på vuxna

Hållbarhet 5 år

## Förpackning:

Avdelningsförpackning: 100 st  
Transportförpackning: 1000 st  
Pall: 96000 st



Transportförpackning Pall