

# BIOPATCH®


## Den lilla produkten som kan göra stor skillnad

BIOPATCH är en klorhexidiniimpregnerad disk, som aktivt och kontrollerat avger CHG runt all typer av katetrar. Den minimerar bakteriefloran och absorberar sårsvätska kring instickstället, som i sin tur minskar risken för infektioner. Disken absorberar upp 8 gånger sin egen vikt, och byts var 7:e dag eller vid behov.

BIOPATCH kan bl.a. användas för IV katetrar, centralvenösa infarter, artärkatetrar, dialyskatetrar, dräneringarutvändigt placerade ortopediska stift och epiduralkatetrar.



### Utan BIOPATCH

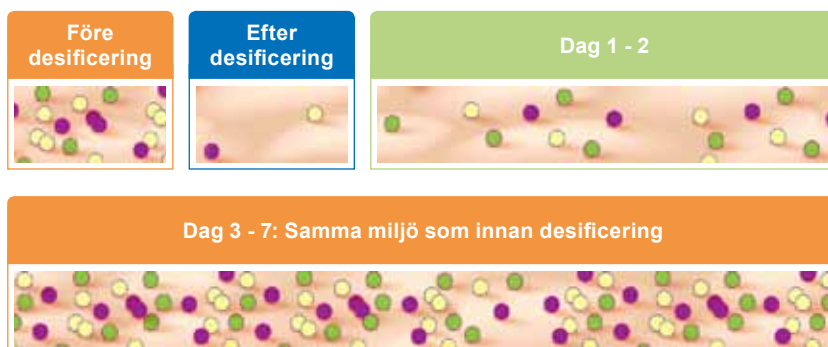

### Med BIOPATCH



### Beställningsinformation

Produkt-nummer	Produktbeskrivning	Kanyl French	Antal / förpackning
44150	○ BioPatch disk, Ø 2,5 cm, hål 4 mm	6 - 12 Fr	40
44151	● BioPatch disk, Ø 1,9 cm, hål 1,5 mm	< 6 Fr	40
44152	● BioPatch disk, Ø 2,5 cm, hål 7,0 mm	13 - 20 Fr	40

nya innovationer till vården


**Steripolar**

Tel. 018-430 0980

info@steripolar.se

www.steripolar.se

## Hur du applicerar BIOPATCH

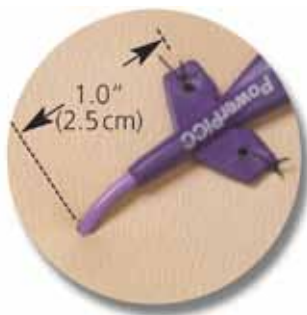

1. Förbered insticksstället. Fäst katetern minst 2,5 cm från insticksstället. Detta för att få en bra placering av disken.
2. Rengör huden enligt sjukhusets rutiner. Se till huden är helt torr. Placera disken runt katetern med den tryckta blå sidan uppåt.
3. Lägg sliten 5° till höger eller vänster om katetern, detta för att underlätta borttagning av förbandet. Se till att kanterna på slitsen sitter ihop.
4. Fäst förbandet så att disken har en bra kontakt med huden.

## Hur du tar bort BIOPATCH



1. Ta bort förbandet från katetern.
2. Disken följer med förbandet.

### OBS!

Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

## Tips för en lyckad användning



Fäst katetern minst 2.5 cm från insticksstället. Detta får att får en bra placering av BIOPATCH.



Placera inte vita skumsidan uppåt. Klorhexidinskummet måste vara placerat mot huden.



Fäst disken med slitsen till höger eller vänster om katetern och se till att kanterna sluter tätt. Detta för att underlätta borttagningen av förbandet och säkerställa effektiviteten.



Placera inte BIOPATCH ovanpå på katetern, disken måste ha kontakt med huden för att vara effektiv.

BIOPATCH stöds av över ett dussin randomiserade kontrollerade studier - inklusive alla fem studier som nämns i 2011 års CDC riktlinjer som stöder kategori 1B rekommendation för användning av CHG skumförband. På [www.biopatch.com](http://www.biopatch.com) kan ni läsa de olika studierna.

**nya innovationer till vården**

**Steripolar**

Tel. 018-430 0980

| [info@steripolar.se](mailto:info@steripolar.se)

| [www.steripolar.se](http://www.steripolar.se)