



TENA®

Produktfaktablad TENA Men Pants Plus

Användningsområde

TENA Men Pants Plus är en absorberande engångskalsong som ser ut, känns och används som vanliga kalsonger. Skyddet är speciellt framtaget för män med medelstora urinläckage.



Produktegenskaper

TENA Men Pants Plus är ett maskulint, diskret och säkert skydd i mörkblå färg, både utvändigt som invändigt, samt med en kupformad kärna framtill och dubbla läckagebarriärer. Kärnan med superabsorbenter absorberar, sprider och lagrar urin inne i skyddet. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Ben- och grenelastik sluter tätt i ljumskarna och ger ytterligare säkerhet.

TENA Men Pants Plus har Odour Control som hjälper till att kontrollera uppkomst av lukt. Produkten finns i storlekarna Small/Medium och Large/Extra Large. Skyddet tas på och av som vanliga underkläder. Sidosömmarna går att riva.



Anpassad för användning tillsammans med
TENA SmartCare Change Indicator

TENA. HÅLLBAR INDIVIDUELL INKONTINENSVÅRD.

www.tena.nu

Produktfaktablad TENA Men Pants Plus

TENA Men Pants Plus							
Uppsugningsnivå/storlek	Höftmått cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal kart/ halvpall	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Small/Medium	75-105	57	12	48	30	1129	77 25 22
Large/Extra Large	95-130	61	10	40	32	1198	77 26 40

Användarinstruktion

TENA Men Pants Plus tas på och av som vanliga kalsonger. Sidosömmarna är rivbara. Rulla ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.

Produktfaktablad TENA Men Pants Plus

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp av urin och motverka att vätska tränger tillbaka upp till ytan

ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

TISSUE MATERIAL

Material: ECF massa

Funktion: Förslutning av absorberande kärna

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

HÖFT- OCH MIDJEELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretrantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och kroppsnära passform

BEN – OCH BARRIÄRELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretrantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning

För samtliga TENA Men skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsatts produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 www.tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



TENA
an Essity brand