


Qorpus Vita Glidlakan

Qorpus Vita Glidlakan har en glidyta med låg friktion. Den låga friktionen underlättar för patienterna att med liten kraft själv förflytta sig i sängen. Användare som fortfarande kan men av olika anledningar har svårt att ändra position eller förflytta sig från sida till sida då är glidlakanet en ovärderlig hjälp. Det underlättar också för vårdpersonalen vid vändning eller förflyttning av sängliggande patienter och sparar vårdpersonalens axlar och ryggar.

Produktnyhet! Glidytan är specialvävd för att ge en ökad stabilitet i produkten samt att materialet klarar av att tvättas i 90grader, 200ggr utan påverkan på tyget!

OBS! Glidlakanet bäddas in med ca 10-12cm mellan glidyta och madrassens kant, detta markeras med längsgående söm. Detta är ett så kallat glidstopp för att användaren inte skall riskera att glida ur sängen och det förhindrar även att brukaren glider ner på golvet när hen sätter sig på sängkanten.


Benämning	Qorpus Vita Glidlakan		
Varumärke	Qorpus Vita		
Sanicare art nr	2060100M	2060140M	2060200M
Totalyta LxB cm	100x200	140x200	200x200
Liggytan LxB cm	100x60	140x60	200x60
Sängbredd cm	80-90		
Sanicare art nr	2075100M	2075140M	2075200M
Totalyta LxB cm	100x220	140x220	200x220
Liggytan LxB cm	100x75	140x75	200x75
Sängbredd cm	105		
Sanicare art nr	2095100M	2095140M	2095200M
Totalyta LxB cm	100x240	140x240	200x240
Liggytan LxB cm	100x95	140x95	200x95
Sängbredd cm	120		
Max brukarvikt kg	220		
Färg	Vit/Mönstrad		
Antal prod/förp st	1		
Material glidyta	Polyester		
Bäddflikar	Polyester / bomull		
Tvättråd	 Vid avförings- eller blodfläckar bör lakanet snarast sköljas i kallt vatten		
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 200		
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning		
Förvaring	Rumstemperatur		
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC		

Bruksanvisning och råd vid användning

Glidlakan är ett ergonomiskt hjälpmedel för personer med smärta eller nedsatt rörelseförmåga. Glidlakanet har ett blankt mittparti med mycket låg friktion. Denna glidyta gör det lättare att ändra ställning i sängen – på egen hand eller hjälp av vårdare. Friktionen minskas vid förflyttning i sidled. I den andra riktningen ger glidyta material och utformning en högre friktion. När man använder glidlakan underlättas minsta lägesförändring och det medför att blodförsörjningen ökar till utsatta kroppsdelar. Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av glidlakan minskar risken för trycksador. Glidlakanet lämpar sig mycket väl inom t.ex. sjukhusvård, äldreomsorg, gruppboende och hemvård. Även gravida kvinnor och personer med rygg- eller höftproblem har stor nytta av glidlakan.


Instruktioner/kortinformation glidlakan

- Bädda i Qorpus Vita glidlakan i sängen med glidyta vänd uppåt. Qorpus Vita glidlakan fixeras i sängen med hjälp av vingarna och bäddas in med ca 10-12cm glidstopp på vardera sidan om sängkanten.
- Produkterna är märkta med vilken sida som skall bäddas i sängen för rätt funktion och säkerhet

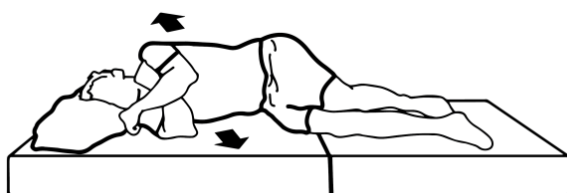

Placering i säng vid olika längder på glidlakanet för förflyttning i sidled!

OBS! Glidlakanet är markerat med glidriktning samt vilken sida produkten skall bäddas i säng för rätt funktion och säkerhet.

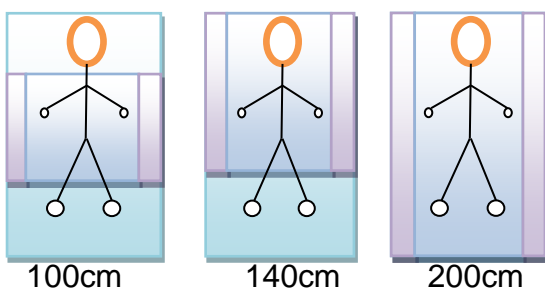

! Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att det fortfarande finns en risk för urglidning, efter varje avslutad förflyttning/positionering görs en riskbedömning om andra säkerhetsåtgärder måste vidtas! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme

OBS! Produkten får ej användas till att lyfta brukaren med. Max brukarvikt 220kg.

CE
Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.


Tillverkare:
Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg


Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 SH10 04484 TESTEX
OEKO-TEX® märket innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.


SWEDISH
Medtech


Dementia
Forum



sanicare 