


# The Pink Pad<sup>®</sup> och The Pink Pad<sup>®</sup> XL

Advanced Trendelenburg Positioning System

# Bruksanvisning

SWED PIFU Rev. 1; 5/25/16

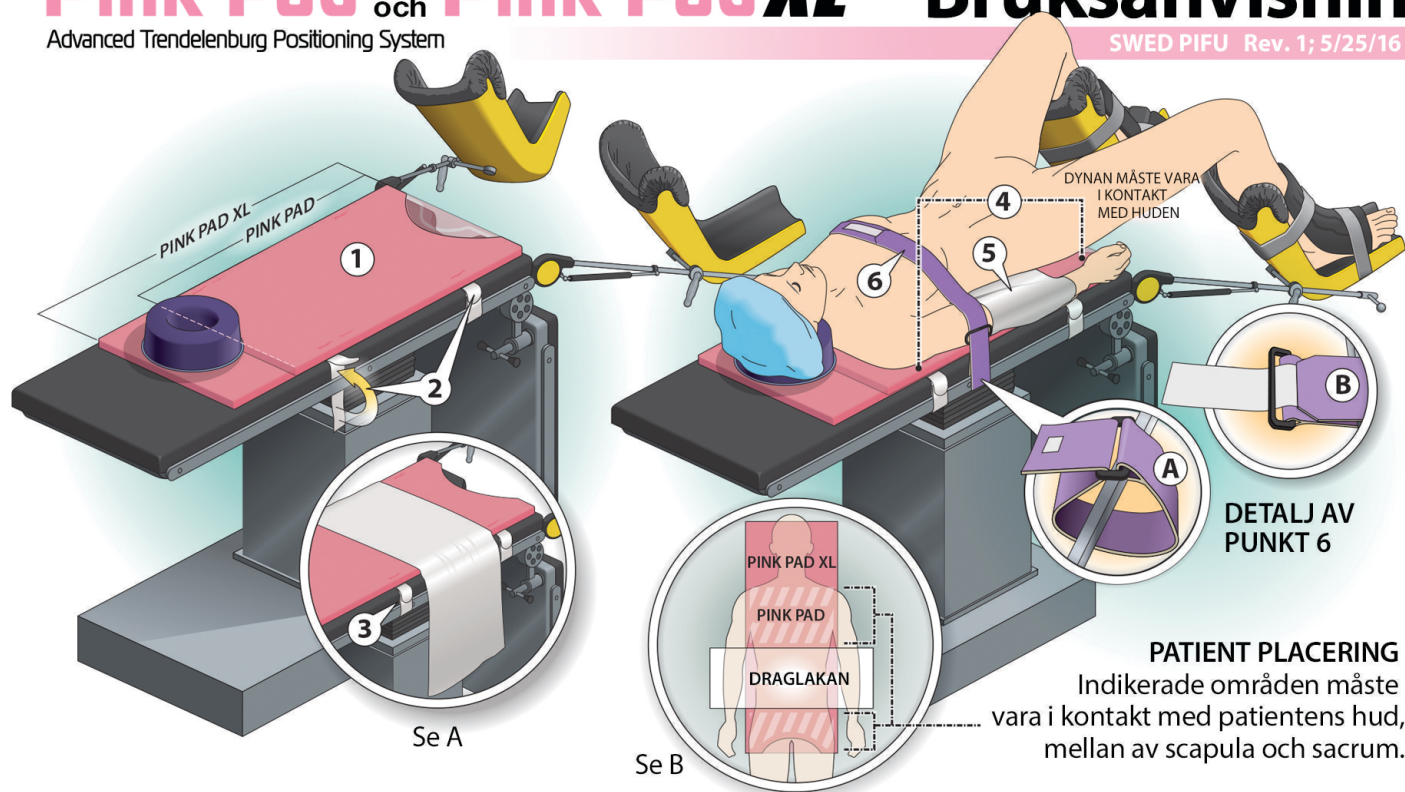

1. Placera Pink Pad på själva kanten av mittbordssegmentet närmast utskärningen för bäckenet. Positionera de vita kardborrbanden på undersidan av Pink Pad i kontakt med bordsdynans yta. FÅR INTE användas tillsammans med bordsdukar eller annat tyg. Pink Pad måste ha kontakt med bordsdynans yta. Märket för "This side up" ska vara vänt uppåt.
2. Fäst de vita kardborrbanden runt operationsbordets skenor genom att föra dem under skenan, enligt bilden, och fästa kardborrbandens ändrar vid varandra.
3. Lägg draglakanet över dynan, centrerad mellan kardborrbanden enligt bilden (Se A). Draglakanet ska täcka endast den del av dynan som ligger mot nedre delen av patientens rygg - ovanför sakrum och nedanför skapularegionen.
4. Följ klinikkens rutiner för intubation. Positionera sedan patienten korrekt på dynan.  
**VIKTIGT – PATIENTENS HUD MÅSTE HA DIREKTKONTAKT MED PINK PAD.**  
Huden i skapularegionen och sakrum måste ha kontakt med dynans yta, enligt bilden (Se B). Använd det medföljande draglakanet för att försiktigt lyfta patienten uppåt eller nedåt på dynan för den positionering som krävs för säker och korrekt applicering av benstöden. Drag inte patienten längs dynan. Säkerställ att dynan förblir helt platt hela tiden.
5. Stoppa in armarna enligt bilden eller enligt klinikkens positioneringsrutiner.
6. Fäst bröstremmen enligt följande:
  - A. Träd remdelen med den lilla kardborrknäppningen runt bordets skena och genom spännet.
  - B. Upprepa ovanstående steg på andra sidan bordet med den andra remdelen med kardborrbandets fästsida vänd nedåt. Sätt ihop remmarna.

## OBSERVERA:

1. Innan du använder Pink Pad, säkerställ att operationsbordets dyna är ordentligt fäst på operationsbordet.
2. Var noga med att följa klinikkens policy och riktlinjer för patientövervakning. Kontrollera att huden är hel och har en god cirkulation. Produkten får användas endast av legitimerad vårdpersonal.
3. Hantering & förvaring: Säkerställ att dynan är platt vid ALL hantering och förvaring.