

Öronproppar av silikon

vattentäta och ljuddämpande



Bekväma

Mack's öronproppar är tillverkade av silikon. De är mjuka och sköna. När silikonmassan blir lite uppvärmd av kroppsvärmen formas de perfekt efter dina öron. De sitter som gjutna, utan att varken skava eller trycka.

Riskfria

Silikon är ej allergiframkallande och innehåller inga giftiga ämnen. Det är helt riskfritt att använda.

Snarktät!

Om du störs av att någon snarkar eller är ljudkänslig och lätt blir störd i din sömn är öronproppar av silikon ett mycket gott val.

Bullerdämpande

Skyddar hörseln mot skadligt buller. Om du ofta vistas i bullriga miljöer skall du vara extra rädd om din hörsel för att undvika skador. Studier visar att långvarigt buller inte ens behöver vara särskilt högt för att ge skador på hörseln. Så om du arbetar i en bullrig miljö, är det särskilt viktigt att du skyddar dig. Det gäller även om du ofta vistas i buller på fritiden (läs disco eller konserter).

Vattentäta

Får du lätt in vatten i öronen vid simning, bad eller dusch så bör du använda silikonöronproppar som är vattentäta. Hjälper vid sk "simmaröron". För barn med känsliga öron och för öronbarn med rör i trumhinnan, rekommenderas vattentäta öronproppar. Tala med läkare vid relaterade medicinska problem.

Resor

Undvik tröttnande buller på flygresan genom att använda silikonöronproppar under hela resan. Det går mycket väl att höra information i högtalare och du kan konversera med dina medresenärer.



Material

Silikon

Tillverkningsland

USA

Förpackning

Transportförpackning är tillverkad i återvinningsbar pappkartong



Art nr	Beskrivning	Storlek	Färg	Förp
287777	McKEON Barnöronproppar av silikon	barn	röda	6 par (12st)
286666	McKEON Öronproppar av silikon	vuxen	ofärgade	2 par (4st)

Bruksanvisning

1. Se till att örat är torrt och rent. Rulla en hel öronpropp till en boll.
2. Placera proppen över hörselgångens öppning och platta till så att det blir lufttätt. Undvik hår.

WARNING! Tryck inte in proppen i hörselgången
 ANVÄND HEL ÖRONPROPP. TÄCK ENDAST, PRESSA
 INTE IN PROPPEN I HÖRSELGÅNGEN!

Tag bort öronproppen genom att trycka bakom örat. Kasta propp som blivit smutsig, eller som inte längre känns klibbig.

För bästa komfort vid flygresor, använd proppen hela flygtiden. Icke irriterande silikon.



Rekommenderas av läkare världen över för att:

- Skydda öronen mot vatten
- Hjälpa mot "simmaröron"
- Göra flygresan bekvämare
- Skydda hörseln mot buller

Ljuddämpning 20 dB (SNR)

CE0121 EN 352-2:1993, 89/686/EEG
 personlig skyddsutrustning

Viktigt!

DELA EJ. BARN UNDER 12 ÅR SKALL ENDAST ANVÄNDA ÖRONPROPPAR UNDERVUXENS ÖVERINSEENDE. FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR SMÅBARN. ANVÄNDS EJ VID DJUPDYKNING MER ÄN 3 M. FÖLJ BRUKSANVISNINGEN.

Ljuddämpning
 SNR = 20 dB

H = 24 dB M = 16 dB L = 14 dB

Frekvens i Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medel dämpning i dB	21,0	18,5	15,9	21,3	31,3	36,9	32,2
Standardavvikelser i dB	5,4	5,9	4,4	4,4	4,3	3,8	4,6
Förväntad dämpning i dB(AVP)	15,6	12,6	11,5	16,9	27,0	33,1	27,6