



# Sorbact® Secure

Skyddar och håller såret rent

Duschbart plåster som sitter säkert och skyddar från smuts utifrån. Det unika materialet binder bakterier från såret, vilket underlättar sårhäkningsen och förebygger infektion.



**Användning:** Mindre sår, t ex skärsår, rivsår, skrubbsår och operationssår.

**Bruksanvisning:** Rengör såret. Ta bort den vita skyddsfilm. Sätt på plåstret på torr hud med den gröna ytan i direktkontakt med såret. Tryck till runt kanterna. Ta bort den övre filmen med blå kant. Kan sitta på i flera dagar beroende på sårets tillstånd.

**Obs:** Vid tecken på infektion (rodnad, svullnad, smärta, varm hud), kontakta sjukvården. Använd inte med salvor och krämer. Använd inte om innerförpackningen är skadad eller öppnad. Alltför täta plåsterbyten kan ge viss irritation på känslig hud.

**Material:** Polyuretanfilm, polyakrylat, polyester, polypropylen, viskos, Sorbact®-väv baserad på cellulosaacetat.

Produkt	Art. nr	Storlek	Stl. sårdyna	St/förp.
Sorbact® Secure	210770	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm	5
Sorbact® Secure	752140	8 x 10 cm	4 x 6,5 cm	5



- Sitter säkert
- Kan användas av barn, gravida och ammande
- Minskar signifikant risken för postoperativa infektioner
- Ingen risk för resistensutveckling finns beskriven