


# Qufora® IrriSedo Cone

För transanal irrigation med hög volym

## Användning

Qufora IrriSedo Cone är ett transanalt irrigationssystem avsett för tömning av innehåll i den nedre delen av tjocktarmen. Transanal irrigation (TAI) utförs genom att tillföra vatten i tarmen via ändtarmen med hjälp av en konen.

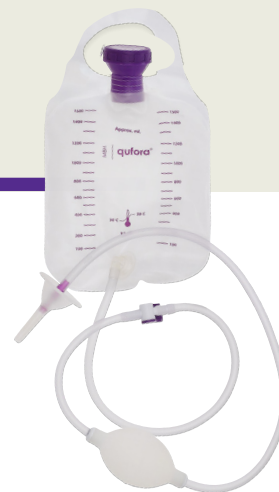

## Indikationer

Qufora IrriSedo Cone är indikerad för vuxna samt barn från tre år som lider av avföringsinkontinens, och/eller förstoppning. Till exempel:

- Neurogen tarmdysfunktion, t.ex. ryggmärgsskada, spina bifida och multipel skleros
- Kronisk förstoppning
- Kronisk fekal inkontinens

I dessa grupper kan vissa personer behöva hjälp av en vårdgivare för att utföra proceduren.

## Kontraindikationer

Transanal irrigation ska inte användas under följande omständigheter (absoluta kontraindikationer):


- Känd anal eller kolorektal stenosis
- Kolorektal cancer/bäckenmalignitet före kirurgiskt avlägsnande
- Akut inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit
- Inom 3 månader från en anal eller kolorektal operation
- Inom 4 veckor från endoskopisk polypektomi
- Ischemisk kolit

Eftersom listan inte är uttömmande ska sjukvårdspersonal alltid beakta även individuella patientfaktorer.

## Produktkonfigurationer

Typ av irrigationssystem	Beställningskod	Produkt	Innehåll
<b>Qufora® IrriSedo Cone</b>	53502-005	Cone 5 set	1 x 1,5L vattenpåse med pump, 1 x krok, 5 x konor
Konsystem	53503-015	Cone 15 set	1 x 1,5L vattenpåse med pump, 1 x krok, 15 x konor
Tillbehör eller förbruksartiklar	52201-001	Vattenpåse	1 x 1,5L vattenpåse med pump
	52601-015	Rektalkonor	15 x konor
	52715-015	Förlängningsslang	15 x förlängningsslangar
	9991-0003	Golvställning	1 x golvställning till vattenpåse

## Qufora IrriSedo Cone

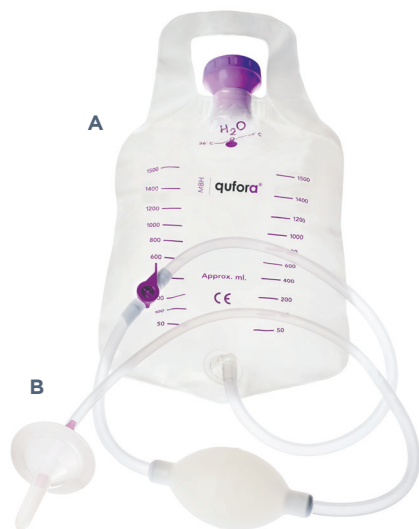

## Produktbeskrivning

- A.** 1500 ml vattenpåse, ansluten till en slang med en ventil och pump
- B.** Kon för engångsbruk med hydrofil beläggning som aktiveras när den doppas i vatten

## Produktegenskaper

- Den mjuka engångskonen är belagd så att den kan användas direkt när den doppats i vatten
- Konen är enkelförpackad i en påse som kan användas för att fästa och lossa konen hygieniskt, och kan användas som en avfallspåse för den använda konen
- Vattnet kan fyllas på antingen med gravitation eller med hjälp av den manuella pumpen
- Den manuella pumpen har en säkerhetsventil som förhindrar att det använda vattnet rinner tillbaka i pumpen

## Tillbehör

Kon med hydrofil beläggning  
Engångskonen är klar att användas  
när den doppas i vatten



## Materialbeskrivning

Delar	Material	Mjukmedel
Kon		
Genomskinlig kon	TPE	Inget mjukmedel
Beläggning	PVP	Inget mjukmedel
Vattenpåse		
Film	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Lila tratt/skruvlock	PVC, ftalatfri/PE	DEHT/DOTP
Frostad slang	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Ventil	PP (white part)/HDPE	Inget mjukmedel
Pump	PVC, ftalatfri	DINCH
Vit NRV-ventil ut och in	Hård PVC	Inget mjukmedel
Nät för ventil	Hård PVC	Inget mjukmedel
Svarta ventilkulor	Nitril	Inget mjukmedel
Lila koppling	Hård PVC	Inget mjukmedel
Förlängnings slang		
Förlängnings slang	PVC, ftalatfri	DEHT/DOTP
Lila koppling	Hård PVC	Inget mjukmedel

## Mått och vikt

Mått	Längd	Diameter	Volym
Kon	L 75 mm	Ø8 mm	
Pump	L 170 mm	59 mm	90 ml
Vattenpåse			1500 ml
Slang	L100 cm	6.5/9,2 mm	

## Rekommenderad användningstid:

- Konen är för engångsbruk.
- Vattenpåsen, pumpen och förlängnings slang kan användas upp till 1 månad. (när den används regelbundet varannan dag)

Om missfärgning skulle uppstå på någon del av systemet inom den rekommenderade användningstiden, ska delen bytas ut.

## Hållbarhet

2 år från produktion. Utgångsdatum anges på etiketten.

## Rengörning

Med undantag för konen, som är för engångsbruk, kan alla komponenter vid behov tvättas i mildt tvålsvatten. När produkten har torkat ska den förvaras torrt och skyddas från direkt solljus.

## Förvaring

Förvaras torrt vid en temperatur på mellan 0°C och 30°C, skyddat från direkt solljus och utom räckhåll för barn.

## Kassering

Qufora IrriSedo Cone kräver inga särskilda avfallsprotokoll och kan kasseras med vanligt hushållsavfall enligt lokala riktlinjer och rekommendationer.

## Klassificering och sterilisering

Qufora IrriSedo Cone är en produkt av klass I, icke-steril.

## Standarder och föreskrifter

- MDR (Regulation 2017/745) - CE
- UK MDR 2002 - UKCA
- ISO 13485:2016 (certified)