



## Skonsam sårbehandling



### DuoDERM<sup>®</sup> Standard

### DuoDERM<sup>®</sup> E

DuoDERM<sup>®</sup>-plattor är en serie sårförband som används till ocklusiv fuktighetsbevarande sårbehandling. I kontakt med sårvätska bildas en fuktig gel som bibehåller en fuktig sårmiljö och gynnar sårhäkningsprocessen. DuoDERM<sup>®</sup>-plattor har det mesta gemensamt. De består av en vidhäftande, hydrokolloid massa som bl a innehåller gelatin, pektin och natriumcarboxymethylcellulosa. På ovansidan finns en polyuretan film/foam. DuoDERM<sup>®</sup>-plattan har en diskret färg. Kan användas vid bad och dusch. De flesta plattorna kan klippas till lämplig storlek och form. Värm gärna plattan med händerna innan den appliceras på såret. Applicera sedan DuoDERM<sup>®</sup> med en marginal på 3 cm utöver sårkanterna. Se till att huden är torr så att plattan fäster bra. Förbandet kan sitta upp till 7 dagar eller så byts det när förbandet är mättat.

**Skillnaden mellan DuoDERM<sup>®</sup> Standard och DuoDERM<sup>®</sup> E är att materialet i E inte ombildas till en gel i samma utsträckning, det blir alltså mindre gel i såret.**



## DuoDERM® Standard förband

DuoDERM® är ett smidigt förband som passar speciellt bra för mindre till måttligt vätskande sår.

DuoDERM®-materialet skapar en fuktig sårhelingsmiljö som understödjer kroppens sårhelingsprocess och hjälper till att skydda huden runt såret. DuoDERM® fungerar som en bakterie- och virusbarriär<sup>1</sup> när förbandet är intakt och inget läckage förekommer.



Storlek	Förp.	Vnr
10 x 10 cm	5 st	263459 / 187610
10 x 10 cm	20 st	281444 / 187611
20 x 20 cm	5 st	263467 / 187620

## DuoDERM® E förband

DuoDERM® E är ett smidigt förband som passar speciellt bra för mindre till måttligt vätskande sår.

DuoDERM®-materialet skapar en fuktig sårhelingsmiljö som understödjer kroppens sårhelingsprocess och hjälper till att skydda huden runt såret. DuoDERM® fungerar som en bakterie- och virusbarriär<sup>1</sup> när förbandet är intakt och inget läckage förekommer.



Storlek	Förp.	Vnr
10 x 10 cm	5 st	293142 / 187660
10 x 10 cm	20 st	281469 / 187658
15 x 20 cm	10 st	281477 / 187631
20 x 20 cm	3 st	281485 / 187663
20 x 30 cm	3 st	281493 / 187642

## Fakta

### DuoDERM® Standard förband

DuoDERM® Standard förband är en steril, självhäftande tvåskiktspatta som innehåller pektin, gelatin, natriumkarboxymetylcellulosa (CMC) och polyisobutylen. Ovansidan består av polyuretanskum. Plattan finns i flera storlekar, kan klippas till efter behov och bör täcka ca 3 cm av huden runt såret. DuoDERM® Standard förband kan sitta kvar på såret i upp till sju dagar eller så byts det när det är mättat.

### DuoDERM® E förband

DuoDERM® E är en steril, självhäftande tvåskiktspatta bestående av Pektin, gelatin, natriumkarboxymetylcellulosa (CMC) och syntetiska elastomerer. Ovansidan består av polyuretanskum. Plattan finns i flera storlekar, kan klippas till efter behov och bör täcka ca 3 cm av huden runt såret. DuoDERM® E byts vid behov eller minst en gång per vecka.

### Förvaring/hållbarhet

Förvaras torrt i rumstemperatur. Hållbarhet 5 år.

### Steriliseringmetod

Gammasteriliserad.

### Klassificering

DuoDERM® Standard och E är CE-märkta och tillfredställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

För ytterligare information se bruksanvisning i respektive förpackning.



Kundservice: 020-21 22 22

1. Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds 1993;5:1-8.