


Wellion GALILEO kontrollösning, glukos



Bruksanvisning

- Skaka flaskan ordentligt
- Sätt i teststickan i mätaren
- Ikonerna „Glu“ och en bloddroppe blinkar på mätarens skärm
- Tryck på en av mätarens piltangenter för att starta kontrollmätningfunktionen. Ikonen „CTL“ visas på skärmen
- Torka eventuellt av överflödigt kontrollösning runt flaskans öppning och tryck ut en droppe kontrollösning på ett torrt, rent och icke absorberande underlag
- Låt teststickan suga upp lösningen. Håll kvar teststickan tills ett pip hörs.
- Efter 5 sekunder får du ett värde på skärmen
- Jämför ditt resultat med de värden som finns tryckt på teststickornas burk

VIKTIGT

- Använd endast Wellion GALILEO blodsockerkontrollösning (nivå 0, nivå 1 och nivå 2) tillsammans med Wellion GALILEO blodglukosteststickor. Andra fabrikat av kontrollösningar kommer ge felaktiga resultat.
- Kontrollera alltid utgångsdatum  . Använd INTE utgången kontrollösning.
- Skriv datum på etiketten till en nyöppnad flaska kontrollösning. Kassera eventuellt oanvänd kontrollösning 3 månader efter öppnandet.
- Får INTE frysas eller kylas. Lagra kontrollösningen mellan 4°C-30°C.

Artikelnummer	Specifikation	Intervall
WELL10-70	Wellion GALILEO glukos kontrollösning, nivå 0	2,1 – 3,7 mmol
WELL10-75	Wellion GALILEO glukos kontrollösning, nivå 1	5,4 – 7,2 mmol
WELL10-80	Wellion GALILEO glukos kontrollösning, nivå 2	10,1 – 13,7 mmol