

Kontroll-lösning till CALLA blodsockermätare / teststickor

En kvalitetskontroll för att försäkra sig om att mätare och teststickor fungerar som de ska.

Kontrolltest kan utföras om:

- Testresultaten inte stämmer överens med hur patienten mår.
- Om mätaren skadats.
- Om teststickorna förvarats olämpligt eller om burken varit öppnad.
- Patienten vill öva på sin testteknik

Snabbmanual

- Skaka flaskan
- Sätt i teststickan i mätare
- En bloddroppen blinkar på mätarens skärm
- Håll ut en droppe kontrollösning på ett torrt och rent underlag
- Låt teststickan suga upp lösningen. Håll kvar tills ett pipjud hörs. Efter 6 sek får du ett värde på skärmen
- Jämför ditt resultat med de värden som finns tryckt på teststickornas burk



Kontrollösningen finns i tre nivåer. På teststickans burk visas det intervall som resultatet ska jämföras med.

Art.nr	Kontroll-lösning nivåer	mmol / l
WELL970	Wellion CALLA GLU control solution, level 0	2,8 – 4,40
WELL975	Wellion CALLA GLU control solution, level 1	5,4 – 8,2
WELL980	Wellion CALLA GLU control solution, level 2	11,1 – 16,7

Mer information finns i bipackssedeln eller i mätarens användarmanual.

⚠ VIKTIGT:

- Använd endast Wellion CALLA glukoskontrollösning tillsammans med Wellion CALLA teststickor. Andra märken av glukoskontrollösning kommer att ge inkorrekta resultat.
- Kontrollera alltid sista utgångsdatum. **ANVÄND INTE** kontrollösning där sista utgångsdatum har passerats.
- Märk den öppnade kontrollösningsflaskan med datum då den öppnats; släng flaskan, även om den inte är tom, 6 månader efter första öppningsdatum.
- **LÄGG INTE KONTROLLÖSNINGEN I FRYSEN.** Förvara kontrollösningen i rumstemperatur.