

Navina Smart produktinformation

Navina™ Systems från Wellspect HealthCare har utvecklats för att hjälpa vuxna och barn över 3 år som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmskötsel.

Användaren kan vara rullstolsburen och/eller ha nedsatt motorisk funktion i händerna. Genom att tillföra vatten till nedre delen av tjocktarmen (kolon) kan man stimulera de peristaltiska musklerna i tarmen till att tömma tjocktarmen och ändtarmen (rektum). Barn ska utföra TAI i vuxens sällskap, tills dess sjukvårdspersonal bedömer att barnet klarar att genomföra TAI på egen hand.

- Rådgör alltid med sjukvårdspersonal som är specialiserade på TAI innan du använder Navina Systems
- Navina Systems ska endast användas så som det beskrivs i bruksanvisningen.
- Navina Systems ska endast användas av en och samma person.
- Navina rektalkateter regular, är endast för vuxna.
- Navina rektalkateter small, ska endast användas tillsammans med helvita Navina Systems.

Kontraindikationer

Använd inte Navina™ Smart om du har något av följande:

- Anal eller rektal stenosis
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit.
- Kolorektal cancer.
- Ischemisk kolit.
- Genomgått rektal operation för mindre än 3 månader sedan.
- Genomgått endoskopisk polypektomi för mindre än 4 veckor sedan

Listan över kontraindikationer är inte fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till individuella omständigheter

Navina Smart

Art. nr	Produkt	Innehåll
6900910	Navina Smart Regular* Endast för vuxna	1 Navina Smart kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Rektalkatetrar Regular * 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset
6901010	Navina Smart Small Från 3 år	1 Navina Smart kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Rektalkatetrar Small 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset
6901910	Navina Smart Kona Från 3 år	1 Navina Smart kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Konor 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset

NÄR TARMEN FUNGERAR, FUNGERAR TILLVARON

Wellspect®
A REAL DIFFERENCE



Navina Smart Förbrukningsartiklar

Art. nr	Produkt	Innehåll	Tekniska detaljer
6900310	Förbrukningsset Regular	1 Vattenbehållare 15 Rektalkatetrar Regular*	1,5 liter, hopfällbar, dubbel skala. Hydrofila, engångskatetrar.
6900410	Förbrukningsset Small	1 Vattenbehållare 15 Rektalkatetrar Small	1,5 liter, hopfällbar, dubbel skala. Hydrofila, engångskatetrar.
6901610	Förbrukningsset Kona	1 Vattenbehållare 15 Konor	1,5 liter, hopfällbar, dubbel skala. Hydrofila, engångskonor.
6894010	Rektalkateterset Regular*	10 Katetrar	Hydrofila, engångskatetrar.
6894310	Rektalkateterset Small	10 Katetrar	Hydrofila, engångskatetrar.
6901110	Slangset	1 Slang till kateter/kona 1 Slang till vattenbehållare	100 användningstillfällen 100 användningstillfällen
6901200	Tillbehörset	2 Greppringar(1 vertikal, 1 horisontell) 1 Nackband 1 Fästrem 1 Fästklämma till Navina Smart kontrollenheten	
6901410	Navina Smart kontrollenhet	Navina Smart kontrollenhet med laddare och kabel	Flödes hastighet 100 - 650 ml/min (+/- 50 ml) 400 användningstillfällen

* Endast för vuxna

wellspect.se



Navina Classic Produktinformation

Användning

Navina Classic är avsedd att användas för transanal irrigering genom att tillföra vatten till nedre delen av kolon genom en rektalkateter.

Indikationer för användning

Navina Classic är indikerad för att hjälpa vuxna och barn över 3 år som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmskötsel. Genom att tillföra vatten till nedre delen av tjocktarmen (kolon) kan man stimulera de peristaltiska musklerna i tarmen till att tömma tjocktarmen och ändtarmen (rektum).

- Rådgör alltid med sjukvårdspersonal som är specialiserade på TAI innan du använder Navina Systems.
- Navina Systems ska endast användas så som det beskrivs i bruksanvisningen.
- Navina Systems ska endast användas av en och samma person och får inte delas av flera.
- Navina rektalkateter regular, är endast för vuxna.

Kontraindikationer

Använd inte Navina™ Classic system om du har något av följande:

- Anal eller rektal stenosis.
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.
- Akut divertikulit.
- Kolorektal cancer.
- Ischemisk kolit.
- Genomgått rektal operation för mindre än 3 månader sedan.
- Genomgått endoskopisk polypektomi för mindre än 4 veckor sedan

Listan över kontraindikationer är inte fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till individuella omständigheter.

Navina Classic System

Art. nr	Produkt	Innehåll
6900510	Navina Classic System Regular * Endast för vuxna	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Rektalkatetrar Regular* 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset
6900710	Navina Classic System Small Från 3 år	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Rektalkatetrar Small 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset
6901710	Navina Classic System Kona Från 3 år	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Konor 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset



Navina Classic System Förbrukningsartiklar

Art. nr	Produkt	Innehåll	Tekniska detaljer
6900610	Navina Classic System Regular refill	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Navina rektalkatetrar Regular*	100 användningstillfällen 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala. 100 användningstillfällen Hydrofila, engångskatetrar.
6900810	Navina Classic System Small refill	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Navina rektalkatetrar Small	100 användningstillfällen 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala 100 användningstillfällen Hydrofila, engångskatetrar.
6901810	Navina Classic System Kona refill	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Konor	100 användningstillfällen 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala 100 användningstillfällen Hydrofila, engångskonor.
6900310	Förbrukningsset Regular	1 Vattenbehållare 15 rektalkatetrar Regular*	15 användningstillfällen. 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala Hydrofila, engångskatetrar.
6900410	Förbrukningsset Small	1 Vattenbehållare 15 Navina rektalkatetrar Small	15 användningstillfällen. 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala Hydrofila, engångskatetrar.
6901610	Förbrukningsset Kona	1 Vattenbehållare 15 Konor	15 användningstillfällen. 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala Hydrofila, engångskonor.
6894010	Rektalkateterset Regular*	10 katetrar	Hydrofila, engångskatetrar.
6894310	Rektalkateterset Small	10 katetrar	Hydrofila, engångskatetrar.
6901110	Slangset	1 Slang till kateter/kona 1 slang till Vattenbehållare	100 användningstillfällen. 100 användningstillfällen.
6901200	Tillbehörset	2 greppringar(1 vertikal, 1 horisontell) 1 nackband 1 fästrem 1 fästklämma till Navina Classic kontrollenheten	
6901310	Navina Classic kontrollenhet	1 Navina Classic kontrollenhet	100 användningstillfällen

* Endast för vuxna

Alla Navina Classic-komponenter skall kasseras som hushållsavfall.

wellspect.se

