



Zorflex® Accelerated Wound Healing™

Zorflex- Kolförband med antimikrobiell effekt.

Sår med bakterier och/eller lukt

Går att klippa. Tunn och smidig, lätt att forma och använda.

Innehåll: Viskosryon

CE-märkt produkt. Medicinteknisk produkt klass 2a.

Aktivt kol: Mikroporer som adsorberar lukt.

Antimikrobiell effekt: Naturlig antimikrobiell effekt genom elektrostatiska krafter som kallas Van der Waals krafter vilket gör att kolet fungerar som en magnet till bakterierna. Bakterierna dras till förbandet och fastnar genom de elektrostatiska krafterna på förbandet. Den elektrostatiska kraften blir sedan så hög att bakteriernas cellvägg brister och cellen dör. Endotoxinerna från de döda bakteriecellerna adsorberas, precis som lukt-molekylerna, in i mikroporerna.

Användning:

- Rengör såret
- Lägg Zorflex i såret. Klipp till förbandet så att det passar.
- Lägg stretchytan i benets riktning.
- Applicera lämpligt sekundärförband för att absorbera sårvätska.
- Zorflex kan användas i 7 dagar.

Zorflex 10x10 cm Antal per förpackning: 10 st Artikelnummer: 827645
Zorflex 10x20 cm Antal per förpackning: 10 st Artikelnummer: 827644

