



Antibac Oxivir Excel

Ytdesinfektion



CE

Antibac Oxivir Excel är en bruksfärdig lösning för rengöring och desinfektion av ytor. Produkten är effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer och den patenterade AHP-formulan ger en kortare kontakttid jämfört med vanlig väteperoxid. Kan användas på hårda, icke porösa ytor samt non-invasiv medicinteknisk utrustning. Bör ej användas på material som är känsliga för vatten och syra (t.ex. mässing, aluminium och galvaniserat stål). Undvik blandning med andra produkter.

Användningsområde	Antibac Oxivir Excel är framtagen för daglig desinfektion inom hälso- och sjukvården samt dental och veterinärsektorn och är även lämplig till slutstädning.
Produktegenskaper	<p>Fullständig virucid effekt. Effektiv mot bakterier, jästsvamp och virus.</p> <p>Snabb desinfektion med realistiska kontakttider</p> <p>Säker för både användare och ytor</p> <p>Verksamma ämnen bryts ner till vatten och syre</p> <p>Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara enligt Tvätt och Rengöringsmedelsförordningen (EC 648/2004)</p> <p>Kan användas på ytor som tål vatten och syra</p> <p>Ingen eftersköljning behövs</p> <p>CE-märkt och kan användas på non-invasiv medicinteknisk utrustning</p>
Bruksanvisning	<p>Bruksanvisning Wipe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handskar godkända enligt EN 374 bör användas. 2. Avlägsna stora mängder organiskt material. 3. Öppna förpackningen, dra ut en duk och stäng locket. 4. Bearbeta ytan. 5. Säkerställ att ytan förblir fuktad under hela kontakttiden (se tabell). 6. Tag en ny duk när den inte längre fuktar ytan, om duken är synbart smutsig eller när en ny patientnära yta ska rengöras och desinficeras. En servett är avsedd för ca 0,5 m².
Sammansättning	<p>Aktiva ämen</p> <p>Väteperoxid</p>

Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

6 x 750 ml

603057

7054956030577

7054957030576



**Ytterligare
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.