



För ytterligare information,  
var god se bipacksedel.

## Cellona Xtra splints – 4-lagers gipsskena Överlägset finrämig högvärdig gipsmassa

Den huvudsakliga skillnaden mellan Cellona och Cellona Xtra är bindetiden, vilken är kortare för Cellona Xtra (2 ½ minut istället för 3 ½ minut)

Högklassig gipsbinda med exceptionell finrämighet. Gipset är mycket lätt att modellera.

Genomhärdade Cellona förband är stabila, ytglatta och röntgengenomsläppliga.

Stelningstiden uppgår till ca: 2 1/2 min. vid ett doppvattentemperatur på 20° C.

Efter 30 min. kan man partiellt belasta gipset och efter 24 timmar så har man möjlighet att fullt belasta gipsbandaget.

Varje splint är individuellt förseglad med skyddande PE påse och förpackad i dispensosar av kartong

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
10cm x 20m	25056	1	1
12cm x 20m	25057	1	1
15cm x 20m	25058	1	1