
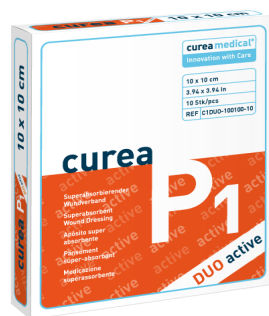


Curea P1DUO Active

Superabsorberade förband med kol för vätska, infektion och odör kontroll

Curea P1 DUO Active är en effektiv problemlösare för illaluktande, infiserade och vätskande sår. Patenterad SuperCore teknologi gör att den effektivt tar upp, binder vätska och skapar en torr yta mot såret.

Aktivt kol i förbandet hanterar och reducerar lukt.

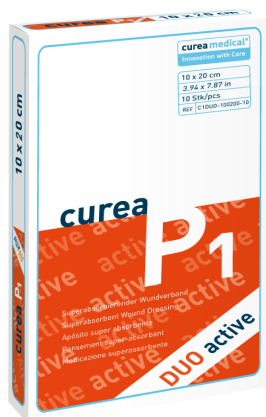

- Hög absorptionskapacitet
- Säker retention och binder bakterier
- Förebygger maceration
- Torr yta mot sårområdet
- Innehåller aktivt kol som reducerar lukt
- Reducerar risken för korskontamination
- Optimalt under kompression
- Kan användas 5-7 dagar på sårområdet
- Reducerar antalet förbandsbyten
- Steril
- Det activa kolet hjälper att dekontaminera såret

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- Rengör såret enligt gällande principer.
- Lägg på en Curea P1 DUO Active i passande storlek. (Går ej att klippa i förbandet)
- Lägg förbandet med den hvita sidan inn mot sårytan om målet är att reducera lukt, lägg kol sidan inn mot sårytan om målet är att dekontaminera såret.
- Fixera förbandet
- Låt förbandet sitta på tills det är mättat. Max 7 dagar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kroniska sår, vätskande sår, infiserade sår och illaluktande sår.