



ViTri:Sipro

Produktbeskrivning:

ViTri:Sipro är ett transparent perforerat sårkontaktlager av polyuretanfilm belagd med silikongel. Sårkontaktlagret är ej absorberande och möjliggör för sårvätskan att passera genom dess perforerade struktur till ett absorberande ytterförband. Förbandets uppgift är att minska risken för att det absorberande ytterförbandet fastnar i såret vilket i sin tur förenklar byte av ytterförband.

Bytesfrekvens av det yttre förbandet bedöms beroende på sårets tillstånd samt mängden sårvätska, bytet av det sekundära förbandet bör ske så ofta som nödvändigt för att förhindra maceration. Den icke vidhäftande sidan av förbandet gör det möjligt att även använda som enbart förband för att t ex skydda skör eller skadad hud.

Indikationer:

Förbandet är avsett att användas som sårkontaktlager till ett brett spektrum av olika vätskande sår, t ex kirurgiska snitt, delhudsbrännskador, transplantat, skrubbsår, trycksår, rivsår, traumatiska sår, blåsor, fot- och bensår, under kompression, samt som skydd över skör hud.

Kontraindikationer:

Avbryt användandet av förbandet om patienten är allergisk mot något av dess beståndsdelar. Om förbandet används på brännskador där transplantation gjorts eller efter ansiktsrekonstruktion kan märken/avtryck uppträda om förbandet inte används korrekt.

Bytesfrekvens:

Förbandet kan förbli kvar så länge exsudat kan passera fritt till ett absorberande ytterförband, beroende på lokala behandlingsriktlinjer som följs kan bytesfrekvensen variera.

Applikation:

- Välj storlek som täcker såret och överlappar minst 2 cm av den omgivande friska huden.
- Kan vid behov klippas till önskad storlek innan skyddsfilmen avlägsnas. Välj en större förbandsstorlek istället för flera överlappande små förband. Förbandet får sämre vidhäftning vid överlappningar.
- Greppa skyddspapprets båda flikar och dra isär. Avlägsna försiktigt en del av skyddsfilmen. Applicera mitten av förbandet på såret innan avlägsnandet av resten av skyddsfilmen.
- Stryk försiktigt på förbandet så att det säkert fäster på den omgivande huden.
- Kontrollera att förbandet inte spänner på huden. Vid behov kan hela eller delar av förbandet lossas och fästas på nytt. Gel kan vid behov appliceras under eller ovanpå förbandet.
- Applicera vid behov ett sekundärt absorberande förband ovanpå sårkontaktlagret, fixera det sekundära förbandet på ett lämpligt sätt om det ej har fixering.

Artikelnummer	Beskrivning
804001	5 x 7,5 cm, S, 10 st/avdfp, 800 st/trpfp
804002	7,5 x 10 cm, S, 10 st/avdfp, 400 st/trpfp
804005	10 x 12 cm, S, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp
804003	10 x 18 cm, S, 5 st/avdfp, 200 st/trpfp
804004	20 x 30 cm, S, 3 st/avdfp, 120 st/trpfp