

Bruksanvisning för Grip-Lok CS för säker fixering av Bard PICC-line


Grip-Lok 3304MCS-BA är ett fixeringsförband som är starkt nog att fixera katetrar säkert på plats, men ändå mångsidigt nog för att passa nästan varje patient. Grip-Lok CS har en utstansning som matchar formen av kateters suturvinge för korrekt placering och ytterligare stabilitet.

- Mjukt och flexibelt material designad för ökad patient komfort.
- Ger överlägsen fixering för både horisontella och vertikala oavsiktliga drag.
- Enkel att placera, kontrollera och justera.
- Hypoallergen, ventilerad och latexfri för att minska risken för allergiska reaktioner och hudirritationer.

Förbered huden enligt sjukhusets rutiner för applicering av förband. Preparering av hud eller hårborttagning kan behövas hos vissa patienter för bättre vidhäftning.



Öppna den övre kardborrefliken och skjut Grip-Lok förbandet under kateters suturvinge. Placera kateters suturvinge i utstansningen och tryck försiktigt mot häftmassan.

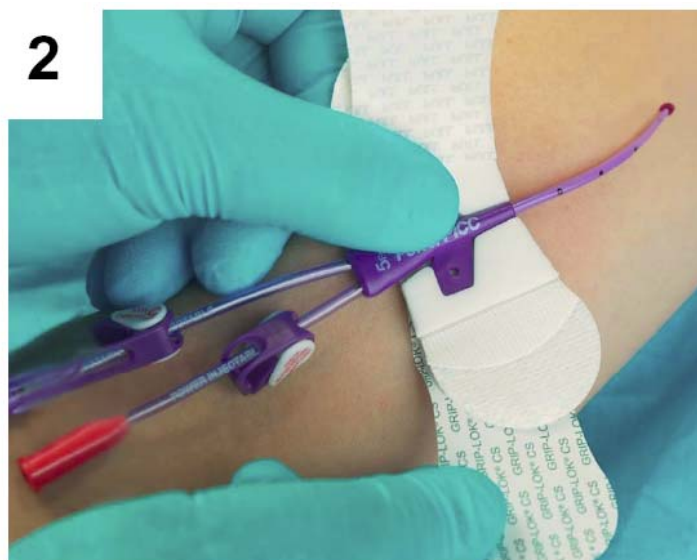

Dra bort och avlägsna ena sidan av skyddspappret under förbandet, medan Grip-Lok förbandet hålls i rätt position. Dra bort och avlägsna sedan den andra sidan av skyddspappret.



Dra bort och avlägsna det inre skyddspappret under den övre kardborrefliken för att exponera häftmassan.



Fixera den övre kardborrefliken över kateters suturvinge och tryck häftmassan på plats. Det övre kardborrebandet kan öppnas på nytt för att inspektera och justera kateters suturvinge.



**Alternativ teknik:
Fixera Grip-Lok till kateters suturvinge innan den klistras mot huden.**