

+ PICO[◇] 7 för djupa sår^{1,2}

Smith+Nephew

PICO[◇] 7

Engångssystem för sårbehandling med negativt tryck

Helping you get **CLOSER TO ZERO[◇]** delay in wound healing^{3,4}

smith-nephew.com/pico



PICO 7 förband med AIRLOCK-[◇] teknologi har visat sig kunna hantera låga till måttliga mängder sårvätska och leverera ett nominellt -80 mmHg negativt tryck i sår som är djupare än 2 cm när det används med ett NPWT-sårfyllnadsmaterial^{1,2}


+ Som en del av en behandlingsplan visade det sig att användning av PICO[◇] sNPWT på en mängd svårläkta sår djupare än 2 cm avsevärt minskar genomsnittstiden för sårhäkning med 11,75 veckor*²

PICO-förband kan användas med eller utan sårfillnadsmaterial

Om sår djupet är mindre än 0,5 cm kan PICO-förbandet appliceras direkt på såret. Om såret är djupare än 0,5 cm behövs sannolikt ett sårfillnadsmaterial.

Tips: När du applicerar PICO-förband utan sårfillnadsmaterial, anpassa försiktigt förbandet till såret med hjälp av fingrarna

Sårtyper under 2 cm där sårfillnadsmaterial kan vara lämpligt att använda:

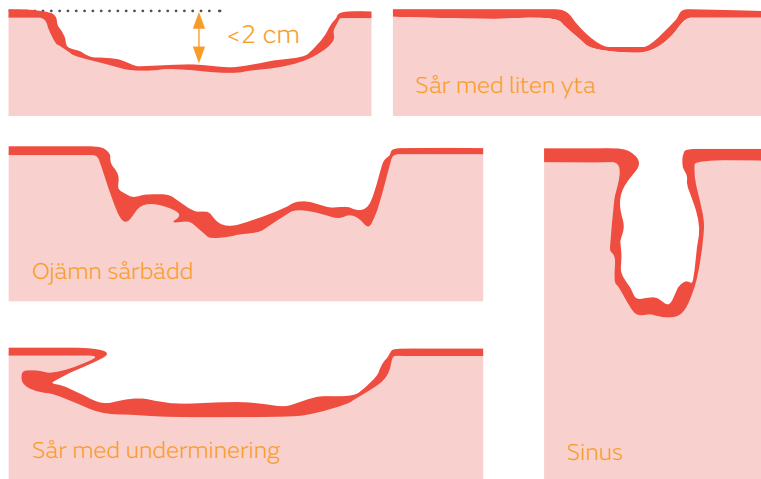

För detaljerad produktinformation, inklusive indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar, se produktens tillämpliga bruksanvisning före användning.


Beställningsinformation för PICO 7 systemet

Förband	Förbandsstorlek	2 x förband ¹	1 x förband ¹	Multipack ⁵
	10 cm x 20 cm	66802002	66802012	66802022
	10 cm x 30 cm	66802003	66802013	66802023
	10 cm x 40 cm	66802004	66802014	66802024
	15 cm x 15 cm	66802005	66802015	66802025
	15 cm x 20 cm	66802006	66802016	66802026
	15 cm x 30 cm	66802007	66802017	66802027
	20 cm x 20 cm	66802008	66802018	66802028
	25 cm x 25 cm	66802009	66802019	66802029
	Multisite small 15 cm x 20 cm	66802000	66802010	66802020
	Multisite large 20 cm x 25 cm	66802001	66802011	66802021

Smith & Nephew AB
Kråketorpsgatan 20
Box 143
431 22 Mölndal
Sverige

Sårfillnadsmaterial

Sår som är djupare än 2 cm måste fyllas med gasväv eller skum med PICO-systemet för att säkerställa optimal behandling av hela sårytan.¹

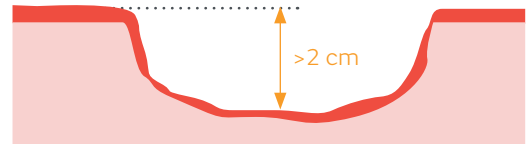


(Exempel på djupare sår)

Applicering av NPWT sårfillnadsmaterial

Sårfillnadsmaterial med gasväv

- Applicera ett lager av gasväv fuktad med koksaltlösning på sårbädden. Fortsätt applicera gasväv i lager, tills gasväven löst fyller hela sårhålan.

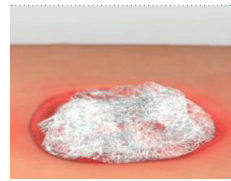

- Se till att gasväven inte överlappar till frisk hud

Sårfillnadsmaterial med skum

- Klipp skummet så att dess storlek och form passar



- Klipp INTE skummet direkt över såret
- Se till att skummet inte överlappar till frisk hud

Förbrukningsartiklar

PRODUKT	Storlek	Artnr.
Skum	10 cm x 12,5 cm	66801021
Gasväv (5 rullar) + 1 SECURA [◇] No Sting Barrier film	11,4 cm x 3,7 m	66802127

www.smith-nephew.com

Tel: 031-746 58 00
Fax: 031-87 05 32

[◇]Varumärke som tillhör Smith+Nephew
Alla varumärken erkänns
©November 2020 Smith+Nephew
AWM-AWC-27929 | GMC1219a-sv

*Jämfört med standardförband; p<0,05; n = 409 kontra n = 2 242. †2 x förbandssatser + 1 pump. ‡1 x förbandssats = 1 förband + 1 pump. §Flerpack = endast 5 förband.

Referenser

1. Smith+Nephew 2018. The review of evidence supporting the use of PICO in wounds ≥2cm in depth. Internal report. EOAWM.PCS230.001v2. 2. Hurd T, Gilchrist B. Single use negative pressure wound therapy (sNPWT) in the community management of chronic open wounds deeper than 2cm. Paper presented at: Symposium on Advanced Wound Care/Wound Healing Society Meeting; 2020; Abu Dhabi. 3. Dowsett C, et al. Use of PICO to improve clinical and economic outcomes in hard-to-heal wounds. *Wounds International*. 2017;8(2):52–58. 4. Kirsner R, et al. A Prospective, randomized, controlled clinical trial on the efficacy of a single-use negative pressure wound therapy system, compared to traditional negative pressure wound therapy in the treatment of chronic ulcers of the lower extremities. *Wound Repair and Regeneration*. 2019;27(5):519–529.