

TENA®

## Produktfaktablad TENA Comfort Mini Super (ej andningsbar)

### Användningsområde

TENA Comfort Mini Super är läckagesäkra, bekväma och diskreta skydd för medelstora urinläckage.



TENA. HÅLLBAR INDIVIDUELL INKONTINENSVÅRD.

[www.tena.nu](http://www.tena.nu)

# Produktfaktablad TENA Comfort Mini Super (ej andningsbar)

## Produktegenskaper

TENA Comfort Mini Super har dubbla kärnor som absorberar urinen snabbt, sprider och lagrar den i botten av skyddet. Det gör att ytan känns torr och risken för läckage minskar.

TENA Comfort Mini Super har en mjuk långsgående trådelastik. Detta skålformar produkterna och bidrar till god komfort och passform, vilket ökar läckagesäkerheten. Ett mjukt yskikt närmast huden (Silky Softness) som är klätt med textilliknande nonwoven ger god komfort och hudhälsa. Odour Control™ hjälper till att förhindra oönskad lukt.

Skyddet fixeras enkelt i åtsittande underkläder och sitter säkert på plats, utan att lämna häftrester på textilier, med en bred långsgående tejprensa på produktens baksida. Skyddspappret är märkt med produktnamn/storlek.



## TENA Comfort Mini Super

Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/ påse st	Antal/ kart st	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Mini Super	✓	43	20,1	43	30	180	321	964	761727



Snabbt absorberande kärna  
för en torr yta



Odour Control™ hjälper till att  
förhindra oönskad lukt

## Användarinstruktion

Dra bort skyddspappret från baksidan av skyddet.

Fäst skyddet i åtsittande underkläder eller fixeringsbyxa.

Se till att skyddet behåller sin skålform.

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.

# Produktfaktablad TENA Comfort Mini Super (ej andningsbar)

## Ingående material

### YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

### GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

### ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

### ELASTIK

Material: Polyuretan, polyisopren

Funktion: Komfort, läckagesäkerhet och skålform

### SPÄRRSKIKT

Material: Polyetenfilm (PE)

Funktion: Hindra genomvätning

Följande material/ämnen har inte tillsats produkterna:

naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

## Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 [www.tena.nu](http://www.tena.nu)

✉ [tena.nu@essity.com](mailto:tena.nu@essity.com)

📘 [facebook.com/TENASverige](https://facebook.com/TENASverige)